


..... 使用時期の目安

悪露が落ち着いたら

キレイなママのための
産後美容
コルセット

ママスリム

DOUBLE

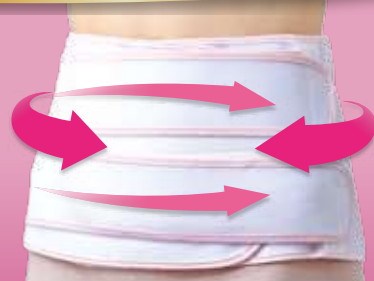

しっかり
なか
お腹シェイプアップ

3段階の圧迫固定で
腹部をしっかり引き締める!

産後の リフォームケア	出産当日.....	悪露が 落ち着いたら 産後約2ヶ月
マザーベルト (骨盤まわりに)	Pink/White/LIGHT		
ママスリム (ウエスト、お腹まわりに)		SINGLE やさしくタイプ
		DOUBLE しっかりタイプ

適合ウエストサイズ	
M~L	62~84cm
L~LL	72~94cm

MADE IN JAPAN

*使用時期は目安です。体調に合わせて着用してください。

3段階の圧迫固定で腹部をしっかり引き締める!




装着方法




①補助ベルト、③上下ベルトを
②メインベルトから外し、ウエスト(肘の高さ)にメインベルトの上側を合わせます。

②両側からウエストをしぼるようにして、②メインベルトを留めます。

③補助ベルトを留めます。

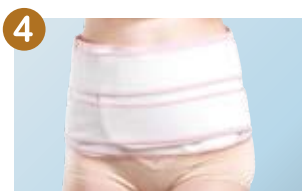

④上下ベルトを引っ張って留めれば完了です。

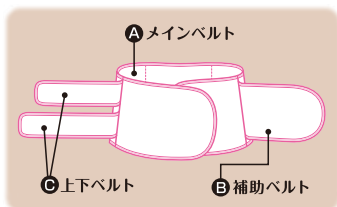

装着のポイント

- 適切な強さと位置には個人差がございます。ご自身で最もよいと思う強さと位置でコルセットを締めてください。
- コルセットが肌に当たって痛い場合は、肌着等の上から着用してください。

しっかり引き締め

外側2本の上下ベルトで圧迫力を調整していただけます。それぞれお好みの力加減での引き締めが可能です。

3段階の圧迫固定

メインベルト、補助ベルト、2本の上下ベルトにより、3段階でしっかりと圧迫固定することができます。

こだわり素材

医療現場でお使いいただいている丈夫な素材で、着用時のホールド感、安定感に優れています。

製品情報

品番	品名	規格	適合ウエストサイズ	包装	JANコード
1490526	meetuu ママスリムダブル	M~L	62~84cm	1枚/箱	4 958286 711737
1490527		L~LL	72~94cm	1枚/箱	4 958286 711744

※ 詳細は各営業にお問い合わせください。



ハクゾウメディカル株式会社 <http://www.hakuzo.co.jp/>

〒540-0025 大阪市中央区徳井町2丁目4番9号 TEL.06-6942-0451 FAX.06-6945-0539

本社営業課 TEL:06-6809-4318
東京支店 TEL:03-3522-6720
北大阪支店 TEL:072-653-4045
南大阪支店 TEL:0721-20-2900
神戸支店 TEL:078-976-8901
仙台営業所 TEL:022-399-7091
西東京営業所 TEL:042-646-0451

三河営業所 TEL:0564-54-5447
三重営業所 TEL:059-350-3844
京都営業所 TEL:075-603-4826
大阪中央営業所 TEL:06-6943-6118
阪神営業所 TEL:078-262-1634
広島営業所 TEL:082-849-4188
四国営業所 TEL:0875-52-6900

福岡営業所 TEL:092-481-5921
北九州営業所 TEL:093-617-3911
熊本営業所 TEL:096-345-2253
札幌駐在所 TEL:011-788-8009
盛岡駐在所 TEL:019-613-2176
北陸駐在所 TEL:076-225-8013
沖縄駐在所 TEL:098-941-5320