



薄型タイプ

骨盤を固定し、緩みを回復する

IGHT








通気性がよく

ムレにくい!





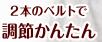



6cm幅ベルトが 骨盤にフィット

マザーベルト (骨盤まわりに)

Pink/White 毎日使えるスタンダードタイプ

LIGHT 外出時などにオススメな薄型タイプ

※装着時期は目安です。体調に合わせて着用してください。

MADE IN JAPAN

COLOR Black

適合ヒップサイズ 60~85cm 85~105cm L~LL 105~120cm



骨盤を固定し、緩みを回復する薄型の骨盤固定ベルトです



外出時などに オススメな 薄型タイフ

装着のポイント

●適切な強さと位置には個人差がございます。

ご自身で最もよいと思う強さと位置で補助ベル

① 薄型タイプ

服の下に着けても目立ちにくく、外 出時などにオススメです。サイドと 背面全体にメッシュ生地を使用し、 全体的に通気性を高めました。

②調節かんたん

2本のベルトにより、締まり具合を簡 単に調節できます。

③ こだわりベルト

6cm幅ベルトが締めるべき位置にフ ィットし、ご自身でも装着位置が分 かりやすくなっています。腹部への 圧迫も少なく、着用中の違和感が少 ない設計です。

④しっかり設計

◎恥骨結合部

背中側の3つの補強板で、安定感のあ る着け心地です。

●腰の一番出ている 部分のやや下 **B大転子** ●太腿の付け根あたりの 出っ張った骨

装着方法



補助ベルトがある方を外側にして、 補助ベルトを外します。 △上前腸骨 棘(じょうぜんちょうこつきょく)と③大転 子(だいてんし)を探し、お尻を包み込 むようにして 2 点間にメインベルト を通します。



ベルトの前側は●恥骨結合部に重 なるようにします。



補助ベルトを持って、前へ引っ張っ て締めます。



補助ベルトを留めれば完了です。

●ベルトが肌に当たって痛い場合は、ショーツ等 の上から着用してください。

トを締めてください。

品番	品名	規格	包装(サイズ/重量)	JAN⊐−ド
1490520	meetuu マザーベルトライト	S〜M ブラック	1袋/箱 W118×D35×H215mm 約130 g	4 958286 709567
1490521		M~L ブラック	1袋/箱 W118×D35×H215mm 約140 g	4 "958286" 709574
1490522		L~LL ブラック	1袋/箱 W118×D35×H215mm 約155 g	4 958286 709581

※ 詳細は各営業にお問い合わせください。



ハクゾウメディカル株式会社

〒540-0025 大阪市中央区徳井町2丁目4番9号 TEL. 06-6942-0451 https://www.hakuzo.co.jp/

東京支店☎03-3522-6720 北大阪支店☎072-653-4045 南大阪支店 ☎ 0721-20-2900 仙台営業所 ☎ 022-393-7434 関東営業所 ☎03-5809-4780 西東京営業所 ☎042-646-0451 名古屋支店 ☎052-769-6021 - 重営業所 ☎ 059-350-3844

京都営業所 ☎075-603-4826 大阪中央営業所 ☎ 06-6943-6118

本社営業課 ☎06-6809-4318 阪神営業所☎078-262-1634 神戸営業所☎078-940-8975 広島営業所☎082-849-4188 福岡営業所 2092-481-5921 熊本営業所☎096-345-2253 札幌駐在所☎011-788-8009 北陸駐在所☎076-225-8013 鹿児島駐在所☎099-296-1925 沖縄駐在所☎098-941-5320

