

マザーベルト SUGU



こんなお困りの声に!

寝ている時に
分厚いベルトは
違和感がある...



産後も使う
ベルトは
汚したくない!



出産直後は
締める手順が
少ない方がよい!

妊婦さまのベルトを
汚してしまわないか心配...

マザーベルトSUGUで解決!

使いきりタイプで 汚れの不安を解消

薄型のベルトで装着時の 違和感を軽減

簡単3STEPで 装着 楽チン!

使いきりタイプの不織布製 産後用骨盤固定ベルトです



使用時期
出産直後 にご使用ください

適合ヒップサイズ	
M~L	85cm~105cm
L~LL	105cm~120cm

【素材】主生地:ポリエステル 70%、レーヨン 30%

使用方法



起毛している方を外側にして、**上前腸骨棘**(腰の一番出ている部分のやや下)と**大転子**(太ももの付け根あたりの出ている骨)を探し、お尻を包み込むようにして2点間にベルトを通します



ベルトを前側で交差させて、引っ張ります




ご自身で最も良いと思う強さで留めてください

製品特長

- ♥ 非伸縮性と6cm幅のベルトでしっかりと骨盤を締めることができます
- ♥ どこでも留めることができ、こまやかなサイズ調整が可能です
- ♥ 薄くて肌ざわりの良い素材で、着用時の違和感を軽減します
- ♥ 清潔な使いきりタイプです
- ♥ 直後パッドと合わせてご使用いただけます

使用上の注意

- 上前腸骨棘と大転子の間を締めてください
- 繰り返し着用する場合は「マザーベルト」をご使用ください

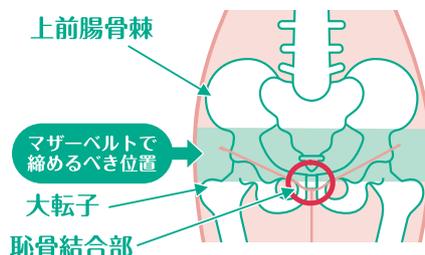

製品情報

品番	品名	規格	包装	1 梱入数	JANコード
3108201	meetuu マザーベルト スグ	M ~ L (幅60mm×長さ1.35m)	1 本/袋	100本/ケース	 4 958286 709017
3108202		L ~ LL (幅60mm×長さ1.55m)			 4 958286 709024

※ 詳細は各営業にお問い合わせください。



ハクゾウメディカル株式会社 <http://www.hakuzo.co.jp/>

HAKUZO 〒540-0025 大阪市中央区徳井町2丁目4番9号 TEL.06-6942-0451 FAX.06-6945-0539

本社営業部 TEL:06-6809-4318
 東京支店 TEL:03-3522-6720
 北大阪支店 TEL:072-653-4045
 南大阪支店 TEL:0721-20-2900
 神戸支店 TEL:078-976-8901
 仙台営業所 TEL:022-399-7091
 西東京営業所 TEL:042-646-0451
 三河営業所 TEL:0564-54-5447
 三重営業所 TEL:059-350-3844
 京都営業所 TEL:075-603-4826
 大阪中央営業所 TEL:06-6943-6118
 広島営業所 TEL:082-849-4188
 四国営業所 TEL:0875-52-6900
 福岡営業所 TEL:092-481-5921
 北九州営業所 TEL:093-617-3911
 熊本営業所 TEL:096-345-2253
 沖縄駐在所 TEL:098-941-5320
 札幌駐在所 TEL:011-788-8009