

# 爽快 お〇キレイぐるっとブラシ



贅沢毛量


極やわらかブラシ

360°  
設計

一般的な歯ブラシの  
約20倍




やさしい  
磨き  
360°  
設計

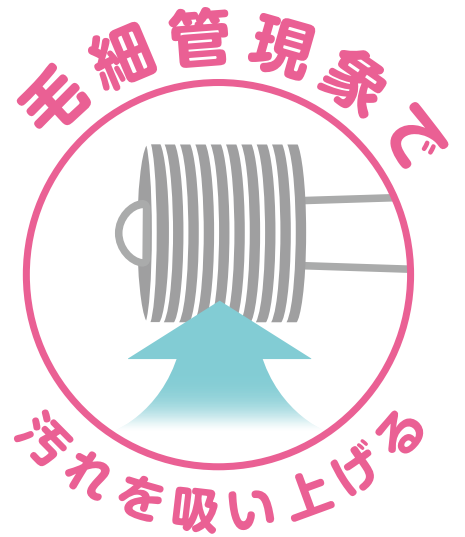


## 製品特長

標準的な歯ブラシのように擦って取るのではなく、  
20倍以上の毛数による毛細管現象※で毛束の中に  
汚れを吸着することができます。

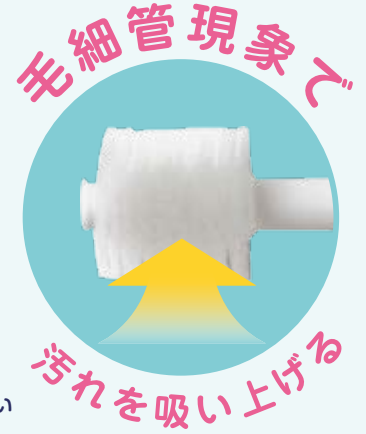

柄の材質	ポリプロピレン	毛の硬さ	やわらかめ
毛の材質	ナイロン	耐熱温度	90℃

※毛細管現象とは？  
細い管の間を液の表面張力の作用により、  
吸い上げる現象のこと。  
毛束が多いほど、より吸い上げます。

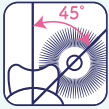

●誰でも理想の45°  
ブラッシング  
●高密度毛が歯垢と  
効率的に除去



●毛先を加工した  
極細毛で歯茎に  
やさしい。



●コンパクトヘッドで  
奥にも届く  
●凹凸部分も磨きやすい

**磨き方** 回転させずに、ふつうの歯ブラシと同じように、縦磨き・横磨きで磨いてください。1本ずつ磨くイメージです。

### 前歯



ふつうの歯ブラシと同じように、  
横磨きか、縦磨きで磨きます。  
歯並びが良くない方には縦磨きを  
おすすめします。

### 前歯の裏側



毛先がぴったり当たりにくいのが  
前歯の裏側です。円筒ヘッドで大量  
の極細毛があるため、汚れている  
部分にぴったりフィットします。

### 犬歯



凹凸が多い犬歯の部分は、縦磨き  
で磨きます。裏側の傾斜部分も、  
一気に磨き上げることが可能です。

### 前歯裏側の上下同時磨き



円筒ヘッドなので、上下同時に  
磨くことも可能です。回転させずに  
横磨きで磨いてください。

### 奥歯



内側側面は、ハンドルを斜めに  
立てて、斜め方向に小刻みに  
動かして磨きます。

### 奥歯の上下同時磨き



軽く噛むようにしてトップを  
磨きます。奥は開き気味に、手前  
は閉じ気味といったように、あご  
の角度を徐々に変えていくのが  
ポイントです。

### 歯茎ブラッシング



肌をパティングするのと同様に、  
歯茎も軽くブラッシング  
することをおすすめします。

### 舌クリーニング



軽く舌を突き出し、ブラシを舌に  
のせ、力を入れ過ぎないように  
して手前に引き出します。

## 製品情報

品番	規格	包装	1梱入数	JANコード
3118067	ブラシ直径15mm ホワイト	30本/箱	16箱	4 958286 720388

※ 詳細は各営業にお問い合わせください。

お口キレイぐるっとブラシの  
ご使用方法に関する  
動画はこちら



ハクゾウメディカル株式会社 <https://www.hakuzo.co.jp/>  
〒540-0025 大阪市中央区徳井町2丁目4番9号 TEL.06-6942-0451 FAX.06-6945-0539

本社営業課 TEL:06-6809-4318	三重営業所 TEL:059-350-3844	札幌駐在所 TEL:011-788-8009
東京支店 TEL:03-3522-6720	京都営業所 TEL:075-603-4826	北陸駐在所 TEL:076-225-8013
北大阪支店 TEL:072-653-4045	大阪中央営業所 TEL:06-6943-6118	高松駐在所 TEL:087-813-7416
南大阪支店 TEL:0721-20-2900	阪神営業所 TEL:078-262-1634	愛媛駐在所 TEL:0898-52-7656
仙台営業所 TEL:022-393-7434	神戸営業所 TEL:078-940-8975	鹿児島駐在所 TEL:099-296-1925
関東営業所 TEL:03-5809-4780	広島営業所 TEL:082-849-4188	沖縄駐在所 TEL:098-941-5320
西東京営業所 TEL:042-646-0451	福岡営業所 TEL:092-481-5921	
名古屋営業所 TEL:052-769-6021	熊本営業所 TEL:096-345-2253	