

移易担架

いい たんか



簡単に滑らせて移動できる救急担架

Step 1



本製品を床に置き(ブルーが人側、濃青色が床側になるように置いてください。)、この上に患者様を枕と共にシートごとベッドから移動させます。

Step 2




前側と後側の穴2箇所にもットシーツを内から外へ出し、強く結んでいきます。(写真は前側)

Step 3



両端を介護者がそれぞれ保持して、滑らすように廊下や階段を移動させていきます。

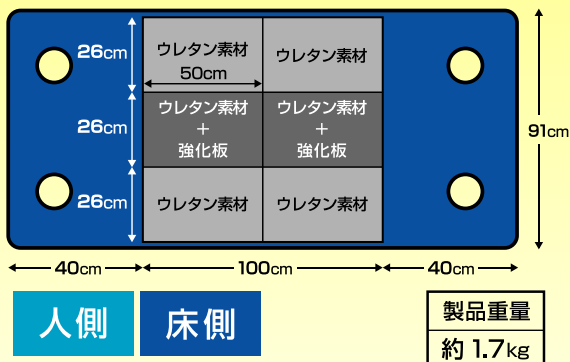

両端を介護者が滑らすように廊下や階段を移動させていきます。滑らして移動できますので、上に持ち上げる力が不要で、階段の段差を困難無く移動させられます。
 ※画像はイメージです

製品特長

●移動時に背中などが痛くならないようにウレタン素材を施しています。

“いいたんか”はこんなところがイイ!!

安全

すべらせて移動することで、少人数での移動ができます。階段の登り降り方向とも、段差を困難無く移動させることができます。

安心

中心部にウレタンマットを入れていますので、保温性・クッション性に優れています。また、患者様を枕ごと乗せることで頭元が固定されます。

清潔

ベットシートが直接床や階段に接しないので、破れることなく清潔です。

省スペース

折りたたむことができますので、省スペースで保管することができます。

災害時に

省スペースなので、入院用ベットの近くに保管でき、災害などの緊急時にもすぐに取り出すことができます。また、避難後も、そのまま簡易ベット代わりにご使用頂けます。



品番	規格	包装	製品重量	1梱入数	ケース重量	JANコード
3396033	幅91cm×長さ180cm (展開時)	1枚/袋	約1.7kg	10袋/ケース	約19kg	4 958286 709659

※詳細は各営業にお問い合わせください。



ハクゾウメディカル株式会社

〒540-0025 大阪市中央区徳井町2丁目4番9号
 TEL. 06-6942-0451 <http://www.hakuzo.co.jp/>

本社営業部 ☎06-6809-4318 大阪中央営業所 ☎06-6943-6118
 東京支店 ☎03-3522-6720 阪神営業所 ☎078-262-1634
 北大阪支店 ☎072-653-4045 広島営業所 ☎082-849-4188
 南大阪支店 ☎0721-20-2900 四国営業所 ☎0875-52-6900
 神戸支店 ☎078-976-8901 北九州営業所 ☎093-617-3911
 仙台営業所 ☎022-399-7091 福岡営業所 ☎092-481-5921
 西東京営業所 ☎042-646-0451 熊本営業所 ☎096-345-2253
 三河営業所 ☎0564-54-5447 沖縄駐在所 ☎098-941-5320
 三重営業所 ☎059-350-3844 札幌駐在所 ☎011-788-8009
 京都営業所 ☎075-603-4826