



Design Your Voice

Hakuzo

NeofluxS

一般医療機器

ネオフラックスS

ハイソックスタイプ 届出番号:13B2X00187000003

ストッキングタイプ 届出番号:13B2X00187000004

脚部の血行促進を
目的とした
医療用弾性ストッキング



COMPRESSION STOCKINGS

ハクゾウメディカル株式会社

『ネオフラックスS』は、高品質と使いやすさを兼ね備えた弾性ストッキングです。

- サイズが豊富で、着用される方の脚に合った適切なサイズを選択することができます(膝下までの『ハイソックスタイプ』と『ストッキングタイプ』の2種類を用意しています)。
- 足首部分は約25hPa(19mmHg)の圧力があり、膝下・大腿部に向かって段階的に弱くなっています。これにより、圧迫の弱い大腿の方へ血液が押し上げられやすくなり、結果として静脈血の還流を促すこととなります。
- ラテックスフリー(天然ゴム不使用)の製品です。


9.4hpa
(7.0mmHg)

20.0hpa
(15.0mmHg)

24.7hpa
(18.5mmHg)

単位=hPa

※サイズ中心の方が装着したときの平均圧迫圧

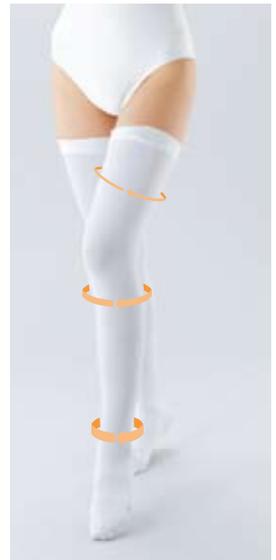

製品特長

1

観察穴



ショート	ピンク
レギュラー	白

足底部分に血行状態を観察するための穴を設けています。穴から容易に足を出すことができますので、製品を脱がずに足の状態を確認することができます。穴の周りには色分けしていますので長さ(ショート・レギュラー)を判別できます。

2

上端部



SS	水色
S	黄色
M	白
L	青
LL	緑

上端部の内側はサイズ(SS~LL)を判別し易いように色分けしています。(ハイソックスタイプ)
※写真は上端部を折り曲げた状態です。

3

目印




- 適切な位置が分かりやすいように、製品の踵部にブルーの目印を設けています。足の踵にくるように位置を合わせて履きます。
- つま先部分は不要な圧迫力を避ける為、薄手の編み方にしています。

サイズの選択・選択時の注意点

1

ハイソックス
タイプ

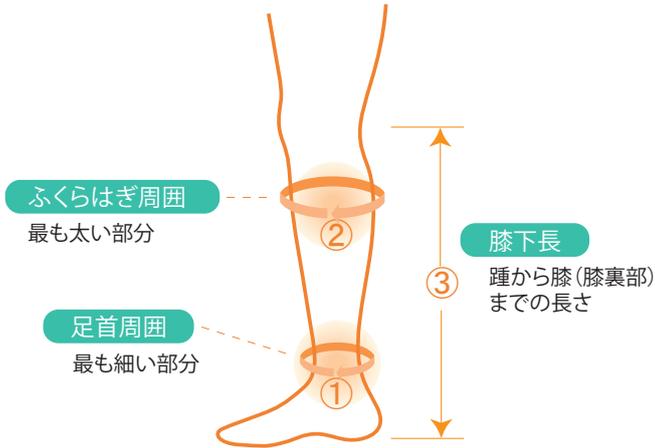

①～③を計測し、「①足首周囲」と「③膝下長」を
基準にサイズを選んでください。

⚠ サイズ選択時の注意点

「①足首周囲」と「②ふくらはぎ周囲」の
適用サイズが一致しない場合


- 差が1サイズの場合: 「①足首周囲」の
適用サイズで選んでください。
- 差が2サイズ以上の場合: 適用できま
せん。
- 「①足首周囲」が27.5cm以上、「②ふ
くらはぎ周囲」が47.0cm以上、「③膝
下長」が45.5cm以上の場合には適用
できません。



サイズ	適用範囲			色分け	
	①足首周囲	②ふくらはぎ周囲	③膝下長	膝元	足裏
レギュラーSS	15.0～17.5cm	23.0～30.0cm	31.0～36.5cm	水色	白
レギュラーS	17.5～20.0cm	25.0～32.0cm	36.0～40.5cm	黄色	
レギュラーM	20.0～22.5cm	32.0～37.0cm	38.0～43.0cm	白	
レギュラーL	22.5～25.0cm	37.0～42.0cm	41.0～45.5cm	青	
レギュラーLL	25.0～27.5cm	42.0～47.0cm	41.0～45.5cm	緑	

2

ストッキング
タイプ

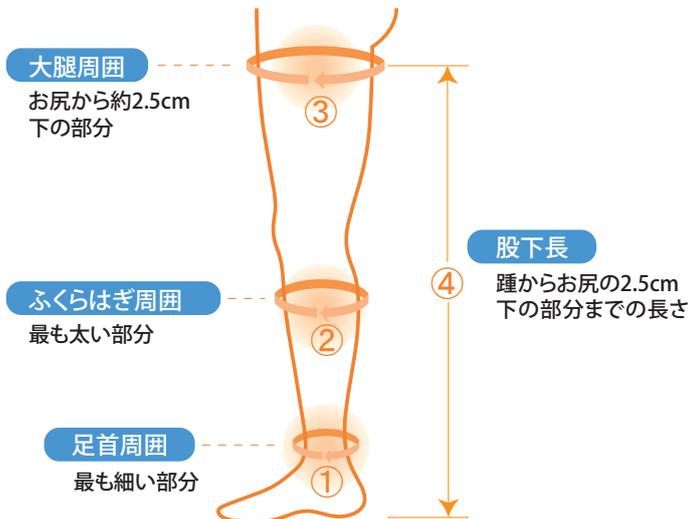

①～④を計測し、「①足首周囲」と「④股下長」を
基準にサイズを選んでください。

⚠ サイズ選択時の注意点

「①足首周囲」と「②ふくらはぎ周囲」の
適用サイズが一致しない場合

- 差が1サイズの場合: 「①足首周囲」の
適用サイズで選んでください。
- 差が2サイズ以上の場合: 適用できま
せん。
- 「①足首周囲」が25.0cm以上、「②ふくら
はぎ周囲」が42.0cm以上、「③大腿周囲」
が73.5cm 「④股下長」が78.5cm以上の
場合には適用できません。



サイズ	適用範囲				色分け	
	①足首周囲	②ふくらはぎ周囲	③大腿周囲	④股下長	大腿	足裏
ショートS	17.5～20.0cm	25.0～32.0cm	40.5～55.5cm	66.0～73.5cm	黄色	ピンク
ショートM	20.0～22.5cm	32.0～37.0cm	48.5～63.5cm		白	
ショートL	22.5～25.0cm	37.0～42.0cm	58.5～73.5cm		青	
レギュラーS	17.5～20.0cm	25.0～32.0cm	40.5～55.5cm	73.5～78.5cm	黄色	白
レギュラーM	20.0～22.5cm	32.0～37.0cm	48.5～63.5cm		白	
レギュラーL	22.5～25.0cm	37.0～42.0cm	58.5～73.5cm		青	

使用上の注意

■ 次の患者には慎重に適用すること

1. 術後等患者の意識レベルが低い場合及び、患者との意思疎通が困難な場合には患者の状態をよく観察して使用してください。
2. ギプス、外傷等による長時間の下肢可動不能状態の患者は、潜在的に深部静脈血栓症を発症している可能性があるため注意して使用してください。
3. 装着部に傷、痛み、しびれ、湿疹、かぶれ等の異常がある場合や本品が開放創に直接接触する場合には使用しないでください。(症状が悪化するおそれがあるため)
4. 本品の使用により、脚に疼痛、しびれ、皮膚や爪の変色、皮膚温の低下、かゆみ、発疹、かぶれ等の異常及びその他、装着前に感じなかった不快感、違和感が生じた場合には、直ちに使用を中止してください。(動脈および静脈の血行障害または神経障害等を発症するおそれがあるため)

■ 貯蔵・保管方法及び使用期間等

- 直射日光及び高温多湿を避けて、室温下で保管してください。

■ 保守・点検に係わる事項

- 洗濯機で洗濯する場合には必ず洗濯ネットを使用してください。漂白剤、柔軟剤は使用しないでください。
- 洗濯後は、直射日光・高温多湿を避け、室温下で保管してください。

■ 取り扱い上の注意

- オートクレーブ滅菌は行わないでください。滅菌の必要がある場合にはEOG滅菌を行ってください。

[素材]ナイロン、スパンデックス

詳しくは添付文書をご覧ください。

[製造販売業者]: 日本シグマックス株式会社

住 所 : 〒163-6033 東京都新宿区西新宿6-8-1

ハイソックスタイプ

品番	種類	包装	JANコード
2700120	レギュラーSS	1組/袋×10組/箱	 4 958286 410326
2700121	レギュラーS	1組/袋×10組/箱	 4 958286 410272
2700122	レギュラーM	1組/袋×10組/箱	 4 958286 410289
2700123	レギュラーL	1組/袋×10組/箱	 4 958286 410296
2700124	レギュラーLL	1組/袋×10組/箱	 4 958286 410302

※詳細は各営業にお問い合わせください。

ストッキングタイプ

品番	種類	包装	JANコード
2700101	ショートS	1組/袋×10組/箱	 4 958286 410203
2700102	ショートM	1組/袋×10組/箱	 4 958286 410210
2700103	ショートL	1組/袋×10組/箱	 4 958286 410227
2700111	レギュラーS	1組/袋×10組/箱	 4 958286 410234
2700112	レギュラーM	1組/袋×10組/箱	 4 958286 410241
2700113	レギュラーL	1組/袋×10組/箱	 4 958286 410258



ハクゾウメディカル株式会社

〒540-0025 大阪市中央区徳井町2丁目4番9号
TEL. 06-6942-0451 <http://www.hakuzo.co.jp/>

本社営業課 ☎06-6809-4318 阪神営業所 ☎078-262-1634
東京支店 ☎03-3522-6720 広島営業所 ☎082-849-4188
北大阪支店 ☎072-653-4045 四国営業所 ☎0875-52-6900
南大阪支店 ☎0721-20-2900 北九州営業所 ☎093-617-3911
神戸支店 ☎078-976-8901 福岡営業所 ☎092-481-5921
仙台営業所 ☎022-399-7091 熊本営業所 ☎096-345-2253
西東京営業所 ☎042-646-0451 札幌駐在所 ☎011-788-8009
三河営業所 ☎0564-54-5447 盛岡駐在所 ☎019-613-2176
三重営業所 ☎059-350-3844 北陸駐在所 ☎076-225-8013
京都営業所 ☎075-603-4826 山陰駐在所 ☎0859-30-2193
大阪中央営業所 ☎06-6943-6118 沖縄駐在所 ☎098-941-5320