

# ハクゾウおうと物処理セット

嘔吐物の処理に必要な防護具や環境清掃製品などをセットにした製品です。



7点セット入り



簡単操作! 液パックをひねってつぶすだけ

ひねって含浸  
ハクゾウジアパック 1000  
入り



次亜塩素酸ナトリウム 45mL  
0.1w/v% (1000ppm)

不織布 5枚  
水溶性パルプ(トイレに流せるタイプ)

## 製品特長

### 感染対策

◎嘔吐物の処理に必要な防護具の着用や嘔吐物付着面の清掃の徹底が図れます。

### 省力化

◎防護具や環境清掃製品を準備する手間が省けます。

### ひねって含浸ハクゾウジアパック 1000 入り

◎ジアパック（次亜塩素酸ナトリウムの液パックと水溶性パルプを組み合わせた製品）を一緒にセットしています。

## 主な使用場面

- ◎医療機関（各病棟の備蓄用。外来に。）
- ◎高齢者施設（老人保健施設など。）
- ◎消防署、市役所などの公共機関。学校などの教育機関。鉄道、バス、タクシーなどの交通機関。

## 【セット内容】

内容	規格	入数
プラスチックガウン	親指フック	1枚
サージカルマスク	ブルー	1枚
プラスチックグローブ	M	2双
ペーパータオル	2枚重ね	10組
ひねって含浸ハクゾウジアパック1000	水溶性パルプ 200×300mm	1袋
イエロー袋	Lサイズ	1枚
使用手順書	A5サイズ	1枚
トレー	縦178×横256×高さ40mm	1個

※上記以外の組み合わせについて、別途ご相談を承ります。

品番	規格	包装	製品サイズ (mm)		1梱入数	ケースサイズ (mm)		JANコード
			製品重量 (g)	高さ		ケース重量 (kg)	幅	
2610343	ICPACK⑤-F	1個	256×178×40	190	18個/箱	290×350×410	4.0	4 958286 055572

※詳細は各営業担当にお申し出ください。



## ハクゾウメディカル株式会社

〒540-0025 大阪市中央区徳井町2丁目4番9号  
TEL. 06-6942-0451 <https://www.hakuzo.co.jp/>


本社営業課 ☎06-6809-4318 阪神営業所 ☎078-262-1634  
 東京支店 ☎03-3522-6720 神戸営業所 ☎078-940-8975  
 北大阪支店 ☎072-653-4045 広島営業所 ☎082-849-4188  
 南大阪支店 ☎0721-20-2900 福岡営業所 ☎092-481-5921  
 仙台営業所 ☎022-393-7434 熊本営業所 ☎096-345-2253  
 関東営業所 ☎03-5809-4780 札幌駐在所 ☎011-788-8009  
 西東京営業所 ☎042-646-0451 北陸駐在所 ☎076-225-8013  
 名古屋支店 ☎052-769-6021 鹿児島駐在所 ☎099-296-1925  
 三重営業所 ☎059-350-3844 沖縄駐在所 ☎098-941-5320  
 京都営業所 ☎075-603-4826  
 大阪中央営業所 ☎06-6943-6118



# ハクゾウおうと物処理セット 使用手順

おうと物処理セットの準備

## 1 おうと物処理セットの準備



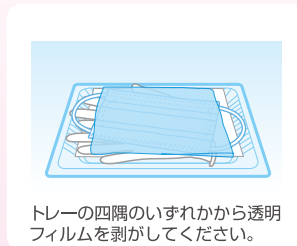


## 2 個人防護具の着用



おうと物処理手順

## 3 おうと物の処理

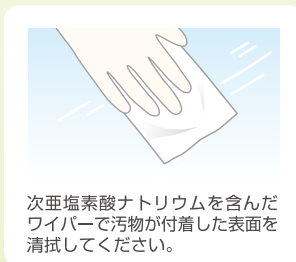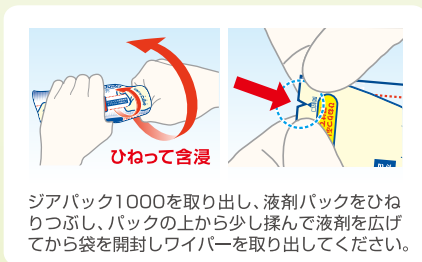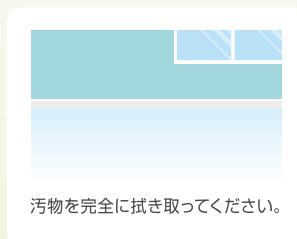

## 4 処理後

