

開封後すぐに使える

環境除菌用 ペルシールドクリーン

ペルオキソー硫酸水素カリウム含浸クロス

100
枚入

成分：水、ペルオキソー硫酸水素カリウム、界面活性剤
サイズ 140 mm × 200 mm
使用期限 2年

●長期間安定した濃度を保持することが出来ます。

新発売

除菌 & 洗浄



含浸済

調製済

(薬液の調製不要)

長期間
濃度が安定

よく触れる環境表面の洗浄・除菌にご使用ください。

- テーブル・ドアノブ・ベッドまわりなど
- 汚染物の付着した箇所

ペルシールドクリーンの主成分であるペルオキソー硫酸水素カリウムは
下記の感染予防に関するガイドラインに記載されています。

「*Clostridioides difficile* 感染対策ガイド（一般社団法人日本環境感染学会）」

「透析施設における標準的な透析操作と感染予防に関するガイドライン六訂版（日本透析医会）」

「手術医療の実践ガイドライン（手術医療の実践ガイドライン改訂第三版準備委員会〔編〕）」

製品特長

含浸済

- ・フタを**開けて取り出すだけで使用可能**
- ・薬剤の濃度調製の手間や間違いが**無く安心かつ効率的。**
- ・災害時の避難所で、「もしも」の時に役立ちます。

長期保存可能

- ・**長期間安定した濃度を保持**
- ・未開封の状態**で製造日から2年間の保存が可能。** → **廃棄リスクの低減に繋がる**

清潔

- ・容器の**使いまわしがなく、清潔に使用することが出来る。**

- 不織布を二つ折りにして、手のひらサイズでご使用いただけます。
- 除菌や汚染物の除去に効果を発揮します。（全ての菌を除菌または除去するわけではありません。）
- 塩素臭がありません。
- 洗浄効果を有します。

注意事項

- 不織布が乾燥していると感じることがあるかもしれませんが、不織布繊維の間に液剤をしっかりと保持しています。
- 機械類などに使用する際は、その取扱説明書などで清掃方法をご確認の上、ご使用ください。
- 合成皮革を含む全ての革製品には使用しないでください。
- 環境表面の材質により変色することがございます。
- 水洗トイレには流さないでください。
- 開封後はしっかりと取り出し口のフタを閉め、なるべく早めにご使用ください。
- 子供の手に触れないようにしてください。
- 使用するときはゴム製手袋等を着用し、液剤に触れないようにしてください。
- 体に異常が現れた時は、使用を中止してください。
- 人体の清拭には使用しないでください。
- 高温・多湿の場所及び直射日光を避け、清潔な場所に保管してください。
- 液が目に入ったらすぐに水で洗い、異常があれば眼科を受診してください。
- 衣類等につくと脱色するので注意してください。
- 金属を腐食させる場合があるので注意してください。
- 繊維素材及び着色素材については、脱色・変色の恐れがあるので注意してください。

酸性タイプ ご注意	まぜるな危険
	<ul style="list-style-type: none"> ● 塩素系の製品と一緒に使う(まぜると)有害な塩素ガスが出て危険。 ● 必ず手袋を使用する。 ● およさまの手にふれないようにする。 ● 液が目に入ったらすぐに水で洗う。

品番	規格	包装	サイズ/包装	1梱入数	サイズ/ケース	JANコード
2600280	140mm×200mm	100枚入	W300×D80×H105mm	18個	W480×D220×H240mm	 4 958286 081823
			約685g		約13kg	



ハクゾウメディカル株式会社

〒540-0025 大阪市中央区徳井町2丁目4番9号
TEL. 06-6942-0451 <https://www.hakuzo.co.jp/>

本社営業課 ☎06-6809-4318 阪神営業所 ☎078-262-1634
 東京支店 ☎03-3522-6720 神戸営業所 ☎078-940-8975
 北大阪支店 ☎072-653-4045 広島営業所 ☎082-849-4188
 南大阪支店 ☎0721-20-2900 福岡営業所 ☎092-481-5921
 仙台営業所 ☎022-393-7434 熊本営業所 ☎096-345-2253
 関東営業所 ☎03-5809-4780 札幌駐在所 ☎011-788-8009
 西東京営業所 ☎042-646-0451 北陸駐在所 ☎076-225-8013
 名古屋支店 ☎052-769-6021 鹿児島駐在所 ☎099-296-1925
 三重営業所 ☎059-350-3844 沖縄駐在所 ☎098-941-5320
 京都営業所 ☎075-603-4826
 大阪中央営業所 ☎06-6943-6118