

添付文書	品番	品名	規格	包装	1 梱入数	JANコード
E	2600022	エレファワイパー E	8cm×8cm 4 折	100 包/箱	20 箱	4 958286 331058
E(W)	2600053	エレファワイパー E(W)	4cm×4cm 2 枚	200 包/箱	20 箱	4 958286 330983
	2600063	エレファワイパー E(W)	4cm×4cm 2 枚	60 包/箱	10 箱 × 8 中箱	4 958286 331119
E(4)	2600054	エレファワイパー E(4)	4cm×4cm 4 枚	100 包/箱	20 箱	4 958286 330990
イン(W)	2600055	エレファワイパーイン(W)	4cm×4cm 2 枚	200 包/箱	20 箱	4 958286 331003
	2600065	エレファワイパーイン(W)	4cm×4cm 2 枚	60 包/箱	10 箱 × 8 中箱	4 958286 331126
イン(4)	2600056	エレファワイパーイン(4)	4cm×4cm 4 枚	100 包/箱	20 箱	4 958286 331010
EI	2600049	エレファワイパー EI	4cm×8cm 2 折	200 包/箱	24 箱	4 958286 709956
	2600031	エレファワイパー EI(W)	4cm×4cm 2 枚	200 包/箱	24 箱	4 958286 330570
EI(W)	2600030	エレファワイパー EI(W)	4cm×4cm 2 枚	60 包/箱	10 箱 × 8 中箱	4 958286 706573

ハクゾウAL綿 oneE 消毒用エタノール綿 指定医薬部外品

添付文書	品番	品名	規格	包装	1 梱入数	JANコード
	2600071	ハクゾウ AL 綿 oneE	4cm×4cm 2 枚	60 包/箱	10 箱 × 8 中箱	4 958286 045498

ハクゾウアルコールパッド 消毒用エタノール布 指定医薬部外品

添付文書	品番	品名	規格	包装	1 梱入数	JANコード
	2600014	ハクゾウアルコールパッド	4cm×4cm 2 枚	200 包/箱	20 箱	4 958286 081182

ハクゾウメディカル株式会社
 〒540-0025 大阪市中央区徳本町2丁目4番9号
 TEL. 06-6942-0451 <https://www.hakuzo.co.jp/>

本社営業課 ☎06-6809-4318 阪神営業所 ☎078-262-1634
 東京支店 ☎03-3522-6720 神戸営業所 ☎078-940-8975
 北大阪支店 ☎072-653-4045 広島営業所 ☎082-849-4188
 南大阪支店 ☎0721-20-2900 福岡営業所 ☎092-481-5921
 仙台営業所 ☎022-393-7434 熊本営業所 ☎096-345-2253
 関東営業所 ☎03-5809-4780 札幌駐在所 ☎011-788-8009
 西東京営業所 ☎042-646-0451 北陸駐在所 ☎076-225-8013
 名古屋支店 ☎052-769-6021 鹿児島駐在所 ☎099-296-1925
 三重営業所 ☎059-350-3844 沖縄駐在所 ☎098-941-5320
 京都営業所 ☎075-603-4826
 大阪中央営業所 ☎06-6943-6118

個包装の衛生的な消毒用アルコール綿

外皮用殺菌消毒剤

エレファワイパーシリーズ

Elepha Wiper Series

脱脂綿に薬液を含浸させた、単包装の消毒用アルコール綿

業務の省力化
 感染防止対策に

主な使用用途



ハクゾウメディカル株式会社

エレファワイパーシリーズ

ELEPHA WIPER SERIES

1 業務の効率化、感染防止

アルコール綿調製・管理に掛かる労力・経費・時間が省け、感染防止対策にも好適です。

2 衛生的、持ち運びに便利

個包装なので、開封するまで清潔に保たれ、薬液の揮発による汚染の心配がありません。また、持ち運びに便利で在宅治療にも適します。

3 経済的

1回分の適切な薬液量を含浸している為、無駄がありません。

4 豊富な種類

消毒用エタノールやイソプロパノールタイプ、1包あたりの枚数、包装数、サイズなど豊富な種類や規格がございますので、使用用途に応じた使い方をとお選び頂けます。

どういつ時に使うの？

- 血糖値のチェック(穿刺前後の消毒)・インスリン注射前後の消毒
- 三方活栓の薬液注入前後のポートの消毒・輸液ボトルの消毒(輸液ラインの交換時)・アンブルカットの消毒+輸液ボトルの消毒(薬液注入時)



器具の消毒

注射部位の消毒



エレファワイパーシリーズ 1枚入 1枚入りの単包装アルコール消毒綿

エレファワイパーE

第3類医薬品 承認番号21700APZ00229000

消毒用エタノール綿

80vol% エタノールを含浸させた消毒用エタノール綿です。

- 【成分及び分量】 1包中
- 有効成分：エタノール (76.9～81.4vol%) 3.5mL
 - 基材：医療脱脂綿 (8cm×8cm 4折) 0.7g
- 【包装】
- 1枚/包×100包



エレファワイパーEI

第3類医薬品 承認番号21600APZ00472000

エタノール+イソプロパノール

80vol% エタノール溶液(イソプロパノール添加)を含浸させた消毒用アルコール綿です。

- 【成分及び分量】 1包中
- アルコール溶液 1.75mL
 - 有効成分：エタノール (76.9～81.4vol%)
 - 添加物：イソプロパノール (3.7vol%)
 - 基材：医療脱脂綿 (4cm×8cm 2折) 0.35g
- 【包装】
- 1枚/包×200包



エレファワイパーWシリーズ 2枚入 複数箇所の消毒に好適な2枚入り単包装アルコール消毒綿

エレファワイパーE(W)

第3類医薬品 承認番号21700APZ00229000

消毒用エタノール綿

80vol% エタノールを含浸させた消毒用エタノール綿です。

- 【成分及び分量】 1包中
- 有効成分：エタノール (76.9～81.4vol%) 1.75mL
 - 基材：医療脱脂綿 (4cm×4cm 2枚) 0.35g
- 【包装】
- 2枚/包×60包
 - 2枚/包×200包



※60包と200包のフィルムデザインは異なります。

エレファワイパーイソ(W)

第3類医薬品 承認番号21600APZ00471000

イソプロパノール綿

70vol% イソプロパノール溶液を含浸させた消毒用アルコール綿です。

- 【成分及び分量】 1包中
- 有効成分：イソプロパノール (70vol%) 1.75mL
 - 基材：医療脱脂綿 (4cm×4cm 2枚) 0.35g
- 【包装】
- 2枚/包×60包
 - 2枚/包×200包



エレファワイパーEI(W)

第3類医薬品 承認番号21600APZ00472000

エタノール+イソプロパノール

80vol% エタノール溶液(イソプロパノール添加)を含浸させた消毒用アルコール綿です。

- 【成分及び分量】 1包中
- アルコール溶液 1.6mL
 - 有効成分：エタノール (76.9～81.4vol%)
 - 添加物：イソプロパノール (3.7vol%)
 - 基材：医療脱脂綿 (4cm×4cm 2枚) 0.32g
- 【包装】
- 2枚/包×60包
 - 2枚/包×200包



エレファワイパー4シリーズ 4枚入 複数箇所の消毒に好適な4枚入り単包装アルコール消毒綿

エレファワイパーE(4)

第3類医薬品 承認番号21700APZ00229000

消毒用エタノール綿

80vol% エタノールを含浸させた消毒用エタノール綿です。

- 【成分及び分量】 1包中
- 有効成分：エタノール (76.9～81.4vol%) 3.5mL
 - 基材：医療脱脂綿 (4cm×4cm 4枚) 0.7g
- 【包装】
- 4枚/包×100包



エレファワイパーイソ(4)

第3類医薬品 承認番号21600APZ00471000

イソプロパノール綿

70vol% イソプロパノール溶液を含浸させた消毒用アルコール綿です。

- 【成分及び分量】 1包中
- 有効成分：イソプロパノール (70vol%) 3.5mL
 - 基材：医療脱脂綿 (4cm×4cm 4枚) 0.7g
- 【包装】
- 4枚/包×100包



ハクゾウAL綿oneE 2枚入 複数箇所の消毒に好適な2枚入りの医薬部外品の単包装アルコール消毒綿

ハクゾウAL綿oneE

指定医薬部外品 承認番号21600DZZ01755000

消毒用エタノール綿

80vol% エタノールを含浸させた医薬部外品の消毒用エタノール綿です。

- 【成分及び分量】 1包中
- 有効成分：エタノール (76.9～81.4vol%) 1.75mL
 - 基材：医療脱脂綿 (4cm×4cm 2枚) 0.35g
- 【包装】
- 2枚/包×60包
- 【効能又は効果】 手指・皮膚の洗浄・消毒



ハクゾウアルコールパッド 2枚入 複数箇所の消毒に好適な2枚入りの医薬部外品の単包装アルコール消毒布

ハクゾウアルコールパッド

指定医薬部外品 承認番号30400DZX01433000

消毒用エタノール布

80vol% エタノールを含浸させた医薬部外品の消毒用エタノール布です。

- 【成分及び分量】 1包中
- 有効成分：エタノール (76.9～81.4vol%) 1.6mL
 - 基材：不織布 (4cm×4cm 2枚) 0.32g
- 【包装】
- 2枚/包×200包
- 【効能又は効果】 手指・皮膚の洗浄・消毒

