

ハクゾウフェイスガード

眼鏡のようなフレームでフィットしやすく、
眼鏡・N95マスクなどの上からも装着できます。



防御範囲が
広いシールド

眼鏡の上
からもフィット

上部・サイド
からの飛沫
も防ぐ

曇りにくい
シールド
採用

アイシールド



日本製

フェイスシールド



Design Your Voice

HAKUZO HAKUZO

レギュラー

環境にやさしい再生PETシートを使用しています。
特殊加工により曇りにくく、日常的な短時間の
使用に適しています。

PET 0.2mm

曇りにくい
シールド
採用

フェイスシールド




取り付け方法の確認→



アイシールド



取り付け方法の確認→

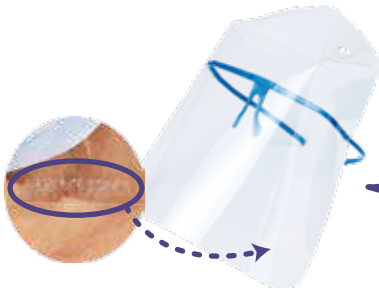

シールドに表裏があります。
「HAKUZO」の文字が外側から
読めるように装着してください。



取り外し方法



シールドの内側から穴近くを押し、シールドを外します。



ゴミ箱の上で、外側に触れず内側を押し込むことで、汚染部分に触れずに取り外しできます。



シールドの内側から穴近くを押し、シールドを外します。



ゴミ箱の上で、外側に触れず内側を押し込むことで、汚染部分に触れずに取り外しできます。

シールドを折り目に沿って
折り曲げてください。



シールドの取り付けは
この角度を推奨
(反射が軽減)

⚠ シールドは使い捨てです。アルコール等で清拭すると透明度や防曇効果が劣化する可能性があります。

フレームのみ ハクゾウファインガード 30

本入



眼鏡のようなフレームでフィットしやすく、
眼鏡の上からも装着できます。

ブルー10本 / イエロー10本 / ピンク10本 (計30本入)

ハクゾウファインガード アイシールド・フェイスシールド



品番	規格	包装	1梱入数	JANコード
3002801	フレームのみ (ブルー/イエロー/ピンク)	30本入 (各色10本)	12箱	4 958286 717890
3002802	フェイスシールドのみ レギュラータイプ	50枚入	15箱	4 958286 717906
3002804	アイシールドのみ レギュラータイプ	100枚入	15箱	4 958286 718316

※詳細は各営業にお問い合わせください。



ハクゾウメディカル株式会社

〒540-0025 大阪市中央区徳井町2丁目4番9号
TEL. 06-6942-0451 <https://www.hakuzo.co.jp/>

本社営業課 ☎06-6809-4318 阪神営業所 ☎078-262-1634
 東京支店 ☎03-3522-6720 神戸営業所 ☎078-940-8975
 北大阪支店 ☎072-653-4045 広島営業所 ☎082-849-4188
 南大阪支店 ☎0721-20-2900 福岡営業所 ☎092-481-5921
 仙台営業所 ☎022-393-7434 熊本営業所 ☎096-345-2253
 関東営業所 ☎03-5809-4780 札幌駐在所 ☎011-788-8009
 西東京営業所 ☎042-646-0451 北陸駐在所 ☎076-225-8013
 名古屋支店 ☎052-769-6021 鹿児島駐在所 ☎099-296-1925
 三重営業所 ☎059-350-3844 沖縄駐在所 ☎098-941-5320
 京都営業所 ☎075-603-4826
 大阪中央営業所 ☎06-6943-6118

