



Design Your Voice

Hakuzo

HAKUZO パウダーフリー

PLASTIC GLOVES EL PLUS

ハクゾウプラスチックグローブ

衛生的なパウダーフリー加工のプラスチックグローブ

大容量タイプ

150枚入



Good Points

- ▶ パウダーフリー加工を施し、
パウダーの飛散による
汚染リスクがなく衛生的です。
- ▶ パウダーによる手荒れ、
手指・衣服への付着等の心配がありません。
- ▶ 弊社専用ホルダーに入れることができます。



ハクゾウメディカル株式会社

ハクゾウプラスチックグローブ 着脱方法

グローブの着け方・外し方は感染予防の点からも非常に重要です。着用時はグローブの表面を汚染ないように、外す際は、汚染したグローブの表面に触れないようにする配慮が必要です。

装着手順



1 利き手で箱からつまんで取り出します。

2 グローブを利き手からもう一方の手に持ち替えます。

3 持ち替えた後、親指の位置を確認します。


4 グローブの外側になるべく何処にも触れないように利き手に装着します。

5 装着した手で、箱からグローブを取り出します。

6 もう一方の手に持ち替え、親指の位置を確認し、再び装着済の利き手に持ち替えます。

7 グローブをした手が何処にも触れないように装着します。

脱着手順

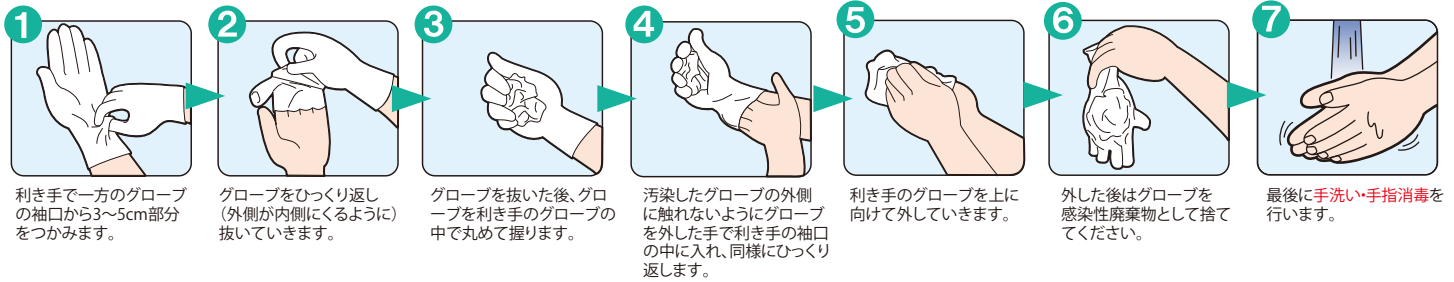

1 利き手で一方のグローブの袖口から3~5cm部分をつかみます。

2 グローブをひっくり返し(外側が内側になるように)抜いていきます。

3 グローブを抜いた後、グローブを利き手のグローブの中で丸めて握ります。

4 汚染したグローブの外側に触れないようにグローブを外した手で利き手の袖口の中に入れ、同様にひっくり返します。

5 利き手のグローブを上に向けて外していきます。

6 外した後はグローブを感染性廃棄物として捨ててください。

7 最後に手洗い・手指消毒を行います。

ラック楽ホルダーシリーズ

グローブ、エプロン、マスク、キャップ等のPPE製品を設置するホルダーもご用意しています(別売)。

材質

ポリ塩化ビニル

使用上の注意

- 体質によっては、かゆみ、かぶれ、発疹等を起こすことがあります。異常を感じたら使用をおやめください。
- 熱いものには触れないでください(火傷する恐れがあります)。
- 高濃度の薬品や溶剤(ガソリン・ベンジン等)にはご使用は避けてください。
- 爪先、刃物や尖ったもの等で傷つけないようにご注意ください。
- 高温、湿度の高い場所及び直射日光を避け、清潔な場所に保管してください。



壁掛け用ホルダー



プラスチックグローブ



シールド付きフェイスマスク

品番	サイズ	包装	サイズ/重量	1箱入数	サイズ/重量	JANコード
3024333	S	150枚/箱	W245×D125×H75mm	16箱	W520×D320×H265mm	4 958286 719696
			595g		10.2kg	
3024334	M	150枚/箱	W245×D125×H75mm	16箱	W520×D320×H265mm	4 958286 719702
			670g		11.3kg	
3024335	L	150枚/箱	W245×D125×H75mm	16箱	W520×D320×H265mm	4 958286 719719
			745g		12.5kg	

※詳細は各営業にお問い合わせください。



ハクゾウメディカル株式会社

〒540-0025 大阪市中央区徳井町2丁目4番9号
TEL. 06-6942-0451 <https://www.hakuzo.co.jp/>

本社営業課 ☎06-6809-4318 阪神営業所 ☎078-262-1634
 東京支店 ☎03-3522-6720 神戸営業所 ☎078-940-8975
 北大阪支店 ☎072-653-4045 広島営業所 ☎082-849-4188
 南大阪支店 ☎0721-20-2900 福岡営業所 ☎092-481-5921
 仙台営業所 ☎022-393-7434 熊本営業所 ☎096-345-2253
 関東営業所 ☎03-5809-4780 札幌駐在所 ☎011-788-8009
 西東京営業所 ☎042-646-0451 北陸駐在所 ☎076-225-8013
 名古屋支店 ☎052-769-6021 鹿児島駐在所 ☎099-296-1925
 三重営業所 ☎059-350-3844 沖縄駐在所 ☎098-941-5320
 京都営業所 ☎075-603-4826
 大阪中央営業所 ☎06-6943-6118