



Design Your Voice  
**Hakuzo**

次亜塩素酸ナトリウム配合

# ひねって含浸 10セット入 ハクゾウジアパック

次亜塩素酸ナトリウム液パックと不織布5枚を1つのフィルムパックで包装した製品です。

水解性バルブ  
(トイレに流せるタイプ)

高濃度の除菌が  
必要な時に！！

不織布タイプ



**ひねって含浸  
ハクゾウジアパック1000**  
0.1w/v% 次亜塩素酸ナトリウム配合

**ひねって含浸  
ハクゾウジアパック5000**  
0.5 w/v% 次亜塩素酸ナトリウム配合


**ひねって含浸  
ハクゾウジアパック1000**  
0.1w/v% 次亜塩素酸ナトリウム配合

次亜塩素酸ナトリウム45mL + 不織布 5枚

**簡単操作！  
液パックをひねってつぶすだけ**



## ■ 製品仕様

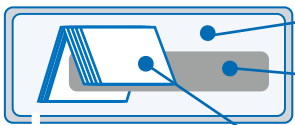

### 外装

### 次亜塩素酸ナトリウム液


成分：次亜塩素酸ナトリウム  
液量：45mL

### 清拭用クロス


サイズ：200mm×300mm  
250mm×250mm  
入数：5枚



## ■ 使用方法

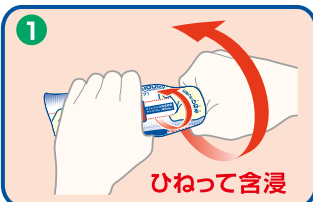

1 ひねって含浸  
次亜塩素酸ナトリウム液の入ったパックをひねりつぶし、基材を少し揉んで液を全体に含ませてください。

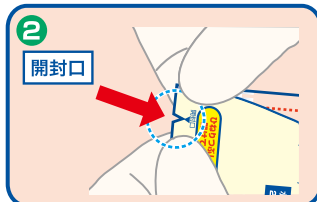

2 開封口  
開封口から開封し、次亜塩素酸ナトリウム液を含んだ基材を取り出してください。

## ■ 使用上の注意

※必ず使用前に『使用上の注意』等をよくお読みください。  
体調のすぐれない方や心臓病、呼吸疾患の方は使わないでください。



液剤パックを  
押さないでください!

- トイレに流す時は、1回に2枚までとしてください。また、大の水量で流してください。大量の枚数を流すと詰まりの原因となります。
- 外袋を開封する前に、次亜塩素酸ナトリウム液の入ったパックをひねりつぶしてください。(※パックを押して、つぶさないでください)
- 指定用途以外にはご使用しないでください。
- 使用時は、液が目に入らないように注意してください。
- 衣類等につくと脱色するのでご注意ください。
- 他の容器に移して使用しないでください。
- 使用する時は、**グローブを着用し**、液剤に触れないでください。
- 金属を腐食させることがあるのでご注意ください。
- 体に異常が表れた時は、使用を中止してください。
- 万が一、液漏れが見つかった場合は、使用を中止してください。
- 高温・多湿の場所及び直射日光の当たる場所を避け、保管してください。
- 小児の手の届かないところに保管してください。

## ■ 製品特長


### 1 簡単便利

◎次亜塩素酸ナトリウムが入ったパックを上からひねりつぶして開封するだけで、容易に使うことができ便利です。



### 2 濃度調製不要で効率的

◎あらかじめ決められた濃度に調製されていますので、濃度間違いがございません。  
◎水で濃度調製する必要もありませんので効率的です。

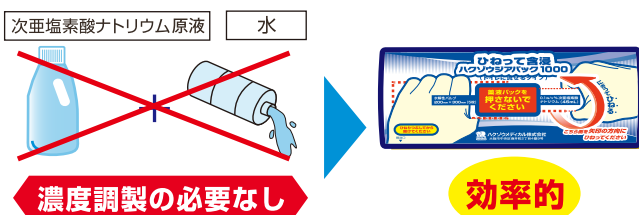

濃度調製の必要なし

効率的

### 3 長期保存可能

◎バリア性の高いフィルムを使用しており、未開封の状態でも2年間の濃度が保持できます。  
(※含浸後は、速やかにお使いください。)

### 4 安全性

◎2重パックとなっている為、液の破裂時に漏れる心配がありません。

## ■ 主な使用用途

環境整備用以外には使用しないでください

- テーブル・ドアノブ・ベッドまわりなどの洗浄・除菌
- 汚染物の付着した箇所の洗浄・除菌

品番	写真	規格	包装	小箱サイズ(mm)	1梱入数	ケースサイズ(mm)	JANコード
				小箱重量(g)		ケース重量(kg)	
3162102		水解性パルプ 5枚 (200mm×300mm)	5枚× 10セット/箱	220×80×190	20箱	454×418×395	4 958286 705705
				730		15.3	
3162105		水解性パルプ 5枚 (200mm×300mm)	5枚× 10セット/箱	220×80×190	20箱	454×418×395	4 958286 706924
				730		15.3	
3162201		不織布タイプ 5枚 (250mm×250mm)	5枚× 10セット/箱	220×80×190	20箱	454×418×395	4 958286 706306
				730		15.3	

※詳細は各営業にお問い合わせください。



## ハクゾウメディカル株式会社

〒540-0025 大阪市中央区徳井町2丁目4番9号  
TEL. 06-6942-0451 <https://www.hakuzo.co.jp/>

本社営業課 ☎06-6809-4318 阪神営業所 ☎078-262-1634  
東京支店 ☎03-3522-6720 神戸営業所 ☎078-940-8975  
北大阪支店 ☎072-653-4045 広島営業所 ☎082-849-4188  
南大阪支店 ☎0721-20-2900 福岡営業所 ☎092-481-5921  
仙台営業所 ☎022-393-7434 熊本営業所 ☎096-345-2253  
関東営業所 ☎03-5809-4780 札幌駐在所 ☎011-788-8009  
西東京営業所 ☎042-646-0451 北陸駐在所 ☎076-225-8013  
名古屋支店 ☎052-769-6021 鹿児島駐在所 ☎099-296-1925  
三重営業所 ☎059-350-3844 沖縄駐在所 ☎098-941-5320  
京都営業所 ☎075-603-4826  
大阪中央営業所 ☎06-6943-6118