

感染対策製品のご案内



INFORMATION

-手指衛生製品シリーズ-

ハンドソープと流水による手洗い

感染防止の基本的な手技は手洗い若しくは手指消毒です。手指衛生を行うことにより、手指を介した感染を防止することが重要です。

ハンドソープと流水による手洗いは、手洗いの手段の基本として欠かすことができません。目に見える汚れがある場合には、まずハンドソープと流水による手洗いで汚れを除去する必要があります。

どんな
ときに
必要？

目に見える汚れや蛋白性物質が付着している場合
速乾性手指消毒剤に含まれている
保湿剤を落とす場合*

*速乾性手指消毒剤に含まれる保湿剤による手のベタつきを落とす為、
数回に一度流水と石鹸による手洗いが推奨されています。

汚染防止の観点から、液剤の交換・継ぎ足しをせずに
容器はディスポーザブルに



減容ボトル採用!

殺菌成分
不使用

ハクゾウあわ物語®
やさしさプラス【化粧品】

- あわ立ちをよくし、洗浄性を上げています
ので、皮膚刺激性が低くなり、やさしい。
- 弱酸性です。

手洗いが必要な
場面は??

- 患者が処置をする前
- 患者の処置をした後
- 手袋をはずした後
- 汚染した可能性がある場合 など




キレイに見えても
実は汚れていることも
あるゾウ。



手洗いは最も簡単な
感染対策の1つです。


洗い残しやすい箇所

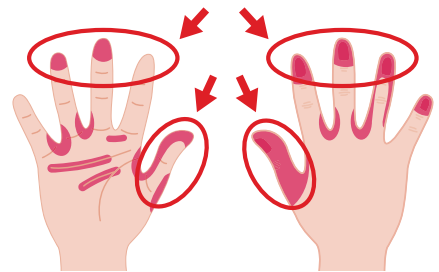

手のひら

手の甲

手洗いチェッカー
などで、洗い残しの
確認ができます。

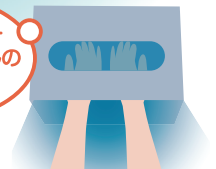

ハクゾウあわ物語iromiru【化粧品】

色が変わる500mLの泡ハンドソープです。
手洗いすると約30秒で白く変化します。

減容ボトル採用!

- 皮膚に同化しにくい、むらさき色の泡です。
- 約30秒でハンドソープが、むらさき色⇒白色に変化します
(※変化する時間は個人差があります)
- 手荒れに配慮した処方にしてあります。

約30秒、手をスクラブすると色が白くなる!



ポンプタイプ



手洗後は完全にふき取り乾かすことが必要であり、手荒れがある場合は手肌に優しくしっかり拭けるタオルの選択も重要な要素となります。



2ply
150組
(300枚)



3ply
120組
(360枚)



専用ホルダー【2ply用】



専用ホルダー【3ply用】



専用ホルダー【縦型 3ply用】

ハクゾウ抗菌ペーパータオル


- 2枚合わせにより優れた吸水性
- 表裏とも手肌に優しいソフトな質感
- 専用ホルダーがございます。

ハクゾウやさしいペーパータオル

- 3枚合わせの構造になっていますので、吸水性・保水性に大変優れており、使用量の削減につながります。
- ソフトな肌触りで、皮膚への刺激が少なくなっています。
- 専用ホルダーがございます。

手洗いの遵守率を調べる方法

ペーパータオルの使用枚数から、どれくらい手洗いが行われたかを推測することができます。

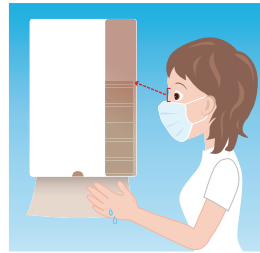

手洗い手順



1 手指を流水でぬらします。



2 石鹸液を適量取り出します。



3 手のひらをこすり合わせよく泡立ちます。



4 両手の指の間をこすり合わせます。



5 手の甲をもう片方の手のひらでこすりします。(両手)



6 指先をもう片方の手のひらでこすりします。(両手)



7 親指をもう片方の手で包みこすりします。(両手)



8 両手首まで丁寧にこすりします。



9 流水でよくすすぎます。



10 ペーパータオルを取ります。



11 指間や手の甲を含め、手指全体の水分を良く拭き取ります。



12 最後に手首までしっかり拭き取り十分に乾燥させます。

手洗いのポイント

1. 手洗い時間(30秒~60秒)
2. 手首を含み手指全体をまんべんなく洗う
3. 石鹸成分を十分に洗い流す
4. ペーパータオルで十分に水分を取り、乾燥させる。

※手洗い手順の下敷きをご用意しています。

ハッピーバースデーの歌 2回で約40秒



手指消毒に

速乾性手指消毒剤は、石けんと流水による手洗いよりも殺菌力が強く、手指衛生に費やす時間が短縮でき、保湿剤が含まれていることで手荒れしにくいなどの特長があります。

水のいない80%エタノールの速乾性手指消毒用ジェル。

エレファジェルS【第3類医薬品】 **減容ボトル採用!**

【成分及び分量】100mL中 ※エレファジェルSとエレファジェルは同一成分。
有効成分：日本薬局方エタノール83mL
添加物：ヒアルロン酸ナトリウム、グリセリン、トコフェロール酢酸エステル、カルボキシビニルポリマー、トリエタノールアミン、ハアセチルシロ糖



ポンプタイプ
150mL



ポンプタイプ
350mL

エレファジェル

【指定医薬部外品】



携帯タイプ
60mL



ポンプタイプ
150mL



ポンプタイプ
350mL

エレファジェルプラス【指定医薬部外品】

酸性タイプの80%エタノールの速乾性手指消毒用ジェルです。

【成分及び分量】100mL中
有効成分：日本薬局方エタノール83mL
添加物：イソプロパノール、リン酸、グリセリン、マクロゴール200、トコフェロール酢酸エステル、ヒドロキシプロピルセルロース



ポンプタイプ
350mL

減容ボトル採用!



- 患者に触れる前
- 清潔/無菌操作の前
- 体液に暴露された可能性のある場合
- 患者に触れた後
- 患者周辺の環境や物品に触れた後

手指消毒剤が必要な場面は?

エレファジェル用ポシェット

エレファジェル150mL専用のポシェット、腰着用ベルトです。



【ウエストポーチタイプ】イメージ



【ショルダータイプ】イメージ



ピンク

ネイビー

【素 材】本体(表面):ポリエステル (裏面):塩化ビニル
ヒモ:ポリプロピレン クリップ:ポリプロピレン

腰着用ベルト

《使用手順》



本品を適量手のひらに取ります。



本品を指先に擦り込み手のひらになじませます。



手のひらや手の甲に擦り込みます。
※写真は手のひらを擦り込んでいます。



指の間にも擦り込みます。



親指にも擦り込みます。



最後に手首にも擦り込んでいきます。

パネルサイズ:横100mm×縦120mm




エレファジェル手指消毒手順パネルをご用意しています。

ハクゾウオートディスペンサーRub

プッシュ不要で手指の消毒ができるオートディスペンサーです。

- センサーによる自動吐出のため、触れることなく手指消毒を行うことができます。
- 乾電池式(単三形アルカリ電池4本。電池別売。)で、省スペース・コンセント不要。コンパクトなので持ち運びにも便利。設置場所も困りません。
- 注ぎ足しではなく、容器をつけかえるため、衛生的にご使用いただけます。
- 吐出量を3段階に設定(下図参照)でき、使用シーンに応じて使い分けられます。
- 専用ホルダーがございますので、ご使用環境に応じて使用することができます。(※マグネット・パイプクランプ別売)

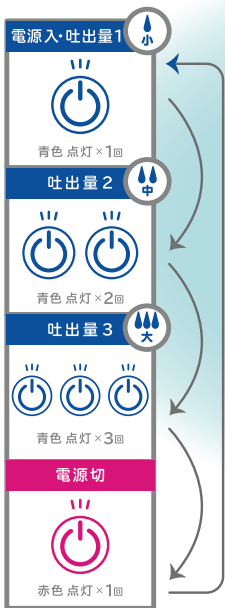

ディスペンサーの取り付け方と操作方法の動画はこちら



エレファジェル350mL つけかえ用 減容ボトル採用!

【指定医薬部外品】

オートディスペンサー付け替え専用のエレファジェルとなります。

- 注ぎ足しではなく、ディスペンサーに容器をつけかえるため、衛生的にご使用いただけます。

【成分及び分量】100mL中
有効成分:日本薬局方エタノール83mL
添加物:ヒアルロン酸ナトリウム、グリセリン、トコフェロール酢酸エステル、カルボキシビニルポリマー、トリエタノールアミン、ハアセチルしょ糖



350mL

ハクゾウ消毒用エタノール液E1【指定医薬部外品】

手指の消毒や身の回りの除菌などに使用できる80%エタノール液です。

- 500mL、1Lは、ポンプを取り付けると手指の消毒用としてお使いいただけます(別売)。
- 1プッシュで約3.0mLとなります。
- 裏面には目盛りが付いています(500mL、1Lタイプ)。
- 手指・皮膚の消毒、身の回りの除菌など、多用途でお使いいただけます。

【成分及び分量】100mL中
有効成分:エタノール83mL
添加物:イソプロパノール3.7mL



エレファフォーム【指定医薬部外品】


アルコールを含まない手指消毒剤です。

- アルコールフリータイプとなっています。
- 150mLの使い切りやすいタイプです。
- ヒアルロン酸ナトリウムを配合しています。
- 目盛りがついていますので、使用量を一目で確認することができます。
- ワンプッシュあたり約1mLです。

【成分及び分量】

有効成分:ベンザルコニウム塩化物 0.05%
添加物:水酸化カルシウム、疎水化ヒドロキシプロピルメチルセルロース、ヒアルロン酸ナトリウム、エデト酸四ナトリウム水和物、ラウリルジメチルアミノオキシド液、水

15秒以上、手にしっかり
擦り込んでください。

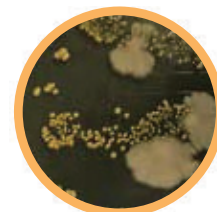

※コロニー数が減少

アルコール過敏症の方に
広範囲の微生物に対し、
消毒効果を有します。

塗り広げやすく液体やジェルに
比べこぼれやすいです。

手荒れケア・予防対策

スキントラブルを起こしている手には、多量に一過性菌が定着し、手洗いをしても皮膚の細菌数は減りません。つまり感染リスクが増加し、感染の媒介者となる恐れがあります。手荒れ対策を行うことは感染対策上、重要になります。

石けんや水、消毒剤、ラテックス素材などの刺激から手荒れを防ぐ皮膚保護ジェルです。

ハクゾウハンドケアジェル肌ほのか

【化粧品】

ハンドケア

ポンプタイプ

皮膚バリア



195g

- 3種のバリア成分(ポリパーフルオロイソプロピルエーテル、ジメチコン、スクワラン)が手荒れから保護します。
- 肌に伸び、馴染みやすい使用感。ほとんどべたつきません。
- グリーンフローラルの香りです。
(※手指に擦り込んでいくと、香りは徐々に消えていきます。)
- 手荒れ後のケアとしてもお使い頂けます。
- 手指以外にもお使い頂けます。(※目、口、粘膜部には使用しないでください。)
- 1プッシュ=約0.5mL

【成分】

水、グリセリン、BG、ジメチコン、ペンチレングリコール、ポリクオタニウム-51、ポリパーフルオロイソプロピルエーテル、スクワラン、ヒドロキシプロピルシクロデキストリン、ヒドロキシエチルセルロース、トリデセス-4カルボン酸Na、ポリソルベート60、(アクリレート/アクリル酸アルキル(C10-30))クロスポリマー、ミスチン酸ポリグリセリル-10、水酸化K、ペンテ酸5Na、フェノキシエタノール、ブチルカルバミン酸ヨウ化プロピニル、香料

◆手荒れ予防効果が大きい。

ハクゾウハンドケア物語

【化粧品】

ハンドケア

ポンプタイプ



300mL


手荒れ後のケアとしてご使用頂くハンドケアローションです。

- 手洗い・消毒後の手荒れ対策にお使い頂けます。
- 手荒れ製品として保湿成分(直物セラミド、ポリグルタミン酸、グリチルリチン酸ジカリウム)を添加。
- べたつきが少なく、においもほとんどありません。
- ワンプッシュ約0.5mLです。

【成分】

水、BG、ミスチン酸イソプロピル、スクワラン、ワセリン、ステアリン酸グリセリル(SE)、グリセリン、グリチルリチン酸2K、コメヌカスフィンゴ糖脂質、ポリグルタミン酸、ポリアクリルアミド、(C13,14)イソパラフィン、ラウレス-7、セタノール、水添レシチン、リゾレシチン、トコフェロール、フェノキシエタノール

◆手洗い後に使用すると効果的。

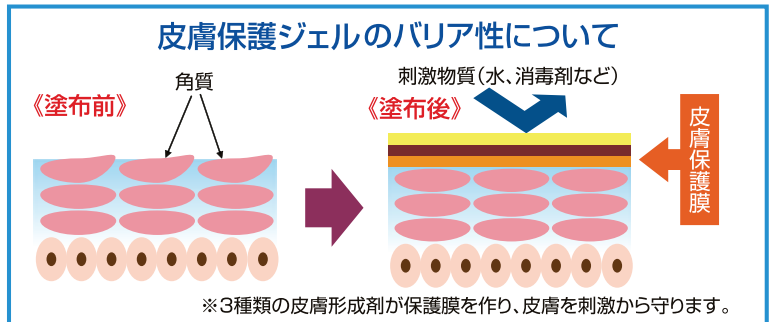

手荒れ予防には
ハクゾウ
ハンドケアジェル
肌ほのか



手荒れケアには
ハクゾウ
ハンドケア物語



手指衛生製品シリーズ 製品規格一覧

品名	品番	種類・規格	包装	1梱入数	JANコード
ハクゾウあわ物語 やさしさプラス【化粧品】	3001199	500mL	1本	12本	4958286705781
ハクゾウあわ物語iromiru【化粧品】	3002004	500mL ポンプ付	1本	15本	4958286718293
ハクゾウ抗菌ペーパータオル	1895891	22cm×23cm 2ply	150組(300枚)/袋	36袋	4958286602004
ペーパータオルホルダー	1895924	レギュラーLBホルダー	1個	10個	4904860807006
ハクゾウやさしいペーパータオル	3395001	20cm×23cm 3ply	120組(360枚)/袋	24袋	4958286707204
ペーパータオルホルダー	3395023	PT600	1個	10個	4543845000157
ハクゾウペーパータオルホルダー	3395021	縦タイプ	1個	20台	4958286709284
エレファジェル 【指定医薬部外品】	2600181	60mL	1本	10本/箱×12箱	4958286036557
	2600182	150mL	1本	10本/箱×6箱	4958286061887
	2600183	350mL	1本	10本	4958286036564
	2600189	350mL つけかえ用	1本	10本	4958286079103
エレファジェルプラス【指定医薬部外品】	2600203	350mL	1本	10本	4958286079691
エレファジェルS 【第3類医薬品】	2600184	150mL	1本	10本/箱×6箱	4958286707228
	2600185	350mL	1本	10本	4958286057439
エレファジェル用ポシェット	3087663	150mL専用 ネイビー	1個	20個/箱×10箱	4958286706986
	3087666	150mL専用 ピンク	1個	20個/箱×10箱	4958286706412
	3087669	腰着用ベルト	1本	50本×12箱	4958286706993
ハクゾウディスペンサー Rub	1850270	エレファジェル350mL専用	1個		4958286717760
ハクゾウ消毒用エタノール液E1 【指定医薬部外品】	2600187	500mL	1本	10本/ケース	4958286078878
	2600196	500mL用シャワーポンプ	1本/袋	400袋/ケース	4958286717340
	2600186	1L	1本	10本/ケース	4958286079547
	2600199	1L用シャワーポンプ	1本/袋	400袋/ケース	4958286079554
	2600192	5L(専用コック付)	-	1箱	4958286079226
	3395026	足踏み式消毒液スタンド	TTA-08Aホワイト	1台	4543845005305
	3395027	足踏み式消毒液スタンド	TTA-08Aダークブロンズ	1台	4543845005312
エレファフォーム 【指定医薬部外品】	3102101	150mL	1本	40本/ケース	4958286720593
ハクゾウハンドケアジェル肌ほのか 【化粧品】	3901195	195g	1本	36本	4958286712314
ハクゾウハンドケア物語 【化粧品】	1899376	300mL	1本	20本/箱	4958286705811

QRコードはコチラ

ホームページ用
QRコード



Twitter用
QRコード



Instagram用
QRコード



お客様相談窓口
フリーダイヤル

0120-50-0451

<https://www.hakuzo.co.jp/>

2025.06