



BABY & MATERNITY CATALOG

ハクゾウメディカル株式会社



産科ブランド「meetuu」のご案内



あなたとベビーに、安全でやさしいものを。

meetuu(ミーチュ)は心と身体へのやさしさを考えたマタニティ&ベビー用品ブランドです。ママとベビーの幸せな出会いをサポートし、出産前後の大切な時間を快適に安心して過ごしてもらうため、本当に必要なものだけをそろえました。

ブランドロゴについて

1本の線で描かれた母子のゾウが表すのは、ふれあいによって生まれる「絆」です。上向きに伸びた母ゾウの鼻がやさしく子ゾウを包み、さらに明るい未来へ向かっていく姿勢を表しています。ブランド名は、「meet」と二つの「u(you)」で、ママの「ベビー」との出会いと、「これからママになる自分」との出会いを表現しています。

コンセプトについて

出産を迎えるにあたり、準備するものはたくさんあります。しかし「何をそろえたら良いの?」「どれが良いか迷ってしまう」…そんな不安や疑問を抱く方々のために、meetuuでは、本当に必要となる製品を厳選し、安全・やさしさを第一に考えることをお約束いたします。



産科製品ラインナップ

妊娠・出産前のサポートに

- 妊婦向け弾性ソックス ……3
- 分娩監視装置用ベルト ……4
- 検診用ロールシート ……5

分娩キット関連

- 分娩キット ……5
- 分娩用吸収シート ……6

出産後のママのサポートに

- 直後パッド ……7
- お産パッド ……7～8
- ギャザー付きパッド ……8
- 骨盤固定ベルト ……9～13
- 不織布製骨盤固定ベルト ……14
- 産褥用コルセット ……15～16
- 産褥用ショーツ ……17
- 乳 帯 ……18
- 母乳パッド ……18
- お産セット ……19
- お産バッグ ……20
- U座クッション ……21
- 使い捨て不織布タオル ……22

ベビーマットのサポートに

- ベビーマットレス ……22
- 新生児保護用ガーゼ ……23
- 沐浴用ボディソープ ……24
- 新生児臍処置セット ……24
- 清浄綿 ……25
- 光線療法用アイマスク ……26

その他製品

- 弾性ストッキング ……26

出産祝いなどに


- meetuuベビーギフトボックス ……27
- 手をまもる消毒ギフトボックス ……27

産科製品一覧

- 産科製品一覧 ……28～30

妊婦向け弾性ソックス

お腹が大きい妊婦さんでも履きやすいスパイラル着圧の弾性ソックスです。

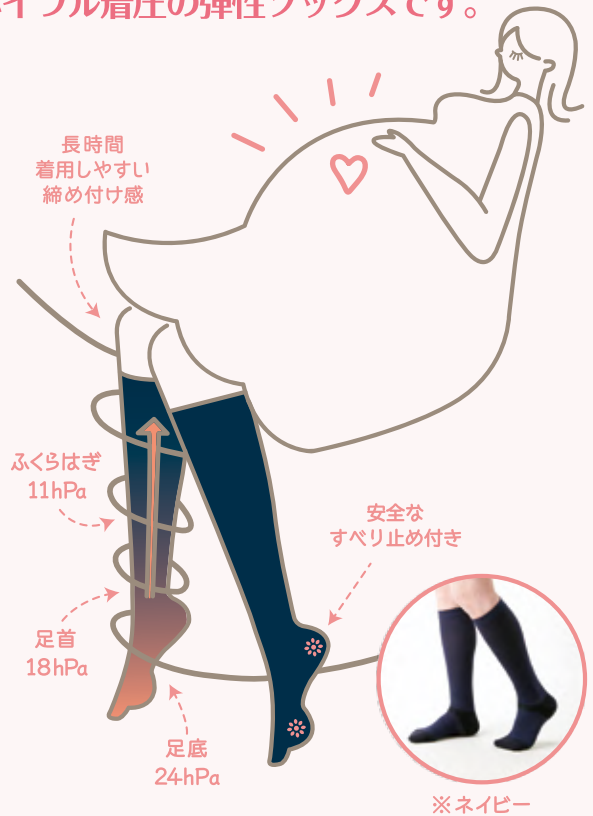

ママらくfitソックス

品番	規格	包装	1梱入数
3000079	ネイビー 21cm ~ 23cm 1足入	1箱	10箱 × 4中箱
3000080	ネイビー 23cm ~ 25cm 1足入	1箱	10箱 × 4中箱

特長1 スパイラル着圧設計[※]になっており、リンパや静脈を締め付けずスムーズに脱ぎ履きができます。妊娠32~36週の妊婦さんの約9割が履きやすいと評価しています。(2019年自社調査結果)

※ 岡本(株)独自のスパイラル着圧設計 特許第5721972号取得

特長2 強すぎない心地よい着圧値で長時間履き続けやすくなっています。人間工学に基づいた黄金比率着圧仕様


足底：足首：ふくらはぎ = 2.2：1.6：1

※ 膝下におけるちょうど良いと感じる圧(日本繊維製品消費科学会)

特長3 足裏のすべり止め仕様により、妊婦さんでも安全に使用できます。

着用方法 ※左右編み分けの商品ですので、ロゴム部裏の「左」「右」の目印をご確認の上、着用ください。

- ①ソックスを方ぐりよせて、つま先を入れます。
- ②足首まで引き上げ、かかとの位置を合わせます。
- ③ロゴム裏部の左右マークがすね部の中央になるよう調整しながら引き上げます。
- ④ひざ下まで引き上げ、たるみやしわがないように微調整してください。

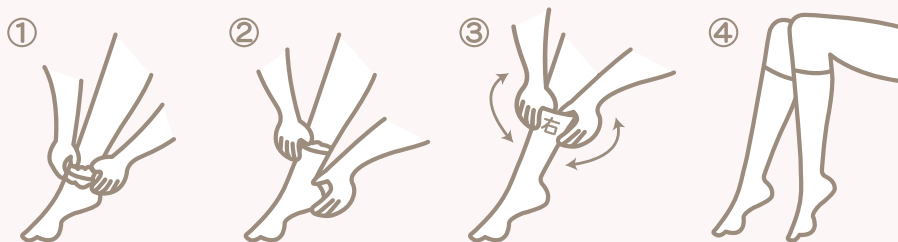

洗濯時のご注意：添付文書をご確認ください。

サイズ より効果的に着用頂くために下記のサイズで着用ください。

測定部位	周囲長
ふくらはぎ	32~38cm
足首	19~23cm



【効能・効果】
装着部位の血行促進、
あしのムクミの軽減

※ 分娩監視装置用ベルト ※

新生児の心音や子宮の張りを計測するための機器を、妊婦の腹部に固定するためのベルトです。



- 1 穴の間隔が狭く、こまやかなサイズ調整が可能
- 2 装置をきちんと固定できる幅広ベルト
- 3 清潔な個人用ベルト




2本入
ピンク1本
ブルー1本

Size: 60mm×1.25m

こんなお困りの声に!

ハートミーベルトで解決!

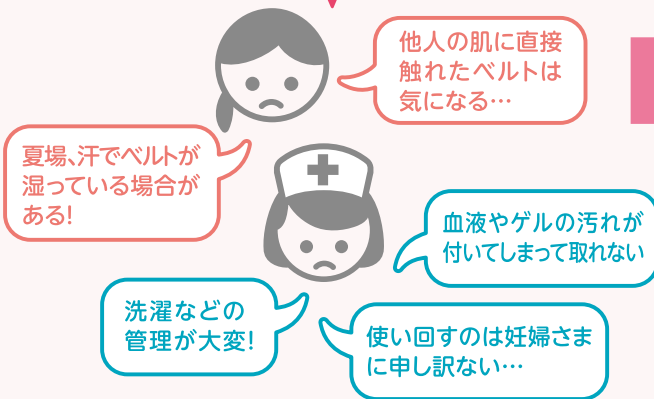

[素材] ポリエステル・ポリウレタン



製品特長

- ♥ 穴の間隔が狭く、こまやかなサイズ調整が可能
- ♥ 装置をきちんと固定できる幅広ベルト
- ♥ 2色のベルトでかけ間違い防止
- ♥ 薄くて肌ざわりのよいやわらか素材
- ♥ 清潔な個人用ベルト
- ♥ 安心なラテックスフリー素材

使用方法

ハートミーベルトをねじれないように妊婦さまの腰部で一周させ、トランスジューサの突起部分をベルトの穴に通して、装着してください。

meetuuハートミーベルト

品番	種類	包装
3147813	幅60mm×長さ1.25m ピンク1本/ブルー1本入	2本/袋

※ 検診用シート



検診時に使用するシートです。



ハクゾウ検診用シート (ピンク)

主として産科の検診時などに使用するピンク色のロールシートです。

主な使用用途

- ・一般外来・病棟での処理などに
- ・口腔ケアや食事介助のケア時などに



品番	種類	規格	包装	1梱入数
3037085	ロールタイプ	370mm×36m	1本/箱	20箱

※ 分娩キット EOG



【管理医療機器】分娩時処置用具セット 医療機器認証番号：302ADBZX00073000 販売名 ハクゾウ分娩キットII

分娩に必要な用具・シートをまとめて滅菌したディスプレイブルキットです。



※本製品は受注生産品です。ご用命の際は、構成品をご指定若しくはお問い合わせ願います。

[主な構成部材]

ラッパー / 単回使用汎用性サージカルドレープ / 分娩衣 / 間欠泌尿器用カテーテル / マスク / キャップ / ガウン / 吸収マット / 腹部覆用シート / 分娩用シート / レギンスカバー / 脚袋 / 天然ゴム製手術用手袋 / 非天然ゴム製手術用手袋 / 気管支吸引用カテーテル / 吸引キット / 臍帯閉鎖術用クリップ / 単回使用メス / 単回使用メス用刃 / X線造影材入りガーゼ / 医療ガーゼ / 医療用不織布 / X線造影材入りスポンジ / 医療脱脂綿 / コットンボール / 単回使用注射用針 / 汎用注射筒 / 汎用洗浄用注射筒 / はさみ / 新生児用シート / トレー / 膿盆 / カップ / ピンセット / 綿棒 / テープ / 直後パッド / 針受け / メジャー / ネームバンド

※ 分娩用吸収シート




分娩台に敷いて使用する分娩用吸水マットです。




バースヘルパー EOG

- 手触りがよく厚みのあるワイドサイズで体液をすばやく吸収、手術台及び床を汚しません。
- 製品重量が安定していますので、血液量の測定が可能です。
- 未滅菌もございます。

【製品重量】 約300g/枚
 【吸収量】 約2,000mL/枚
 (※生理食塩水による測定)

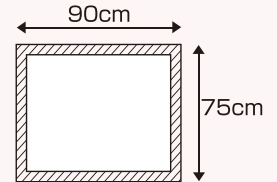

品番	種類	規格	包装	1梱入数
1420025	滅菌	90cm×75cm	1枚/袋	20袋
1420029	ポリ袋入	90cm×75cm	1枚/袋	40袋

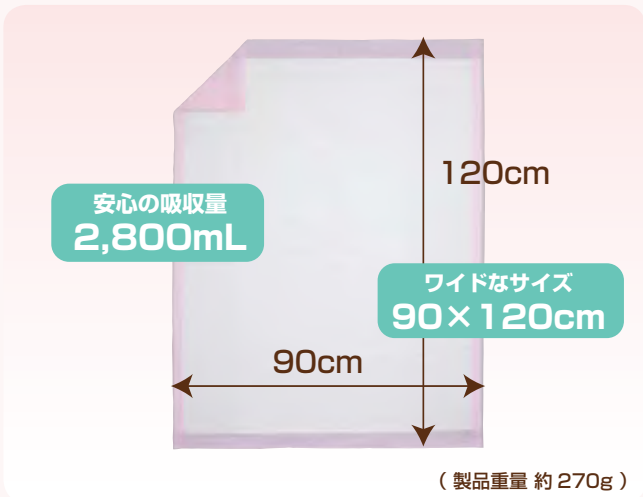

バースヘルパー ピンク EOG

- 吸収量が多くしっかり吸収します。
- スピード吸収で素早く吸い込みモレを防ぎます。
- 厚みがあり、肌触りが良いです。
- 吸収後も逆戻りしにくくなっています。
- 厚みのあるバックシートを使用しています。
- バックシートには、製品重量ラベルが貼付されています。
- 蛍光増白剤は含まれておりません。
- 未滅菌もございます。

【製品重量】 約270g/枚
 【吸収量】 約2,800mL/枚
 (※生理食塩水による測定)



品番	種類	規格	包装	1梱入数
3906017	ポリ袋入	90cm×120cm	1枚/袋	20袋
3906020	滅菌	90cm×120cm	1枚/袋	20袋


特長 1 大きなサイズでしっかり吸収！

従来の製品ラインナップにない大きさ・吸収量の吸水マットです。モレ・汚れが心配な場面でお使い頂けます。

特長 2 厚みがあり、肌ざわり柔らかか！

お母さんの肌に直接触れる分娩マット。肌ざわりの良い表面材で、マットにも厚みがあり、柔らかな使い心地です。


特長 3 スピード吸収で素早く吸い込みモレを防ぐ！

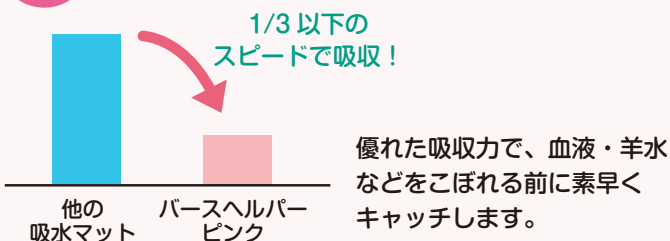

特長 4 丈夫なバックシートで破れにくい！

バックシートが厚くて丈夫なため、大量に吸水しても破れにくく、安心です。

特長 5 吸収後も逆戻りしにくい！

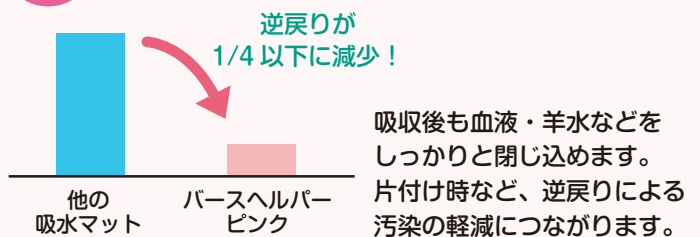

こんなお困りの声に！



- 血液・羊水のモレが気になる！
- 吸収量が足りない！
- 柔らかい肌ざわりのマットを使いたい！
- 吸収スピードの早いマットが欲しい！
- フリースタイル用にサイズの大きいマットが必要！

※ 直後パッド



分娩直後に使って頂くパッド例です。ご要望に応じた製品もお選び頂けます。



産後ショーツバースのポリマー入りパッドを組み合わせています。

#37

品番:1400142 1梱入数:1セット/袋

- ①産後パッドナチュラル(ラミなし)Mパッド … 1
- ②産後パッドナチュラル(ラミなし)Lパッド … 1
- ③フラットシート … 1
- ④産後ショーツバース … 1

※番号順に上から製品が配置されています。



ギャザー付きパッドで横モレしにくく安心です。

#SW-1

品番:1400283 1梱入数:1セット/袋

- ①産後パッドナチュラルM …………… 1
- ②産後パッドワイドLL …………… 1
- ③産後ショーツバース …………… 1



滅菌済の直後パッドです。

#36



品番:1400225 1梱入数:1セット/袋

- ①産後パッドゴールド M …………… 1
- ②産後パッドゴールド L …………… 1
- ③フラットシート …………… 1
- ④紙T字帯 …………… 1
- ⑤半裁シート …………… 1

※ お産パッド



出産後の悪露を吸収するパッドです。

ガーゼ素材で
肌にやさしい



①天然 Cotton の吸収材

ふわふわのクッション性をもつ天然 Cotton がしっかり吸収。ポリマー不使用で、産後のデリケートなママにも安心です。

天然 Cotton 吸収材
ポリマー不使用

②横モレ防止

防水シートがサイドを立体的に包み込み、横モレを防ぎます。

meetuu だけの♪

③ママをいたわるガーゼ巻き

肌に触れる表面シートに、ガーゼを採用。天然素材である Cotton を織ったガーゼが、やさしい肌ざわりです。



使用目安	破水時	出産当日	産後 1日目	産後 2日目	産後 3日目	産後 4日目~
L	♥	♥	♥	♥	-	-
M	-	-	♥	♥	♥	♥

4日目以降はSサイズのパッドもしくは生理用品等をご使用ください。

meetuu産後パッドゴールド

ガーゼ巻きの肌ざわりに優れたお産パッドです。

品番	種類	規格	包装	1梱入数
1400037	L1P	18cm×50cm	1枚/袋	100袋
1400038	M1P	12cm×33cm	1枚/袋	300袋
1400039	M10P	12cm×33cm	10枚/袋	25袋

スポット吸収で
肌さらさら!



使用目安	破水時	出産当日	産後1日目	産後2日目	産後3日目	産後4日目~
L	♥	♥	♥	♥	-	-
M	-	-	♥	♥	♥	♥
S	-	-	-	-	♥	♥

①ふわさら素材

ふわふわのクッション性と肌にくっつきにくいさらさらの表面シートで、デリケートな肌を包みます。

②高吸収ポリマー

高吸収ポリマーによる優れた吸収量。悪露を広げずスポット吸収することにより、表面さらさらでさわやかな使い心地です。

③横モレ防止

防水シートがサイドを立体的に包み込み、横モレを防ぎます。



meetuu産後パッドナチュラル

高吸収ポリマーを加え、吸収力に優れたお産パッドです。

品番	種類	規格	包装	1梱入数
1400014	L	15 cm×52cm	1枚/袋×5袋	50袋
1400015	M	12 cm×32cm	1枚/袋×10袋	50袋
1400016	S	7.5cm×23cm	1枚/袋×20袋	50袋

※ ギャザー付きパッド

ワイドで吸収力に優れたギャザー付きのお産パッドです。

長時間・夜も安心!



使用目安	破水時	出産当日	産後1日目	産後2日目	産後3日目	産後4日目~
LL	♥	♥	♥	-	-	-
L	♥	♥	♥	♥	-	-
M	-	-	♥	♥	♥	♥

4日目以降はSサイズのパッドもしくは生理用品等をご使用ください。

①ワイド設計&立体ギャザー

おしりにフィットする幅広構造で、後ろモレをガード。なが〜い立体ギャザーで横モレも防ぎ、安心 & 快適に使っていただけます。

②W高吸収ポリマー

2層の高吸収ポリマーでバツグンの吸収力。優れた拡散スピードで素早く吸収し、逆戻りを防ぎます。

③透湿性バックシート

通気性のよい透湿性防水バックシートで、湿気を逃し、気になるムレ・カブレからお肌を守ります。

W高吸収
ポリマー
後ろ&横
モレ防止



meetuu産後パッドワイド

立体ギャザーで横モレを防ぎしっかりガード、ワイドな設計でしっかりと包み込み安心のフィット感です。

品番	種類	規格	包装	1梱入数
3140054	LL	32×56cm	1枚×2袋/外袋	50袋
3140055	L	29×49cm	1枚×5袋/外袋	50袋
3140056	M	17×36cm	1枚×10袋/外袋	50袋

※ 骨盤固定ベルト



産後の骨盤の緩みにご使用していただけます。



肌触りのよい
さらっと素材



2本のベルトで
調節かんたん



6cm幅ベルトが
骨盤にフィット



骨盤を固定し、緩みを回復する

マザーベルト



出産を終えたお母さんに
大切なケアをきちんと簡単に！


産後の リフォームケア	出産当日.....悪露が 落ち着いたら.....産後約2ヶ月
マザーベルト (骨盤まわりに)	Pink/White 毎日使えるスタンダードタイプ
	LIGHT 外出時などにオススメな薄型タイプ
ママスリム (ウエスト、お腹まわりに)	SINGLE/DOUBLE

※装着時期は目安です。体調に合わせて着用してください。

① どうして骨盤ケアが必要なの？

産褥 4 日目の不快症状

(複数回答)

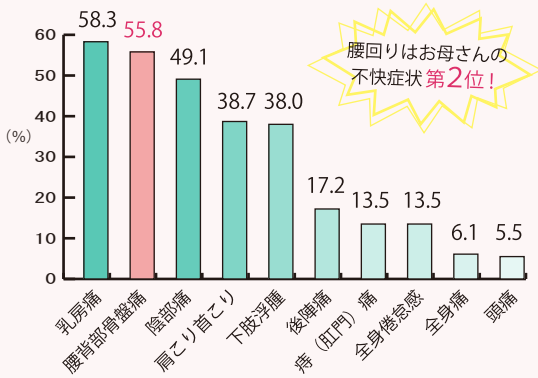

腰回りはお母さんの不快症状第2位!

【褥婦の腰痛の実態と介入 第1報 質問紙による実態調査】
(第53回 日本母性衛生学会, 2012年11月)

その1 出産後は、骨盤が緩んでしまった状態!

分娩の際は、赤ちゃんが通ることができるような産道にするため、女性ホルモンの影響により、骨盤が少し緩むようになっています。

産後、骨盤の緩みをそのままにしておくと、身体の歪みなどに繋がる可能性があります。骨盤を締めることは、産後の身体を整えるのに重要であり、また産後ケアの取り組みの1つとして世の中に浸透しつつあるケアとなっています。

その2 骨盤の緩みが腰痛の原因に…

腰痛は多くの人が抱える悩みですが、産後のお母さんも例外ではありません。左グラフのように産後のお母さんの約半数が腰周りの痛みを感じています。妊娠や出産をきっかけに腰痛が発症したり、またそのまま慢性化してしまうことがあるのも特徴です。

腰痛は、姿勢が原因の場合もありますが、骨盤の緩みが腰痛(骨盤輪不安定性腰痛)の原因になるという報告もされています。



② マザーベルトで骨盤ケアをしませんか？

その1 産後の骨盤の緩みに

骨盤の緩みを元に戻すには、骨盤底筋体操や骨盤ベルトの使用などが効果的とされています。

お母さんが「身体の調子がなかなか戻らず元気がない…」「赤ちゃんのお世話に思っていた以上に時間がとられる!」という場合には、着用するだけで良い骨盤ベルトがオススメです。

meetuu シリーズでは、「マザーベルト」でお母さんの骨盤の緩みに対するケアをお手伝い致します。



その2 産後の腰痛にも

「マザーベルトを着用することで、骨盤の緩みだけでなく、産後の腰痛も同時に和らげることができないか?」と考えていました。

そこで大学と病院に協力して頂き、骨盤の緩みから起こる骨盤輪不安定性腰痛を対象に、共同研究を行いました。

その結果、産褥リフォームインナーを分娩直後から1ヵ月間正しく着用することで、産褥期の腰痛が緩和することが明らかになりました。

骨盤の緩みだけでなく、お母さんの QOL 向上を考え、今後もエビデンスに基づいたご提案をさせて頂きたいと思っております。



【引用】
「褥婦の腰痛の実態と介入 第1報 質問紙調査による腰痛の特徴と関連要因の検討」
「褥婦の腰痛の実態と介入 第2報 産褥リフォームインナー着用指導の効果」
(母性衛生 第55巻・1号, 2014年4月)

【発表実績】
The 9th International Conference with the Global Network of WHO (2012年7月)
第43回 日本看護学会 - 母性看護 - (2012年10月)
第53回 日本母性衛生学会 (2012年11月) 他

共同研究

【大阪大学助産師同窓会生涯学習プロジェクト委員会】
【JCHO 大阪病院】と
マザーベルトの共同研究を実施しました。

目的

分娩直後から1ヵ月間、産褥リフォームインナー(腹帯や骨盤ベルトなど)で正しく腰部や骨盤周囲を固定する着用指導によって、腰痛改善に効果があるかを明らかにする。

方法

分娩直後から腰痛を自覚し、産褥リフォームインナーの着用を希望する着用腰痛群と、腰痛を自覚するが着用を希望しない非着用腰痛群を対象とした。測定尺度には、Visual Analog Scale (VAS)、日常生活動作スコア(ADL score)、理学的診察法を採用した。

結果

着用腰痛群のVAS、ADL score、理学的診察法において、4日目から1ヵ月目まで有意に改善していた。しかし非着用腰痛群はいずれも有意な変化はなかった。

考察

着用腰痛群は、非着用腰痛群よりも腰痛の自覚の程度と日常生活困難感が有意に軽減し、理学的診察法でも有意に改善していた。つまり、産褥リフォームインナーを分娩直後から1ヵ月間正しく着用することで、産褥期の腰痛が緩和することが明らかになった。

(本研究は、四日市看護医療大学の委託研究である。)

③ マザーベルトのご紹介

出産を終えたお母さんに、
「大切なケアをきちんと簡単にしていただきたい」
という願いを込めたベルトです。



骨盤の緩み
対策

産後の骨盤の緩みを
ケアすることができます

腰まわりの
疲れに

ベルトを着用することで
疲れを和らげます

1人でも
簡単に着用

2本の幅6cm ベルトによ
り、1人でも簡単に正しく
着用することができます


製品特長

① 快適素材

肌触りのよいさらっとした素材です。
サイドにメッシュ生地を使用し、
通気性を高めました。

② 調節かんたん

2本のベルトにより、締め具合を
簡単に調節できます。

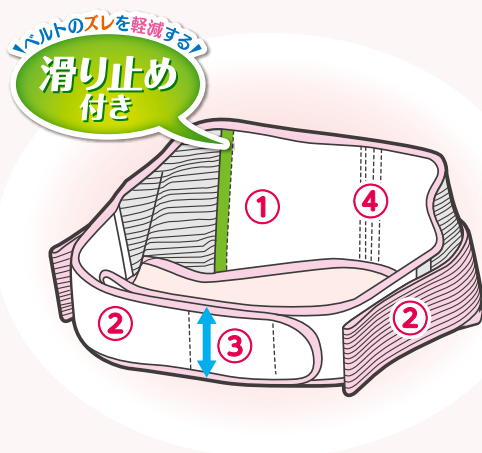

③ こだわりベルト

6cm幅ベルトが締めるべき位置に
フィットし、ご自身でも装着位置が
分かりやすくなっています。腹部への
圧迫も少なく、着用中の違和感が少ない
設計です。

④ しっかり設計

背中側の3つの補強板で、安定感の
ある着け心地です。

装着方法

①②③の詳しい位置は、下記をご覧ください。



補助ベルトがある方を外側にして、
補助ベルトを外します。①上前腸骨
棘(じょうぜんちようこつきよく)と②大転子
(だいてんし)を探し、お尻を包み込むよ
うにして2点間にメインベルトを通します。



ベルトの前側は③恥骨結合部
に重なるようにします。




補助ベルトを持って、前へ引っ張って
締めます。



補助ベルトを留めれば完了です。

装着のポイント

- 個人差で、気持ち良い強さと位置が異なりますので、ご自身が最も良いと思う強さと位置で補助ベルトを締めてください。
- ベルトを無理に強く締めすぎないでください。
- ベルトが肌に当たって痛い場合は、ショーツ等の上から着用して肌に直接触れないようにしてください。

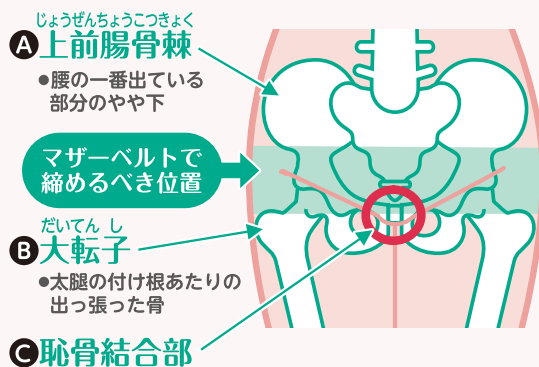

※ 骨盤固定ベルト



産後の骨盤の緩みにご使用していただけます。


出産当日から

外出時などに
オススメな
薄型タイプ



骨盤を固定し、緩みを回復する

マザーベルト LIGHT ライト

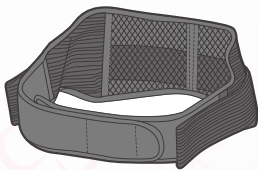

薄型

服の下につけても
目立ちにくい!



メッシュ生地で
通気性がよく
ムレにくい!



2本のベルトで
調節かんたん



6cm幅ベルトが
骨盤にフィット

COLOR
Black

産後の リフォームケア	出産当日.....悪露が 落ち着いたら.....産後約2ヶ月
マザーベルト (骨盤まわりに)	Pink/White 毎日使えるスタンダードタイプ
	LIGHT 外出時などにオススメな薄型タイプ
マラスリム (ウエスト、お腹まわりに) SINGLE/DOUBLE


適合ヒップサイズ	
S~M	60~85cm
M~L	85~105cm
L~LL	105~120cm

MADE IN JAPAN

※装着時期は目安です。体調に合わせて着用してください。

骨盤を固定し、緩みを回復する薄型の骨盤固定ベルトです

「ベルトのズレを軽減する」
滑り止め付き

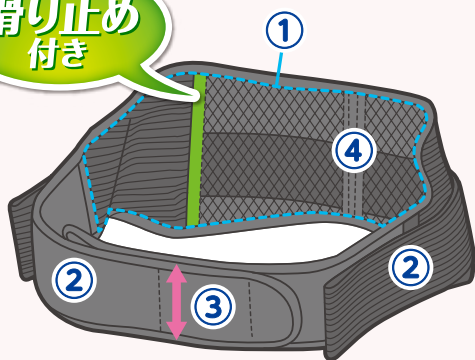

① 薄型タイプ

服の下に着けても目立ちにくく、外出時などにオススメです。サイドと背面全体にメッシュ生地を使用し、全体的に通気性を高めました。

② 調節かんたん

2本のベルトにより、締め具合を簡単に調節できます。

③ こだわりベルト

6cm幅ベルトが締めるべき位置にフィットし、ご自身でも装着位置が分かりやすくなっています。腹部への圧迫も少なく、着用中の違和感が少ない設計です。

④ しっかり設計

背中側の3つの補強板で、安定感のある着け心地です。

外出時などに
オススメな
薄型タイプ



装着方法



補助ベルトがある方を外側にして、補助ベルトを外します。A 上前腸骨棘(じょうぜんちようこつきよく)とB 大転子(だいてんし)を探し、お尻を包み込むようにして2点間にメインベルトを通します。



ベルトの前側はC 恥骨結合部に重なるようにします。



補助ベルトを持って、前へ引っ張って締めます。



補助ベルトを留めれば完了です。

meetuuマザーベルト



ホワイト



ピンク

【素材】
本体：ポリエステル、ポリウレタン、綿
メッシュ部：ナイロン、ポリウレタン

【使用期間の目安】
・分娩直後～産後約2ヶ月
(※個人差があるため、あくまでも目安にしてください。)

品番	種類	規格	適合ヒップサイズ	包装
1490510	ホワイト	S~M	60cm~ 85cm	1袋/箱
1490511		M~L	85cm~105cm	1袋/箱
1490512		L~LL	105cm~120cm	1袋/箱
1490621	ピンク	S~M	60cm~ 85cm	1袋/箱
1490622		M~L	85cm~105cm	1袋/箱
1490623		L~LL	105cm~120cm	1袋/箱

meetuuマザーベルトLIGHT



ブラック

【素材】
本体：ナイロン
メッシュ部：ナイロン、ポリウレタン

【使用期間の目安】
・分娩直後～産後約2ヶ月
(※個人差があるため、あくまでも目安にしてください。)

品番	種類	規格	適合ヒップサイズ	包装
1490520	ブラック	S~M	60cm~ 85cm	1袋/箱
1490521		M~L	85cm~105cm	1袋/箱
1490522		L~LL	105cm~120cm	1袋/箱

※ 不織布性骨盤固定ベルト



使いきりタイプの不織布製 産後用骨盤固定ベルトです。



meetuuマザーベルトSUGU

- 非伸縮性と6cm幅のベルトでしっかりと骨盤を締めることができます。
- どこでも留めることができ、こまやかなサイズ調整が可能です。
- 薄くて肌ざわりの良い素材で、着用時の違和感を軽減します。
- 清潔な使いきりタイプです。
- 直後パッドと合わせてご使用いただけます。

【使用時期】
分娩直後にご使用ください。

品番	規格	適合ヒップサイズ	包装
3108201	M~L (幅60mm×長さ135mm)	85cm~105cm	1本/袋
3108202	L~LL (幅60mm×長さ155mm)	105cm~120cm	1本/袋

✿ 出産直後に便利

産後の腰痛には、腰痛体操や産褥体操などの運動、もしくは腰部や骨盤を固定することが有効とされています。しかし、出産後に継続した運動を行うのは難しいのではないのでしょうか？ そのため、骨盤ベルトのご使用をおすすめします。

骨盤ベルトなどの産褥リフォームケアインナーを出産直後から正しく着用することで、産褥期の腰痛が緩和することが明らかになっています。

特に『マザーベルト SUGU』は出産直後のご使用を想定した、汚れても安心な使いきりタイプの骨盤ベルトです。是非ご活用ください。

【引用】
「褥婦の腰痛の実態と介入 第1報 質問紙調査による腰痛の特徴と関連要因の検討」
「褥婦の腰痛の実態と介入 第2報 産褥リフォームインナー着用指導の効果」 母性衛生・第55巻1号(2014)

こんなお困りの声に!

産後も使うベルトは汚したくない!

出産直後は締める手順が少ない方がよい!

マザーベルトSUGUで解決!

使いきりタイプで 汚れの不安を解消


薄型のベルトで装着時の 違和感を軽減

簡単3STEPで 装着 楽チン!

寝ている時に分厚いベルトは違和感がある...

妊婦さまのベルトを汚してしまわないか心配...


✿ 使用方法

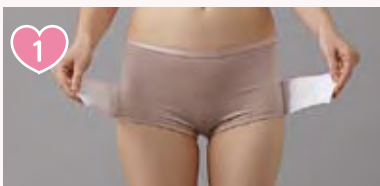

1 起毛している方を外側にして、上前腸骨棘(腰の一番出ている部分のやや下)と大転子(太ももの付け根あたりの出ている骨)を探し、お尻を包み込むようにして2点間にベルトを通します



2 ベルトを前側で交差させて、引っ張ります

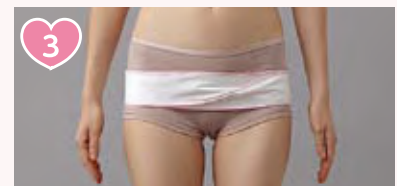

3 ご自身で最も良いと思う強さで留めてください

※ 産褥用コルセット



産褥用の美容コルセットです。

..... 使用時期の目安
悪露が落ち着いたら

キレイなママのための
**産後美容
 コルセット**

ほどよく腹部を引き締める!ワンタッチで快適な着け心地!

ママスリム

SINGLE

産後の リフォームケア	出産当日.....悪露が 落ち着いたら.....産後約2ヶ月
マザーベルト (骨盤まわりに)	Pink/White/LIGHT
ママスリム (ウエスト、お腹まわりに)	SINGLE やさしくタイプ
	DOUBLE しっかりタイプ

※使用時期は目安です。体調に合わせて着用してください。

装着方法



面ファスナーの方を外側にしてウエスト(肘の高さ)にコルセットの上側を合わせます。(直線になっている方を上にしてください。)

両側からしぼるようにしてコルセットを留めれば完了です。

装着のポイント

- 適切な強さと位置には個人差がございます。ご自身で最もよいと思う強さと位置でコルセットを締めてください。
- コルセットが肌に当たって痛い場合は、肌着等の上から着用してください。

meetuu ママスリムシングル

品番	種類	適合ウエストサイズ	包装
1490601	S~M	60~75cm	1枚/箱
1490602	M~L	70~90cm	1枚/箱
1490603	L~LL	80~105cm	1枚/箱

やさしく引き締め

立体裁断により体型にフィットしやすくなっています。ほどよく腹部を引き締める着け心地で快適です。

かんたん装着

面ファスナーによりワンタッチで装着できます。忙しい出産後、手軽に使用したい方にオススメです。

こだわり素材

医療現場でお使いいただいている丈夫な素材で、着用時のホールド感、安定感に優れています。

[素材]
 本体：ポリエステル、ポリウレタン、綿、ナイロン
 メッシュ部：ナイロン、ポリウレタン



出産直後のお腹まわりの収縮に使用する圧迫固定帯です。

キレイなママのための
産後美容
コルセット

..... 使用時期の目安

悪露が落ち着いたら

3段階の圧迫固定で腹部をしっかり引き締める!

ママスリム

DOUBLE

産後の リフォームケア	出産当日.....	悪露が 落ち着いたら.....	産後約2ヶ月
マザーベルト (骨盤まわりに)	Pink/White/LIGHT		
ママスリム (ウエスト、お腹まわりに) SINGLE やさしくタイプ		
 DOUBLE しっかりタイプ		

※使用時期は目安です。体調に合わせて着用してください。


装着方法




① 補助ベルト、③上下ベルトを
②メインベルトから外し、ウエ
スト(肘の高さ)にメインベルトの
上側を合わせます。




② 両側からウエストをしばるよう
にして、②メインベルトを留め
ます。

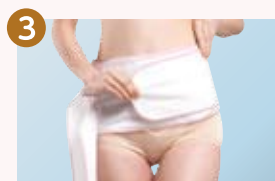

③ 補助ベルトを留めます。

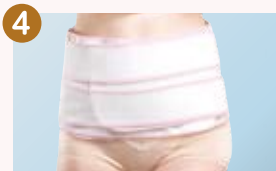

④ 上下ベルトを引っ張って
留めれば完了です。

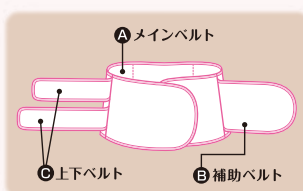

装着のポイント

- 適切な強さと位置には個人差が
ございます。ご自身で最もよい
と思う強さと位置でコルセット
を締めてください。
- コルセットが肌に当たって痛い
場合は、肌着等の上から着用して
ください。

しっかり引き締め

外側2本の上下ベルトで圧迫力を調整して
いただけます。それぞれお好みの力加減
での引き締めが可能です。

3段階の圧迫固定

メインベルト、補助ベルト、2本の上下ベルト
により、3段階でしっかりと圧迫固定するこ
とができます。

こだわり素材

医療現場でお使いいただいている丈夫な
素材で、着用時のホールド感、安定感に
優れています。

[素材]

メインベルト：綿、ナイロン
上下ベルト：ナイロン
補助ベルト：ナイロン、ポリウレタン

meetuu ママスリムダブル

品番	種類	適合ウエストサイズ	包装
1490526	M~L	62~84cm	1枚/箱
1490527	L~LL	72~94cm	1枚/箱



※ 産褥用ショーツ

お産用ナプキンと併用し、出産後の悪露を受け止めるための産褥用ショーツです。




【素 材】身生地：綿57%、ポリウレタン38%、ポリウレタン5%
足口テープ：ナイロン85%、ポリウレタン15%

meetuuマザーショーツ

品番	規格	包装
1299049	ピンク M~L	1枚/袋
1299051	ピンク L~LL	1枚/袋
1299045	グレー M~L	1枚/袋
1299042	グレー L~LL	1枚/袋



サイズ	適合ヒップサイズ
M~L	85cm~105cm
L~LL	105cm~120cm

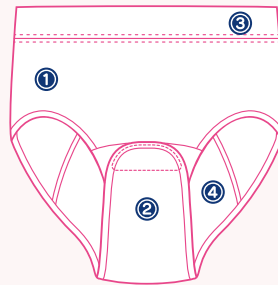

- ① きちんとフィット**
主生地は天竺編みでほどよい伸縮性があり、パッドをズレにくくします。
- ② 快適な履き心地**
留める部分が広いため、面ファスナーが肌に当たりにくくなっています。
- ③ 幅広でお腹にやさしい**
ウエスト部は幅広の伸縮素材。腹部に負担をかけない適度な強さでフィットします。
- ④ モレない安心設計**
防水性の裏地が後ろ側までしっかりガード。足まわりも違和感の少ないストレッチ素材で、すき間ができにくい設計です。

パッドズレしないポケット付きの三方開き式ショーツです。



サイズ	適合ウエストサイズ	適合ヒップサイズ
M~L	60cm~ 95cm	90cm~105cm
L~LL	75cm~120cm	100cm~115cm

【素 材】ポリエステル、レーヨン

肌にやさしい不織布
厚めのしっかり生地で安心

背面ポケット付き
パッドのズレ防止


三方開きタイプ
パッドの付け替えカンタン

meetuu産後ショーツ バース

品番	規格	包装
1490191	M~L	1枚/袋
1490192	L~LL	1枚/袋

清潔に使えて、肌にやさしい

使いきり不織布ショーツ

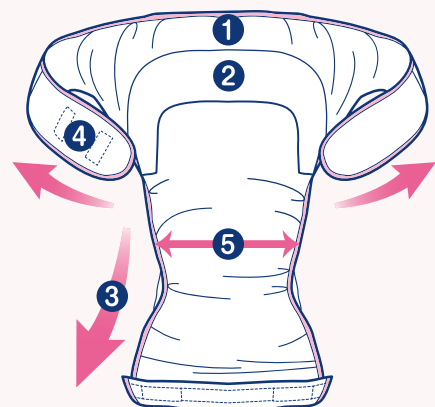

- ① 肌にやさしい不織布** 丈夫でやわらかい、厚めの素材です。
- ② 背面ポケット付き** パッドをしっかり固定し、ズレを防止。
- ③ 三方開きタイプ** 取り外しスムーズで、パッドの付け替えも簡単。
- ④ 面ファスナー** 自由にウエスト調節が可能です。
- ⑤ 幅広設計** 大きいパッドもすっぽり包み込むから安心。

※ 乳 帯



ソフトなつけ心地の前結びタイプの乳帯です。



フリーサイズ


使用目安 産前～授乳中

《素 材》

- 身生地：綿57%、ポリエステル38%、ポリウレタン5%
- レース部：ナイロン70%、ポリウレタン30%

① 便利な前結びタイプ

授乳時などに簡単に前を開けることができ、産前から産後まで長くお使いいただけます。

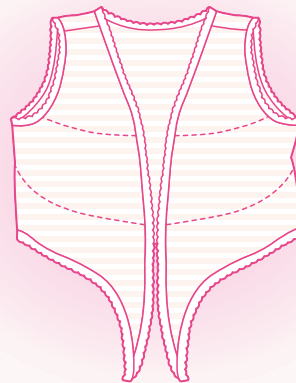

② 快適な着け心地

肩部分が幅広になっており、肩への負担をやわらげながらバストをホールドします。

③ やさしくフィット

ほどよい伸縮性のある生地が、身体にやさしくフィットします。

meetuuマザーブラ

品番	規格	包装
1299050	フリー	1枚/袋

※ 母乳パット



授乳期の母乳を吸収する為のパットです。



装着方法



プリーツだから!!

乳首に優しい

やさしくおっぱいにフィット。プリーツならではの縦立体構造。

たっぷり吸収

従来の母乳パットよりも、プリーツの分だけ表面積が大きいから、母乳をたっぷり吸収できます。

とってもコンパクト

コンパクト包装で、持ち運びも便利。



プリーツを左右に広げてください

瞬間吸収・しっかりキャッチ
高吸水性ポリマー採用



meetuuママに優しい母乳パット

品番	包装	1梱入数
3076030	1枚×30袋/箱	20箱

※ お産セット



meetuuブランドのお産用品は、
使い易さと機能を重視するとともに
デリケートなママとベビーにも安心して
ご利用頂ける製品づくりを目指していきます。

ご要望に応じて不織布製のバッグをお選びいただく
ことができます。

●チャック付きのトートバッグタイプです。

病院・ご施設様の要望に応じた内容をご提案させていただきます。



ハクゾウセットを使用される方のお名前を書き込めるネームラベルを用意しています。セット袋に貼り付けてお使い頂けます。

ネームラベルは、後貼りになります。
貼付場所は、ご自由にお選び頂けます。



※ お産バッグ



ロゴなどをプリントできる不織布製オリジナルバッグを作ることができます。
全22色からお好きな色をお選び頂けます。

※イラストは参考見本です。



お産バッグ **小**

サイズ：
幅280×高さ195×マチ160mm



お産バッグ **中**

サイズ：
幅400×高さ280×マチ230mm



お産バッグ **大**

サイズ：
幅570×高さ400×マチ330mm

デザインについて




※どちらか1面にデザイン可能です。

※1面にご希望のデザイン等をプリントすることが可能です。(ご施設のロゴマークなど)
※ご希望がなければ無地のバッグとなります。

※色は、青・緑・ピンクなど**全22色**の中から1色お選び頂けます。
※色見本については、営業担当にお申し付けください。

お産バッグ用生地見本 (全22色)

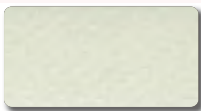

F-001/ホワイト



F-002/ブラック



F-003/カーキ



F-004/ライトグレー



F-005/グレー



F-006/ネイビー



F-007/ベージュ



F-008/グリーン



F-009/ライトグリーン



F-010/オレンジ



F-011/ブラウン



F-012/ライトピンク



F-013/スカイブルー



F-014/レッド



F-019/ピンク



F-022/イエロー



F-023/ライトブルー



F-025/ブルー



F-030/エンジ



F-032/イエローグリーン



F-033/サンドベージュ



F-034/エメラルドグリーン

※色の選択やオリジナルデザインのプリントなどにより、ご施設のオリジナルバッグとなった場合、**1,000個以上**のご注文が必要となります。

※新規でご注文を頂いた場合、初回のみ発注を頂いてから納品まで**2~3ヶ月**かかる場合がございます。
従来のお産バッグから切り替えて頂いた場合、在庫状況によりさらに納期が延びる場合がございます。
予めご了承ください。

※プリントの色数やサイズ等によって価格が変わる場合がございます。

※ U座クッション

体圧分散、通気性に優れた産後向けのU字型クッションです。



ママは、出産後に外陰部の創傷や脱肛を伴い痛みを抱えながら日常生活を行っています。そんなママのために、体圧を分散し通気性が高い、U字型クッションを共同開発しました。



体圧分散、
通気性に優れた
2種類の素材を
採用！！



カラーバリエーション



ネイビー


パールブルー

【他の素材との体圧分散効果の比較】

<55kgの女性における比較>

圧力 (kPa)

	最小圧力	最大圧力	平均圧力	標準偏差
本製品	0.00	16.57	4.26	±4.52
ウレタン製円座	0.00	20.88	4.45	±5.38
ゴム製円座	0.00	25.38	4.59	±5.94

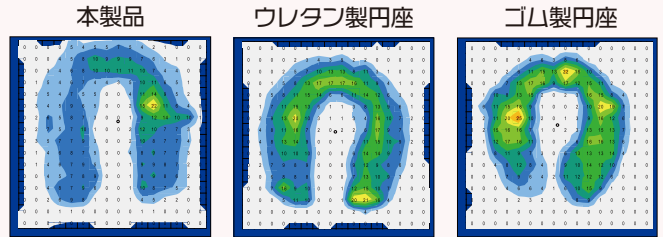

製品特長

体圧分散、通気性に優れた素材(カルファイバー、V-Lap®不織布)を使用しています。

V-Lap®不織布

軽量・快適繊維クッション材

素材：ポリエステル繊維

特徴：通気性、軽量、耐熱性、清潔維持の簡便性。



タテ方向の繊維で、クッション材として非常に優れています。

V-Lap®不織布 取扱い方法

- 生地の特性上、洗濯により多少の縮みが生じることがあります。●40℃までの洗濯機洗いが可能です。●洗濯ネットをご使用ください。●軽く脱水した後、陰干ししてください。●アイロンは低温にてあて布を使用してください。●乾燥機を使用する場合は上限温度80℃以下に設定してください。●洗剤は中性洗剤をおすすめします。●五類感染症への消毒が可能：微温湯で洗浄後すすぎの段階で、0.01~0.02w/v% (100~200ppm) 次亜塩素酸ナトリウム5分間浸漬消毒してください。

カルファイバー

高弾性と体圧分散性を両立した新素材クッション材

素材：ポリプロピレン100%

特徴：高弾性・高反発、通気性、保時性、軽量、耐熱性、清潔維持の簡便性 (0.5w/v% (5,000ppm) 次亜塩素酸ナトリウム、消毒用エタノール、イソプロパノール70%等の薬液に浸して消毒することができます。)



疎水性



通気性



耐久性

優れた透水性と速乾性で簡単に洗えます。また、消毒液・除菌剤などを直接噴霧し、簡単にお手入れできます。

95%以上の空隙構造のため、通気性が高く、ムシにくい素材。

80,000回の圧縮試験をクリアした高い耐久性。

ママらくfit U

品番	規格	包装	1梱入数
2590130	ネイビー	1箱	15箱
2590132	パールブルー	1箱	15箱

※ 使い捨て不織布タオル

肌にやさしく、吸水性に優れた使い捨てドライ不織布タオル。
母乳ケア用やお肌の拭き取りなど多目的にご使用頂けます。



サイズ 30cm×60cm

【素 材】レーヨン 70%、スパンレース 30%

肌ふわり

品番	規格	包装	1梱入数
3300281	30cm×60cm 20枚入	20枚/袋	20袋



- 使い捨て
で清潔
- 肌に
優しい
- 優れた
吸水性

主な使用用途 (ママ、ベビー向けに)

- 母乳ケア用として
- 沐浴、ベビーキャッチ、おむつ替えシート、分娩時の汗拭きとして
- ドライテクニックとして

ドライで使用する場合 お湯や洗浄液で濡らして使用する場合

濡れた肌の拭き取り ママの母乳ケア ベビーのオムツ替えシート 全身の清拭 陰部洗浄時の拭き取り

※ ベビーマットレス

すべて丸い洗いできる2つ折のマットレスです。

2つ折状態 広げた状態

赤ちゃんの成長に合わせて、サイズ展開できるようにになっています。

厚み：60mm 厚み：30mm

※V-Lap®不織布の厚みは約10mmとなります。

肌触りの良いタオル地で、カバーはやさしいベージュ色。
カバー素材：
綿75%、ポリエステル25%

- ノンホルムアルデヒド
- 国産生地
- 国内縫製

ママもラクラク!!
旅行や外出に
便利な不織布
バック付き。

ベビーマットレス『まもる』

品番	規格	包装
1490503	1枚/個	10個

製品特長 ① 忙しいママにとって嬉しい、衛生管理しやすい洗える高反発クッション材を採用!

繊維が三次元状に複雑に絡み合ってきた耐薬品性、耐久性、通気性に優れた洗える高反発クッション材です。
耐久性に優れた洗える、J(ネフ)工業の三次元ファイバースプリング構造体カルファイバ®使用

基本の洗い方 気になったタイミングで気軽に洗えます。季節の変わり目に洗うのがオススメ。

組成：ポリプロピレン

① シャワーで水洗い ② 浴室乾燥 ③ タオル等で水気を拭き取り、陰干し

POINT 念入りに洗いたい場合は、中性洗剤をスポンジ等で泡立てて気になる部分を優しく洗い流してください。

赤ちゃんのおもらし

製品特長 ② 体圧分散クッションでより快適な環境を!

帝人フロントピアのV-Lap®不織布を使用したクッションは、体圧分散に優れており、赤ちゃんにとってより快適な環境となります。

V-Lap®不織布 ヨコ型不織布

※本製品をご使用の場合は、赤ちゃんが寝る側に入れてください。(V-Lap®不織布は交換可能です。)

素材：ポリエステル100%

(※帝人フロントピア(旧ホームページ)より引用)

※ 新生児用保護ガーゼ

安全性や使用感にこだわり、医療ガーゼ基準で作られたガーゼ素材のおくるみです。



カランコエ

ははな

ギュット

※ガーゼ自体には柄は印刷されていません。

【素材】綿100% (蛍光増白剤は含まれておりません。)
【包装】95cmx95cm 6枚重ね 1枚入 (※縫製時の生地サイズ)

おくるみ『まもる』

品番	規格	包装
2590111	パッケージ柄 (カランコエ)	1枚/個
2590112	パッケージ柄 (ギュット)	1枚/個
2590113	パッケージ柄 (ははな)	1枚/個



※ガーゼ自体には柄は印刷されていません。

おくるみ『まもる』10枚入

●10枚入タイプのおくるみとなります。

品番	規格	包装	1梱入数
2590118	10枚入	10枚/個	4箱

製品特長 ①

医療基準で作られた安全性の高いガーゼ

世界保健機関 (WHO) が推奨する出産直後の新生児保護ケアに必要とされる保温などに適しており、一般医療機器 医療ガーゼ基準で作られた安全性の高いガーゼです。



【素材】綿100% (蛍光増白剤は含まれておりません。)
【包装】95cmx95cm 6枚重ね 1枚入 (※縫製時の生地サイズ)

製品特長 ②

赤ちゃんにとって心地良い使用感

縫製後、水洗い加工して生地を柔らかくしています。また、吸水や保温を目的とし、ガーゼを6枚重ねにしており、赤ちゃんに優しいソフトな使用感となっています。適度な厚みとなっていますので、オールシーズンご使用頂くことができます。



製品特長 ③

産学連携でできたこだわりパッケージ

 **近畿大学** ×  **ハクゾウメディカル株式会社**
KINDAI UNIVERSITY HAKUZO

近畿大学 文芸学部との産学連携プロジェクトにより共同開発されたデザインで、パッケージの形状や企画まで考えていきました。

パッケージ柄は3種類ございます。



カランコエ

ははな

ギュット

付属品のおまもりタグは、バッグなどに取り付けて頂くことができ、容器は紙オムツやおもちゃなどを入れるなど他の用途でもご活用頂けます。



デザインコンセプト

- 「まもる」(商品名、付属品のデザイン)
商品名の由来や付属品のデザインとなりました。お母さんが赤ちゃんの健康を願い、付けられた名前です。お守りをイメージしており、日本らしい和柄にしています。
- 「カランコエ」(パッケージ柄)
カランコエという花をイメージしてデザインしました。花言葉は「幸福を告げる」、「あなたを守る」。
- 「ははな」(パッケージ柄)
『母』と『花』を組み合わせた言葉。植物は生命力と自然の安心感で得られると考えデザインしました。
- 「ギュット」(パッケージ柄)
お母さんと赤ちゃんのつながりや絆をイメージしてデザインしました。

※ 沐浴用ボディソープ



肌に悩みがある方や肌の弱い方に使っていただく「泡」にこだわり抜いた、弱アルカリ性の乾燥性敏感肌ボディソープです。



主成分

グリチルリチン酸ジカリウム

保湿成分

ヨクイニン/ドクダミ/クマザサ/セラミド
ヒアルロン酸/コラーゲン

試験基準クリア

- ◎アレルギーテスト 陰性
- ◎皮膚一次刺激性テスト 無刺激性
- ◎眼刺激性テスト 無刺激性
- ※すべての方にアレルギーが起こらないわけではありません

主な使用用途

- ・赤ちゃんの沐浴に
- ・皮膚トラブルの予防・ケアに
- ・皮膚が脆弱になってしまった方に

素あわ物語

品番	規格	1梱入数
3002002	450mL	15本/箱
3002000	3.8L つめかえ用	3個/箱

※ 新生児臍処置セット



新生児のおへそを処置するためのセットです。



✿ セット内容

- サージョン (折りたたみガーゼ) 7.5cm×5cmタイプII 8ply … 10枚
- サージカルテープ 12.5mm巾 …………… 1巻
- 綿棒 紙軸両綿付 長さ7.5cm …………… 10本
- ホワイトパワーB (ベンザルコニウム塩化物溶液) …………… 1ケ
- マミーサラットA (酸化亜鉛) …………… 1ケ

※部材内容につきましては、ご要望に応じて対応させていただきます。

✿ 使用方法例

- ① おへそが落ちていない場合
おへその局所をホワイトパワーB (殺菌・消毒液) で消毒し、その後マミーサラットA (傷口乾燥用散布材) を散布して、ハクゾウサージョン (傷口等の手当用ガーゼ) をあて、サージカルテープで固定してください。
- ② おへそが落ちた場合
沐浴後、ホワイトパワーBを浸した綿棒で、局所を消毒し、マミーサラットAを散布して、ハクゾウサージョンをその上にあて、サージカルテープで固定してください。
- ③ おへそが落ちた後、傷が治るまで (分娩後約2週間) 手当をしてください。

※排便・尿などで、へそ部分が汚れた場合、その都度交換してください。
※おへそが飛び出たり、悪臭のする場合は医師又は薬剤師にご相談ください。

meetuuサンタセット

品番	包装	1梱入数
1450077	1セット/袋	20袋×2箱

※ 清浄綿




毛羽立ちが少ない綿を使用し、水のみを含浸させた高圧蒸気滅菌済の清浄綿です。



7.5cm×7.5cm 2折



成分 水、綿100%

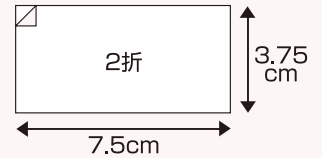

効能 (汚れをおとすことにより) 皮膚を清浄にする。

こんな時にご使用頂けます



授乳時の乳首・乳房に



おしり拭きや局部の清拭に



お口や目のまわりに




手指の清拭に

潤綿 ピュアナップ AG

【化粧品】
販売名:ピュアナップA

品番	種類	規格	包装	1梱入数
1410301	20包入	7.5×7.5cm 2折	20包/箱	40箱


ママとベビーのためにデリケートなお肌に優しい清浄綿です。
毛羽立ちを抑えて肌に優しく、なめらかな肌ざわりのコットンです。

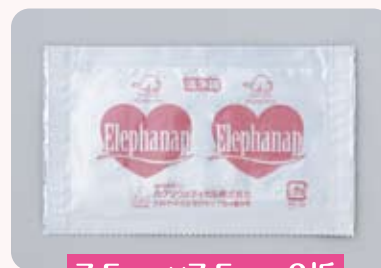

7.5cm×7.5cm 2折



成分及び分量 ベンザルコニウム塩化物液0.01%、医療脱脂綿

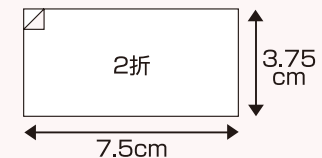

効能又は効果 ● 乳児の皮膚又は口腔の清浄又は清拭
● 授乳時の乳首又は乳房の清浄又は清拭
● 目、性器又は肛門の清浄又は清拭

こんな時にご使用頂けます



授乳時の乳首・乳房に



おしり拭きや局部の清拭に



お口や目のまわりに



手指の清拭に

潤綿 エレファナップ AG

【医薬部外品】
販売名:エレファナップA

品番	種類	規格	包装	1梱入数
1410401	20包入	7.5×7.5cm 2折	20包/箱	40箱

※ 光線療法用アイマスク

光線療法時に UV 光から赤ちゃんの目を守る光線遮断用のカバーです。



赤ちゃんにやさしくぴったりフィット

meetuu アイカバー光線療法用 EOG

品番	種類	規格	包装	1梱入数
1400070	新生児	50mm×125mm	10枚/箱	15箱
1400071	低出生体重児	50mm×105mm	10枚/箱	15箱

シリコン粘着剤使用

特長

- アルミ箔が光線療法時のUV光を遮断します。
- 粘着剤は肌に優しいシリコン粘着剤を使用しています。
- 絆創膏タイプのアイマスクですので、目のまわりにフィットしやすく、簡単に貼って使用することができます。
- シート全面で遮光できるため、貼付位置の調整が容易です。

【基 布】セルロース不織布/アルミシート/レーヨン不織布/シリコン粘着剤/剥離フィルム

【規 格】サイズは新生児用・低出生体重児用の2種類あります。



※ 弾性ストッキング

脚部の血行促進を目的とした弾性ストッキングです。



ネオフラックスS ハイソックスタイプ

【一般医療機器】弾性ストッキング 届出番号13B2X00187000003

ネオフラックスS ストッキングタイプ

【一般医療機器】弾性ストッキング 届出番号13B2X00187000004

- 足底部分に血行状態を観察するための穴を設けています。
- 長さやサイズを判別し易いように足底の穴と上端部を色分けしています。

品番	種類	規格	包装
2700120	ハイソックスタイプ	レギュラーSS	1組/袋×10組/箱
2700121	ハイソックスタイプ	レギュラーS	1組/袋×10組/箱
2700122	ハイソックスタイプ	レギュラーM	1組/袋×10組/箱
2700123	ハイソックスタイプ	レギュラーL	1組/袋×10組/箱
2700124	ハイソックスタイプ	レギュラーLL	1組/袋×10組/箱
2700101	ストッキングタイプ	ショートS	1組/袋×10組/箱
2700102	ストッキングタイプ	ショートM	1組/袋×10組/箱
2700103	ストッキングタイプ	ショートL	1組/袋×10組/箱
2700111	ストッキングタイプ	レギュラーS	1組/袋×10組/箱
2700112	ストッキングタイプ	レギュラーM	1組/袋×10組/箱
2700113	ストッキングタイプ	レギュラーL	1組/袋×10組/箱

足底部分に血行状態を観察するための穴を設けています。穴から容易に足を出すことができますので、製品を脱がずに足の状態を確認することができます。穴の周りは色分けしていますので長さ(ショート・レギュラー)を判別できます。

【素材】ナイロン、スパンデックス

上端部の内側はサイズ(SS~LL)を判別し易いように色分けしています。(ハイソックスタイプ)
※写真は上端部を折り曲げた状態です。

- 適切な位置が分かりやすいように、製品の踵部にブルーの目印を設けています。足の踵にくるように位置を合わせて履きます。
- つま先部分は不要な圧迫力を避ける為、薄手の編み方になっています。



※ ギフトボックス



出産のお祝いとして、赤ちゃんのために考えた贈り物です。
産婦人科の退院時のプレゼントなどに。




【内容物】

- おくるみ『まもる』(1種類)：1個
- 素あわ物語 (ボディソープ)：1本
- meetuu ロゴ入りハンカチガーゼ：1枚
- はなこキーホルダー (数量限定)：1個
- リーフレット (A5 サイズ 2折)：1枚

meetuu ベビーギフトボックス

品番	包装	1梱入数
3076039	1箱	10箱

感染対策のために手指消毒用の製品をまとめてご用意しました。
病院の売店で患者やお見舞い家族向けのプレゼントなどに。

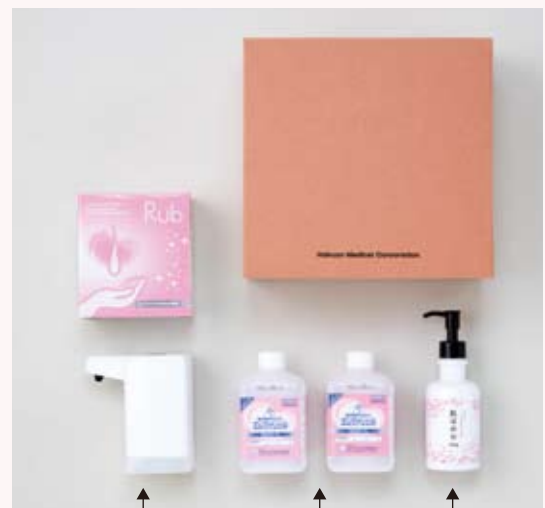

【内容物】

- ハクゾウオートディスペンサー Rub：1個
- エレファジェル 350mL つけかえ用：2本
- ハクゾウハンドケアジェル肌ほのか：1本
- リーフレット (A5 サイズ 2折)：1枚

ハクゾウ オートディスペンサーRub (非接触式ディスペンサー)
エレファジェル 350mL (80%エタノール)
ハンドケアジェル 肌ほのか (パリアクリーム)

手をまもる消毒ギフトボックス

品番	包装	1梱入数
3076040	1箱	10箱

產科製品一覽

産科製品一覧

妊娠・出産前のサポートに

品名	品番	種類・規格	包装	1梱入数	JANコード
ママらくfitソックス	3000079	ネイビー (21cm~23cm) 1足入	1箱	10箱/4中箱	4958286715919
ママらくfitソックス	3000080	ネイビー (23cm~25cm) 1足入	1箱	10箱/4中箱	4958286715926
meetuuハートミーベルト	3147813	幅60mm×長さ1.25m ピンク1本/ブルー1本	2本/袋	50袋/ケース	4958286712499
ハクゾウ検診用シート (ピンク)	3037085	ロールタイプ 370mm×36m	1本/箱	20本	4958286712208

分娩キット関連

品名	品番	種類・規格	包装	1梱入数	JANコード
バースヘルパー	1420025	滅菌 90cm×75cm	1枚/袋	20袋	4958286060781
バースヘルパー	1420029	ポリ袋入 90cm×75cm	1枚/袋	40袋	4958286706214
バースヘルパー ピンク	3906017	ポリ袋入 90cm×120cm	1枚/袋	20袋	4958286706597
バースヘルパー ピンク	3906020	滅菌 90cm×120cm	1枚/袋	20袋	4958286713212

出産後のママのサポートに

品名	品番	種類・規格	包装	1梱入数	JANコード
meetuu 産後パッドゴールド	1400037	L1P 18cm×50cm	1枚/袋	100袋	4958286709383
meetuu 産後パッドゴールド	1400038	M1P 12cm×33cm	1枚/袋	300袋	4958286709390
meetuu 産後パッドゴールド	1400039	M10P 12cm×33cm	10枚/袋	25袋	4958286709345
meetuu 産後パッドナチュラル	1400014	L 15cm×52cm	1枚/袋×5袋	50袋	4958286709352
meetuu 産後パッドナチュラル	1400015	M 12cm×32cm	1枚/袋×10袋	50袋	4958286709369
meetuu 産後パッドナチュラル	1400016	S 7.5cm×23cm	1枚/袋×20袋	50袋	4958286709376
meetuu 産後パッドワイド	3140054	LL 32cm×56cm	1枚×2袋/外袋	-	4958286709314
meetuu 産後パッドワイド	3140055	L 29cm×49cm	1枚×5袋/外袋	-	4958286709321
meetuu 産後パッドワイド	3140056	M 17cm×36cm	1枚×10袋/外袋	-	4958286709338
meetuu マザーベルト	1490510	ホワイト S~M 60cm~85cm	1枚/箱	-	4958286520223
meetuu マザーベルト	1490511	ホワイト M~L 85cm~105cm	1枚/箱	-	4958286520216
meetuu マザーベルト	1490512	ホワイト L~LL 105cm~120cm	1枚/箱	-	4958286520209
meetuu マザーベルト	1490621	ピンク S~M 60cm~85cm	1枚/箱	-	4958286706016
meetuu マザーベルト	1490622	ピンク M~L 85cm~105cm	1枚/箱	-	4958286706023
meetuu マザーベルト	1490623	ピンク L~LL 105cm~120cm	1枚/箱	-	4958286706030
meetuu マザーベルトLIGHT	1490520	ブラック S~M 60cm~85cm	1枚/箱	-	4958286709567
meetuu マザーベルトLIGHT	1490521	ブラック M~L 85cm~105cm	1枚/箱	-	4958286709574
meetuu マザーベルトLIGHT	1490522	ブラック L~LL 105cm~120cm	1枚/箱	-	4958286709581
meetuu マザーベルトSUGU	3108201	M~L (幅60mm×長さ1.35m)	1本/袋	-	4958286709017
meetuu マザーベルトSUGU	3108202	L~LL (幅60mm×長さ1.55m)	1本/袋	-	4958286709024
meetuu ママスリムシングル	1490601	S~M 60cm~75cm	1枚/箱	-	4958286705613
meetuu ママスリムシングル	1490602	M~L 70cm~90cm	1枚/箱	-	4958286705620
meetuu ママスリムシングル	1490603	L~LL 80cm~105cm	1枚/箱	-	4958286705637
meetuu ママスリムダブル	1490072	M~L 62cm~84cm	1枚/箱	-	4958286711737
meetuu ママスリムダブル	1490073	L~LL 72cm~94cm	1枚/箱	-	4958286711744
meetuu マザーショーツ	1299049	ピンク M~L	1枚/袋	-	4958286711126
meetuu マザーショーツ	1299051	ピンク L~LL	1枚/袋	-	4958286711652
meetuu マザーショーツ	1299045	グレー M~L	1枚/袋	-	4958286711119
meetuu マザーショーツ	1299042	グレー L~LL	1枚/袋	-	4958286709680
meetuu 産後ショーツパース	1490191	M~L	1枚/袋	-	4958286709048
meetuu 産後ショーツパース	1490192	L~LL	1枚/袋	-	4958286709055
meetuu マザーブラ	1299050	フリー	1枚/袋	-	4958286711119
meetuu ママに優しい母乳パット	3076030	30枚入	1個	-	4958286503059
ママらくfitU	2590130	ネイビー 1個入	1箱	15箱/ケース	4958286714813
ママらくfitU	2590132	パールブルー 1個入	1箱	15箱/ケース	4958286714837
肌ふわわり	3300281	30cm×60cm 20枚入	1袋	20枚/袋×20袋	4958286715261

ベビーのサポートに

品名	品番	種類・規格	包装	1梱入数	JANコード
ベビーマットレス『まもる』	1490503	1枚/個	10枚/個	-	4958286712710
おくるみ『まもる』	2590111	パッケージ柄 (カランコエ)	1枚/個	-	4958286712505
おくるみ『まもる』	2590112	パッケージ柄 (ギョット)	1枚/個	-	4958286712512
おくるみ『まもる』	2590113	パッケージ柄 (ははな)	1枚/個	-	4958286712529
おくるみ『まもる』 10枚入	2590118	10枚入	10枚/個	4箱	4958286712611
素あわ物語	3002002	450mL	450mL/本	15本/ケース	4958286715438
素あわ物語	3002000	3.8L つめかえ用	3.8L/個	3個/ケース	4958286715346
meetuu サンタセット	1450077	-	1セット/箱	20袋×2箱	4958286067148
潤綿 ピュアナップ	1410301	20包入 7.5×7.5cm 2折	20包/箱	-	4958286706054
潤綿 エレファナップ	1410401	20包入 7.5×7.5cm 2折	20包/箱	-	4958286706078
meetuu アイカバー-光線療法用	1400070	新生児 50mm×125mm	10枚/箱	15箱	4958286080024
meetuu アイカバー-光線療法用	1400071	低出生体重児 50mm×105mm	10枚/箱	15箱	4958286080031

その他製品

品名	品番	種類・規格	包装	1梱入数	JANコード
ネオフラックスSハイソックスタイプ	2700120	レギュラーSS	1組/袋	-	4958286712208
ネオフラックスSハイソックスタイプ	2700121	レギュラーS	1組/袋	-	4958286410272
ネオフラックスSハイソックスタイプ	2700122	レギュラーM	1組/袋	-	4958286410289
ネオフラックスSハイソックスタイプ	2700123	レギュラーL	1組/袋	-	4958286410296
ネオフラックスSハイソックスタイプ	2700124	レギュラーLL	1組/袋	-	4958286410302
ネオフラックスSストッキングタイプ	2700101	ショートS	1組/袋	-	4958286410203
ネオフラックスSストッキングタイプ	2700102	ショートM	1組/袋	-	4958286410210
ネオフラックスSストッキングタイプ	2700103	ショートL	1組/袋	-	4958286410227
ネオフラックスSストッキングタイプ	2700111	レギュラーS	1組/袋	-	4958286410234
ネオフラックスSストッキングタイプ	2700112	レギュラーM	1組/袋	-	4958286410241
ネオフラックスSストッキングタイプ	2700113	レギュラーL	1組/袋	-	4958286410258

出産祝いなどに

品名	品番	種類・規格	包装	1梱入数	JANコード
meetuu ベビーギフトボックス	3076039	-	1箱	10箱/ケース	4958286718040
手をまもる消毒ギフトボックス	3076040	-	1箱	10箱/ケース	4958286718057

本 社

〒540-0025 大阪府大阪市中央区徳井町2丁目4番9号
TEL. 06-6942-0451(代) FAX. 06-6945-0539



各事業所所在地

東京支店

〒136-0082 東京都江東区新木場2丁目9番7号
TEL. 03-3522-6720(代) FAX. 03-3521-1319

北大阪支店

〒566-0064 大阪府摂津市鳥飼中2丁目6番26号
TEL. 072-653-4045(代) FAX. 072-653-4046

南大阪支店

〒584-0031 大阪府富田林市寿町4丁目8番15号
TEL. 0721-20-2900(代) FAX. 0721-25-3870

仙台営業所

〒981-1226 宮城県名取市植松字田野部93-1
TEL. 022-393-7434(代) FAX. 022-393-7435

関東営業所

〒123-0861 東京都足立区加賀1丁目19-9
TEL. 03-5809-4780 FAX. 03-5809-4781

西東京営業所

〒192-0045 東京都八王子市大和田町1丁目22番4号
TEL. 042-646-0451(代) FAX. 042-646-0452

三河営業所

〒444-0854 愛知県岡崎市六名本町5-3
TEL. 0564-54-5447(代) FAX. 0564-54-5448

三重営業所

〒510-0064 三重県四日市市新正4丁目15番3号
TEL. 059-350-3844(代) FAX. 059-350-3845

京都営業所

〒612-8123 京都府京都市伏見区向島立河原町75番2号
TEL. 075-603-4826(代) FAX. 075-603-4827

大阪中央営業所

〒540-0029 大阪府大阪市中央区本町橋3番6号
TEL. 06-6943-6118(代) FAX. 06-6943-6106

神戸営業所

〒651-2122 兵庫県神戸市西区玉津町高津橋591-1
TEL. 078-940-8975 FAX. 078-940-8976

阪神営業所

〒658-0023 兵庫県神戸市東灘区深江浜町134番地
TEL. 078-262-1634(代) FAX. 078-411-4110

広島営業所

〒731-3167 広島県広島市安佐南区大塚西5丁目3番27号
TEL. 082-849-4188(代) FAX. 082-849-4190

福岡営業所

〒812-0013 福岡市博多区博多駅東2丁目9番25号 アバンダント84 302号室
TEL. 092-481-5921(代) FAX. 092-481-5922

熊本営業所

〒860-0863 熊本県熊本市中央区坪井6丁目8番1号
TEL. 096-345-2253(代) FAX. 096-345-2256

札幌駐在所

〒001-0909 北海道札幌市北区新琴似9条7丁目8番19号
TEL. 011-788-8009 FAX. 011-788-8027

北陸駐在所

〒920-0022 石川県金沢市北安江2丁目13-30 クロスピア北安江505
TEL. 076-225-8013(代) FAX. 076-225-8014

高松駐在所

〒761-0075 香川県高松市多肥下町1524-7 コンフォルテ田井302号室
TEL. 087-813-7416 FAX. 087-813-7417

愛媛駐在所

〒794-0081 愛媛県今治市阿方260-8
TEL. 0898-52-7656 FAX. 0898-52-7657

鹿児島駐在所

〒890-0082 鹿児島県鹿児島市紫原1丁目58-23 レグルスハイム101号
TEL. 099-296-1925 FAX. 099-296-1926

沖縄駐在所

〒900-0003 沖縄県那覇市安謝1丁目13番19号 エミメントヒロ106号
TEL. 098-941-5320(代) FAX. 098-941-5321

美原物流センター

〒587-0012 大阪府堺市美原区多治井7番地
TEL. 072-361-1423(代) FAX. 072-361-1424

阪神物流センター

〒658-0023 兵庫県神戸市東灘区深江浜町134番地
TEL. 078-262-1734(代) FAX. 078-411-4110

テクニカルセンター

〒584-0031 大阪府富田林市寿町4丁目8番15号
TEL. 0721-20-2902(代) FAX. 0721-25-3805

ハクゾウメディカルテクノス株式会社

熊本工場

〒861-1367 熊本県菊池市七城町流川205
TEL. 0968-25-3793(代) FAX. 0968-25-3913

福島工場

〒976-0005 福島県相馬市光陽2丁目2番1号
TEL. 0244-26-5148(代) FAX. 0244-38-6625

Hakuzo Medical Asia Co., Ltd

689 Bhiraj Tower at EmQuartier Level 30,
Sukhumvit Rd Soi 35, Klongtan Nuea Bangkok Vadhana 10110
TEL. +66-2017-2800

QRコードはコチラ

ホームページ用
QRコード



LINE用
QRコード



Instagram用
QRコード



facebook用
QRコード



お客様相談窓口
フリーダイヤル

0120-50-0451

<https://www.hakuzo.co.jp/>