



口腔ケア製品カタログ

ORAL CARE CATALOG



ハクゾウメディカル株式会社



ここ笑み®

HAKUZO NURSING CARE

これからも、ずっと笑顔。

介護ブランド「ここ笑み」は、

介護する人はもちろん、

される人にも同じように使いやすく、

快適に感じてもらえるような製品を開発してまいりました。

介護の時間を少しでもここちよいものにし、

関わる人すべてが笑顔となれる時間をつくりたい。

それが「ここ笑み」の願いです。



ここ笑み(ここえみ)は心と身体へのやさしさを考えた介護製品ブランドです。

口腔ケアとは？

「**口腔ケア**」とは、口腔内をきれいにしたり、

口腔機能（食べる・話す・笑う・呼吸するなど）を保つためのケアのことです。

生活全般に関わり、人とのコミュニケーションを広げ、いきいきとした生活を送るために大切です。



口腔ケアの流れ 口腔ケアは毎日が基本です。

介護の口腔ケア

高齢者が元気で過ごすために、口腔内をキレイに保つことは重要です！

口腔内の汚れにより、肺炎の一種である「**誤嚥性肺炎**」ごえんせいはいえんをまねくリスクが高まります。

口腔内をキレイにすることは、誤嚥性肺炎の予防にもなります。

日常的な口腔ケアの方法に関する動画はこちら



① 口の中の観察

まず、口の中の状態を把握します。

② 保湿ケア

保湿ケアが必要な方：口の中が乾燥している/乾燥した汚れがこびりついている

口の中が乾燥した状態でケアを始めると、粘膜を傷つけてしまうので、ケア前に保湿しましょう。(P3、P7 参照)

③ お口みがき(粘膜のケア)

お口みがきが必要な方：粘膜(舌や上あごなど)が汚れている/食べかすなどが口の中に残っている

食べかす・舌の汚れ・痰などを取り除きます。(P4、P5、P6、P7、P8、P9 参照)

④ 歯みがき

歯みがきが必要な方：歯がある

口腔ケアの基本です。(P6 参照)

⑤ 保湿ケア

保湿ケアが必要な方：口の中が乾燥しやすい

口の中が乾燥しやすい方は、口腔ケアの仕上げに保湿しましょう。(P3、P7 参照)

その他 入れ歯の清掃：入れ歯がある場合は、清掃します。

終了

爽快 お口うるるジェル

お口の汚れを軟化させ絡め取る口腔ケア用ジェルです。
保湿成分ヒアルロン酸Naを配合しています。

製品特長

- 汚れをすばやく軟化させて絡め取る。
- 粘性が高く垂れにくい。
- 流動性が良いため塗り広げやすい。
- 保湿成分ヒアルロン酸Naを配合し、しっかり保湿。
- リアルな風味を再現、好みによって2種から選択可能。
- 刺激が少ないパラベンフリー処方。




成分

基剤：水/湿潤剤：グリセリン、PG/甘味剤：キシリトール、サッカリンNa/保湿剤：ヒアルロン酸Na/矯味剤：グリチルリチン酸2K/清涼剤：メントール/粘結剤：ヒドロキシエチルセルロース、キサンタンガム、セルロースガム/保存剤：セチルピリジニウムクロリド、安息香酸Na/可溶化剤：PEG-60水添ヒマシ油/pH調整剤：クエン酸、クエン酸Na/清掃助剤：ポリリン酸Na/着香剤：香料

品番	規格	包装	1梱入数
3901180	はちみつレモン風味 80g	1本/箱	60箱
3901181	パインアップル風味 80g	1本/箱	60箱


使用方法

ジェルをグローブやお皿などに適量取り、まんべんなく伸ばしながらスポンジブラシ、歯ブラシ等につけます。歯および口腔内を清掃した後に、吐き出すか、拭き取ってください。口腔内のマッサージや乾燥汚れの清掃にもご使用いただけます。

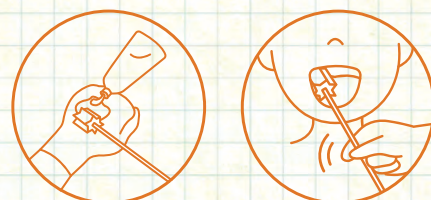


はちみつレモン風味

はちみつの甘さと
さわやかなレモンの風味

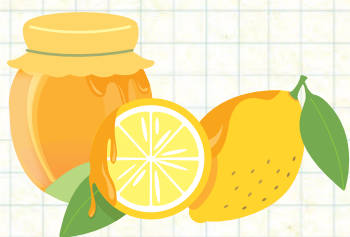

パインアップル風味

パインとグリーンアップルの
さわやかな風味

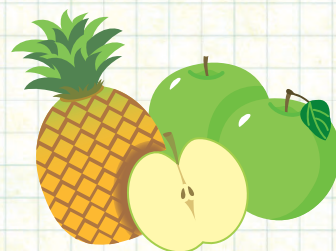

使用動画はこちら



楽しみながらケアを受けていただけるように、リアルな風味を再現しています

化粧品

爽快 お口すっきりウエットシート

口腔内の清潔と口臭予防に使える口腔ケア用ウエットシートです。
デコボコシートがお口の汚れをしっかりキャッチします。


製品特長

- デコボコ構造がお口の汚れをしっかり拭き取る。
- コットン100%のやわらかい素材を使用。
- 丈夫な厚手のシートで引っ張りに強く破れにくい。
- お口の汚れを軟化して除去する。
- 保湿成分トレハロースを配合し、しっかり保湿。
- 刺激が少ないアルコールフリー処方。
- 爽やかなミント風味で口腔内をリフレッシュ。
- 災害時の歯みがき代わりに。

緑色：繊維の積層

ピンク色：ガーゼ綿糸


イメージ図

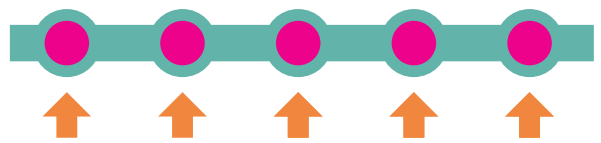


ガーゼ綿糸のデコボコが
汚れを拭き取る

使用方法

シートを指に巻いたり、折りたたんだりして口腔内の汚れを拭き取ります。
歯と歯茎、口腔粘膜のマッサージにもご使用できます。舌の汚れの清拭・清浄
にもご使用できます。

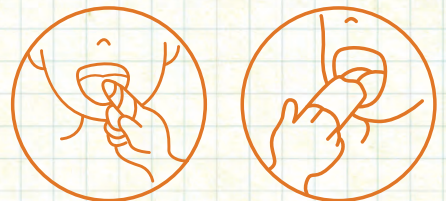

使用動画はこちら

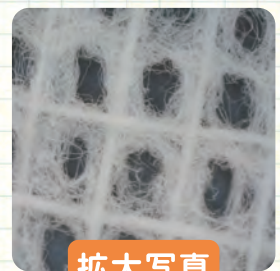

拡大写真

ガーゼと不織布を掛け合わせた
「ハイブリッド不織布」を使用

ミント風味
すっきり爽やかな
ミントの風味

成分

水、PG、DPG、PEG-60水添ヒマシ油、グリセリン、トレハロース、
キシリトール、メントール、クエン酸、クエン酸Na、セチルピリジウム
クロリド、メチルパラベン、プロピルパラベン、グリチルリチン酸2K、
アセスルファミンK、スクラロース、香料

品番	規格	包装	1梱入数
1156993	150mm×200mm ミント風味	50枚/個	40個


爽快 お口すっきりドライシート

口腔内の清掃や舌のお手入れに使える口腔ケア用ドライシートです。

デコボコシートがお口の汚れをしっかりキャッチします。

製品特長

- デコボコ構造がお口の汚れをしっかり拭き取る。
- コットン100%のやわらかい素材を使用。
- 丈夫な厚手のシートで引っ張りに強く破れにくい。
- 舌のお手入れにも使用しやすいサイズ。

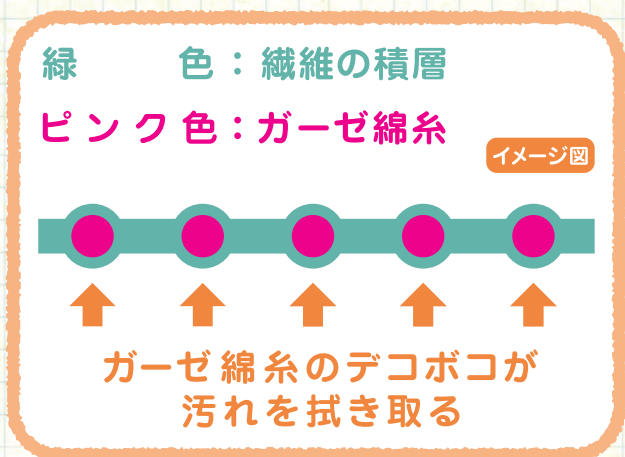

品番	規格	包装	1梱入数
1156994	80mm×220mm 2折	150枚/箱	40箱

使用方法

化粧箱からシートを1枚ずつ取り出し、口腔内の汚れを拭き取ります。

シートを指に巻いたり、折りたたんだりしてご使用ください。

歯と歯茎、口腔粘膜のマッサージにもご使用できます。

舌の汚れの清拭・清浄にもご使用できます。

使用動画はこちら



ミシン目を切り取り、
背面からも
取り出し可能です。



拡大写真

ガーゼと不織布を掛け合わせた
「ハイブリッド不織布」を使用

爽快 お口キレイぐるっとブラシ

360度設計のため角度を選ばず磨きやすい、介助者にとって使いやすい形状です。
毛細管現象で汚れを吸い上げ、除去しやすい!!

製品特長

○標準的な歯ブラシのように、擦って取るのではなく、20倍以上の毛数による毛細管現象[※]で毛束の中に汚れを吸着することができます。

※毛細管現象
細い管の間を液の表面張力の作用により、吸い上げる現象のことです。
毛束が多いほど、より吸い上げます。

- やわらかい極細毛を使用。
- 毛先が丸く、粘膜や歯茎にやさしい。
- 舌ブラシとしても兼用できます。

使用動画はこちら



品番	規格	包装	1梱入数
3118067	ブラシ径 15mm ホワイト	30本/箱	16箱

柄の材質	ポリプロピレン	毛の硬さ	やわらかめ
毛の材質	ナイロン	耐熱温度	90℃

磨き方

回転させずに、ふつうの歯ブラシと同じように、縦磨き・横磨きで磨いてください。1本ずつ磨くイメージです。

前歯




ふつうの歯ブラシと同じように、横磨きか、縦磨きで磨きます。歯並びが良くない方には縦磨きをおすすめします。

前歯の裏側



毛先がきっちり当たりにくいのが前歯の裏側です。円筒ヘッドで大量の極細毛があるため、汚れている部分にぴったりフィットします。

犬歯

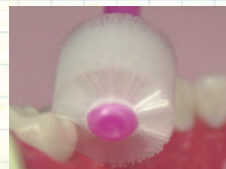

凹凸が多い犬歯の部分は、縦磨きで磨きます。裏側の傾斜部分も、一気に磨き上げることが可能です。

前歯裏側の上下同時磨き



円筒ヘッドなので、上下同時に磨くことも可能です。回転させずに横磨きで磨いてください。

奥歯



内側側面は、ハンドルを斜めに立てて、斜め方向に小刻みに動かして磨きます。

奥歯の上下同時磨き



軽く噛むようにしてトップを磨きます。奥は開き気味に、手前は閉じ気味といったように、あごの角度を徐々に変えていくのがポイントです。

歯茎ブラッシング



肌をパティングするのと同様に、歯茎も軽くブラッシングすることをおすすめします。

舌クリーニング




軽く舌を突き出し、ブラシを舌にのせ、力を入れ過ぎないようにして手前に引き出します。

爽快スポンジ レギュラータイプ

歯磨きやうがいができない方へのケアとして適した製品です。

製品特長

- 切り込みが6箇所あるスポンジ形状なので、細かい部分にフィットし、汚れを取り除きやすい。
- きめ細かいスポンジを使用していますので、口腔内のあたりが柔らかい。
- 50本入スタンドパウチで持ち運びに便利。
- 在宅介護向けに適した10本入タイプ(プラスチック軸のみ)もございます。

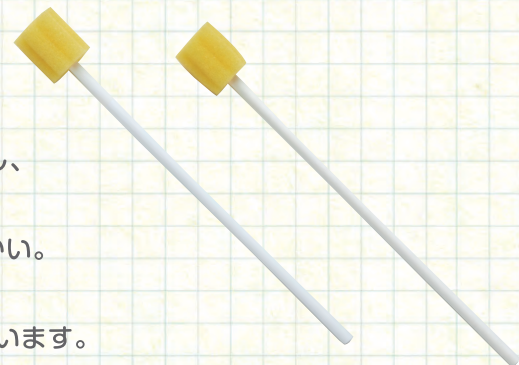

プラスチック軸




耐水性があるため、水や液剤を浸して使用しやすくなっています。軸を噛む方、唾液の多い方に適しています。

紙軸



操作性が良いため、固まった汚れのある方に適しています。海洋プラスチックごみ問題からプラスチックの削減に寄与します。

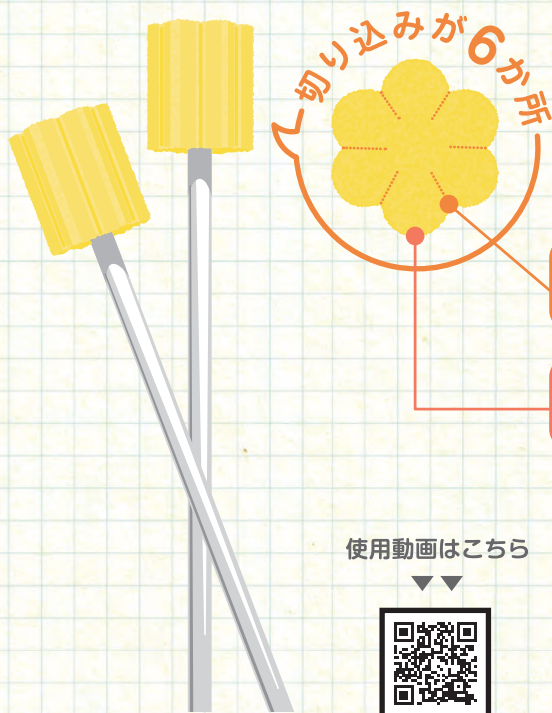

6つの切り込みで細部の汚れまでキャッチ

凹部分に切り込みがあるため、

- ① 回転させることでスポンジが細かい部分にフィットし、汚れを取り除きやすくなっています。
- ② きめ細かいスポンジを使用しており、口腔内のあたりが柔らかくなっています。

品番	規格	包装	1梱入数
1240973	レギュラー 紙軸	50本×6袋/箱	6箱
1240976	レギュラー プラスチック軸	50本×6袋/箱	6箱
3118060	レギュラー プラスチック軸 10本入	10本×20袋/箱	6箱



紙軸 50本入



プラスチック軸 50本入




プラスチック軸 10本入

爽快綿棒ハーフ

片側巻綿タイプで、巻綿部は広範囲のケアをし易いドラム型です。

製品特長

- 太くて丈夫な紙軸を使用しています。
- 頬粘膜のような広範囲のケアをしやすくする為ドラム型にしました。

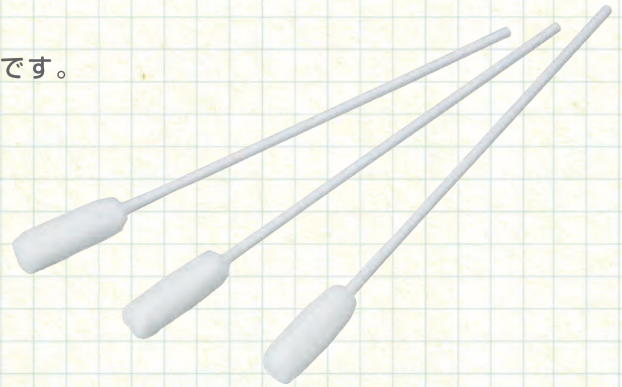

品番	規格	包装	1梱入数
1240012	紙軸片軸	200本/箱	20箱

爽快綿棒サンクスワブ

口腔内の清掃、マッサージに好適な凹凸タイプの口腔清拭用綿棒です。



製品特長

- 5つの凹凸綿体が口腔内の汚れ除去(拭き取り)に最適です。
- しっかりした巻きで型崩れしにくく、ほつれにくい綿体です。
- 硬質の紙軸を使用しているので折れにくくなっています。
- 保湿ジェルの塗布にご使用できます。
- 適度な吸水量なので、凍らせてアイスマッサージ用としてもご使用できます。

サイズ

- 全長(綿体+紙軸): 約150mm
- 綿体の長さ: 約25mm
- 綿体の直径: 約12mm(最大)



デコボコ綿体が汚れをキャッチ

品番	規格	包装	1梱入数
3300039	凹凸タイプ綿棒 紙軸	1本/袋×50本/箱	20箱

化粧品

爽快 ハクゾウマウスクリーンA

液剤を含浸させた器質的・機能的口腔ケア用の綿棒です。

製品特長

- 液剤を含浸しているのので、開封後即ご使用できます。
- 香料入りで清涼感が得られます。
- 綿棒を凍らせてアイスマッサージ用としてもご使用できます。



4つのポイント

その1

○準備不要

水やコップなどは不要です。
水場のない場所でも気軽にご使用できます。
(ベッドサイド、訪問看護など)

その2

○誤嚥のリスクが少ない

綿棒からは液剤が少しずつ染み出るため、誤嚥の危険性が少ないです。
歯ブラシ・スポンジの場合、しぼって水分をきった後、更にティッシュなどで水分を除去する必要があります。

その3

○味付き

液剤に味があるため、楽しみながら口腔ケアができます。
楽しさが口腔ケアの継続につながります。
味覚を刺激する訓練にもなります。
味を楽しむことが食べることに對する意欲の向上につながります。

その4

○アイスマッサージが簡単

個包装のため、冷蔵庫で凍らせておくとうすぐにご使用できます。
製氷機の細菌による汚染を気にせず、清潔な口腔ケアが可能です。
嚥下反射を誘発させるアイスマッサージは、繰り返し行うことが重要です。

品番	規格	包装	1梱入数
1290092	No.12 レモン風味	1本×25袋/箱	40箱
1290093	No.13 レモン風味	1本×25袋/箱	40箱
1290095	No.12 ブルーベリー風味	1本×25袋/箱	40箱

成分


水、グリセリン、ソルビトール、
安息香酸Na、ベンザルコニウムクロリド、
ハッカ油、香料

使用動画はこちら



使用手順


- ① 袋を開封して綿棒を取り出します。
- ② 綿棒を口の中に入れて清拭します。

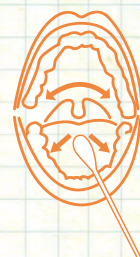

爽快 よりそ歯ブラシ

小さいヘッドと特殊な柄の形状で使用しやすい介護用歯ブラシです。


やわらかめ 超やわらかめ

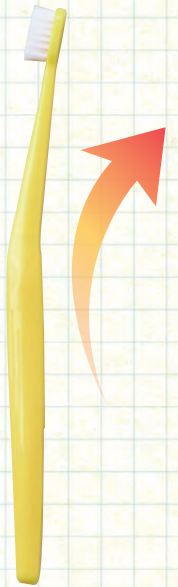

製品特長


- 口腔内に入りやすい、外側に沿ったネック形状です。
- ヘッドが小さく、1本ずつ歯を磨くことができます。
- 対象者によって毛のやわらかさを選ぶことができます。
- ペンダグリップしやすい六角形ハンドルを採用しています。

【従来の歯ブラシ】

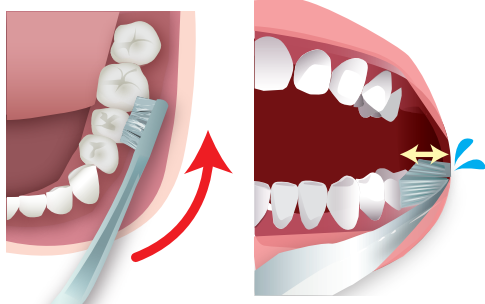

お口の奥に入れようとすると頬が引っ張られてしまう

【よりそ歯ブラシ】

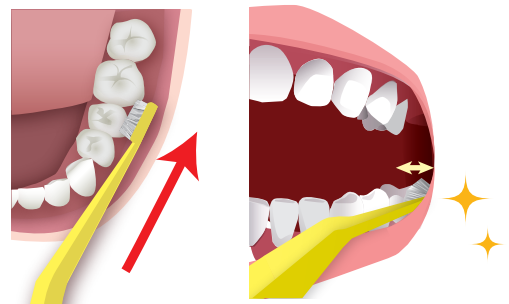

歯ブラシが外側に反っているのでお口の中に入れやすい

1. 選べる毛のやわらかさ

口腔内の状況によって使い分けられる
2種類のやわらかさ



超やわらかめ

痛みに敏感な方や
歯肉炎の方におすすめ



毛の色：ホワイト / ハンドル色：オレンジ・イエロー



やわらかめ

健常な歯肉の方におすすめ
プラークをかき取りやすい




毛の色：ブルー / ハンドル色：ブルー・グリーン

2. 奥歯の裏の汚れもスッキリ

奥歯の裏まで届く極小・薄型ヘッド！

3. 適度な力でやさしく磨ける

ペンダグリップしやすい六角形ハンドル！
余計な力がかかりにくく、やさしく丁寧に磨ける！

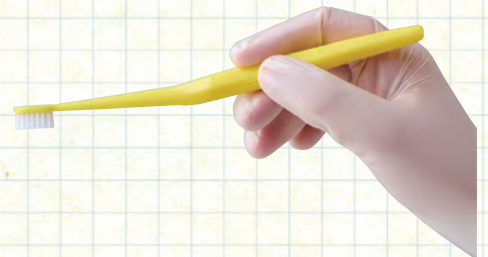

柄の材質	ポリプロピレン	耐熱温度	80℃
毛の材質	ナイロン		

品番	規格	包装	1梱入数
3118054	超やわらかめ 2本入	12個/箱	12箱
3118055	やわらかめ 2本入	12個/箱	12箱

ピカッと爽快吸いとーる スタータキット

吸引・清掃・ライトを同時に使用できる口腔ケア用セットです。

製品特長

- 吸引チューブ・ブラシ・ライトを片手で同時に使用可能です。
- 超高輝度ライトを使用しており、口腔内の細部まで光が届きます。



- スリットに専用の歯ブラシまたはスポンジを装着し、吸引チューブに繋いだら準備完了です。
- 機械部分は清拭可能です。

指先1つで吸引のON・OFFを簡単切り替え！



品番	規格	1 梱入数
1850830	—	60個 (6個/箱×10)

3つのポイント

その1


- 超高輝度ライト
口腔内の細部まで光が届くので汚れの取り残し・出血見逃し予防に繋がります。

その2

- 極ふわ歯ブラシ
舌ブラシに使用されるような太さ約 0.076mm の柔らかい毛を使用しているため、口腔内のあたりがやさしいです。

その3

- 小さめスポンジ
開口困難な方にも適した小さめヘッド&丸い先端で口腔内に入りやすく、ギザギザ形状&密度高めのスポンジで汚れをしっかりと取り取れます。

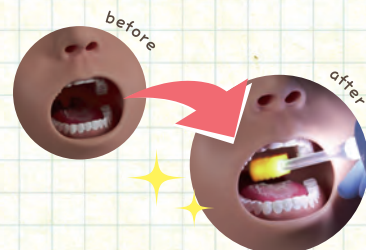

セット内容

- ①専用ペンライト×1本
 - ②ピカッと爽快吸いとーる歯ブラシ×1本
 - ③ピカッと爽快吸いとーるスポンジ×1本
 - ④クリップ×1個
 - ⑤ストラップ×1個
 - ⑥単四アルカリ乾電池×1本
- ※本製品に吸引器は付属しておりません。

ピカッと爽快吸いと～るシリーズ

ピカッと爽快吸いと～る スターターキット専用の
付け替え用歯ブラシ・スポンジです。
※本製品に吸引器は付属しておりません。

スポンジ

歯ブラシ



種類	品番	規格	1 梱入数
スポンジ	3118065	50本入	300本 (50本/箱×6)
歯ブラシ	3118066	50本入	300本 (50本/箱×6)

爽快吸いと～るシリーズ

吸引器専用の付け替え用歯ブラシ・スポンジです。
※本製品に吸引器は付属しておりません。


スポンジ

歯ブラシ



スポンジタイプ

歯ブラシタイプ

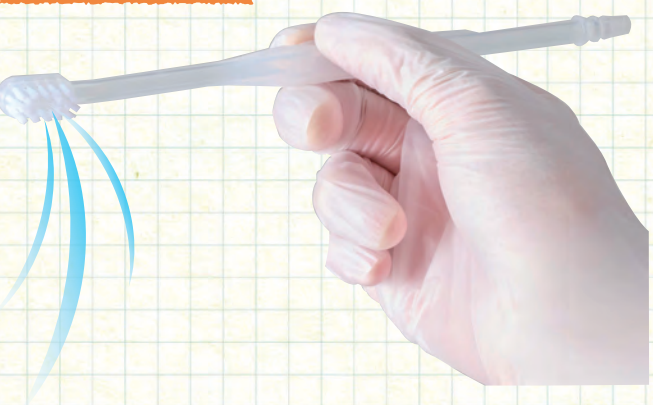

種類	品番	規格	1 梱入数
スポンジ	3118063	50本入	300本 (50本/箱×6)
歯ブラシ	3118064	50本入	300本 (50本/箱×6)

● 口腔ケアに関連する診療報酬(内容抜粋) 2024.09 現在の内容

入院	点数
A233 リハビリテーション・栄養・口腔連携体制加算(1日につき)	
リハビリテーション、栄養管理及び口腔管理について、入院した患者全員に対し、入院後48時間以内にADL、栄養状態及び口腔状態に関する評価を行い、リハビリテーション、栄養管理及び口腔管理に係る計画の作成及び計画に基づく多職種による取組を行った場合、患者1人につきリハビリテーション・栄養管理・口腔管理に係る計画を作成した日から起算して14日を限度に算定。	120点
病態に応じた早期からの疾患別リハビリテーションの推進 急性期リハビリテーションの加算	50点
医学管理	
B00-10 回復期等口腔機能管理計画策定料	
リハビリテーション等を行う保険医療機関からの文書による依頼に基づき、当該患者又はその家族の同意を得た上で、回復期等の口腔機能の評価及び一連の管理計画を策定するとともに、その内容について説明を行い、当該管理計画を文書により提供した場合に、当該リハビリテーション等に係る一連の治療を通じて1回に限り算定。	300点
B00-11 回復期等口腔機能管理料	
区分番号B000-10に掲げる回復期等口腔機能管理計画策定料の注1に規定する管理計画に基づき、リハビリテーション等を行う他の保険医療機関又は同一の保険医療機関に入院中の患者に対して、歯科医師が口腔機能の管理を行い、かつ、当該管理内容に係る情報を文書により提供した場合は、当該患者につき、区分番号B000-10に掲げる回復期等口腔機能管理計画策定料を算定した日の属する月から月1回に限り算定。	200点

リハビリテーション	点数
H004 摂食機能療法(1日につき)	
1.30分以上の場合 (摂食機能障害を有する患者に対して、月に4回に限り算定する。ただし、治療開始日から起算して3月以内の患者については、1日につき算定可能。)	185点
2.30分未満の場合 (脳卒中中の患者であって、摂食機能障害を有するものに対して、脳卒中中の発症から14日以内に限り、1日につき算定できる。)	130点
<u>摂食機能又は嚥下機能の回復に必要な指導管理を行った場合は、摂食嚥下機能回復体制加算として、当該基準に係る区分に従い、患者(ハについては、療養病棟入院料1又2を現に算定しているものに限る。)1人につき週1回に限り次に掲げる点数を所定点数に加算する。</u>	
医師・歯科医師、適切な研修を修了した看護師、専従の言語聴覚士、管理栄養士で構成される「摂食嚥下支援チーム」を設置し、鼻腔栄養・胃瘻・中心静脈栄養患者の経口摂取回復率35%以上、摂食機能・嚥下機能の実績を報告するなどの施設基準を満たす医療機関。	210点
医師・歯科医師、適切な研修を修了した看護師、専従の言語聴覚士、管理栄養士で構成される「摂食嚥下支援チーム」を設置し、摂食機能・嚥下機能の実績を報告するなどの施設基準を満たす医療機関。	190点
療養病棟入院基本料1・2取得病棟において、専任医師・看護師または言語聴覚士の配置、「嚥下機能評価を行って嚥下リハビリ等を実施したことから嚥下機能が回復し、中心静脈栄養患者を終了した患者」が1年間に2人以上、摂食機能・嚥下機能の実績を報告するなどの施設基準を満たす医療機関。	120点

歯科診療	点数
B000-8 周術期等口腔機能管理料(Ⅲ)	
がん等に係る放射線治療、化学療法、集中治療室における治療又は緩和ケア(以下「放射線治療等」という。)を実施する患者の口腔機能を管理するため、区分番号B000-5に掲げる周術期等口腔機能管理計画策定料の注1に規定する管理計画に基づき、歯科医師が口腔機能の管理を行い、当該管理内容に係る情報を文書により提供した場合は、当該患者につき、区分番号B000-5に掲げる周術期等口腔機能管理計画策定料を算定した日の属する月から月1回に限り算定する。	200点
B000-9 周術期等口腔機能管理料(Ⅳ)【新設】	
区分番号B000-5に掲げる周術期等口腔機能管理計画策定料の注1に規定する管理計画に基づき、他の保険医療機関又は同一の保険医療機関に入院中の患者であって、放射線治療等を実施するものに対して、歯科医師が口腔機能の管理を行い、当該管理内容に係る情報を文書により提供した場合は、当該患者につき、区分番号B000-5に掲げる周術期等口腔機能管理計画策定料を算定した日の属する月から起算して3月以内においては月2回に限り、その他の月においては月1回に限り算定。	200点
区分番号B000-5に掲げる周術期等口腔機能管理計画策定料を算定した日の属する月から起算して6月を超えて、注1に規定する管理を行った場合は、長期管理加算として50点を所定点数に加算する。	

1029-1 回復期等専門的口腔衛生処置	
区分番号 B000-11 に掲げる回復期等口腔機能管理料を算定した入院中の患者に対して、歯科医師の指示を受けた歯科衛生士が専門的口腔清掃を行った場合に、回復期等口腔機能管理料を算定した日の属する月において、月 2 回に限り算定する。	100 点
1030-2 非経口摂取患者口腔粘膜処置（1 口腔につき）	
歯科医師又はその指示を受けた歯科衛生士が、口腔衛生状態の改善を目的として、口腔清掃用具等を用いて、口腔の剥離上皮膜の除去を行った場合、月 2 回に限り算定する。経管栄養等を必要とする、経口摂取が困難又は可能であってもわずかであり、患者自身による口腔清掃が困難な療養中の患者であって、口腔内に剥離上皮膜の形成を伴うものが対象。	110 点

● 口腔ケア（一部、感染対策）に関連する介護報酬で、2024 年度改定により変更になった部分

現 行

改 定 後

施設系サービス

		高齢施設等感染対策向上加算（Ⅰ）【新設】 第 2 種協定指定医療機関等と連携年 1 回参加	10 単位 / 月
		高齢施設等感染対策向上加算（Ⅱ）【新設】 3 年に 1 回以上実施指導を受ける。	5 単位 / 月
口腔衛生管理加算（Ⅰ）	90 単位 / 月	口腔衛生管理加算（Ⅰ）	90 単位 / 月
口腔衛生管理加算（Ⅱ）	110 単位 / 月	口腔衛生管理加算（Ⅱ）	110 単位 / 月
栄養ケア・マネジメントの未実施	14 単位 / 日減算	栄養ケア・マネジメントの未実施	14 単位 / 日減算
栄養マネジメント強化加算	11 単位 / 日	栄養マネジメント強化加算	11 単位 / 日
リハビリテーションマネジメント加算（イ） 6 月以内：560 単位 / 月 6 月超：240 単位 / 月		リハビリテーションマネジメント加算（イ） 6 月以内：560 単位 / 月 6 月超：240 単位 / 月	
リハビリテーションマネジメント加算（ロ） 6 月以内：593 単位 / 月 6 月超：273 単位 / 月		リハビリテーションマネジメント加算（ロ） 6 月以内：593 単位 / 月 6 月超：273 単位 / 月	
		リハビリテーションマネジメント加算（ハ）【新設】 6 月以内：793 単位 / 月 6 月超：473 単位 / 月	
		事業所の医師が利用者等に説明し、同意を得た場合、上記に 270 単位を加算【新設】	

通所系サービス、多機能系サービス、居住系サービス

口腔・栄養スクリーニング加算（Ⅰ）	20 単位 / 回	口腔・栄養スクリーニング加算（Ⅰ）	20 単位 / 回
口腔・栄養スクリーニング加算（Ⅱ）	5 単位 / 回	口腔・栄養スクリーニング加算（Ⅱ）	5 単位 / 回
口腔機能向上加算（Ⅰ）（※月 2 回を限度）	150 単位 / 回	口腔機能向上加算（Ⅰ）（※月 2 回を限度）	150 単位 / 回
口腔機能向上加算（Ⅱ）（※月 2 回を限度）	160 単位 / 回	口腔機能向上加算（Ⅱ）（※月 2 回を限度）	160 単位 / 回
		口腔連携強化加算（※月 1 回を限度）【新設】	50 単位 / 回

通所系サービス、看護小規模多機能型居宅介護

栄養アセスメント加算	50 単位 / 月	栄養アセスメント加算	50 単位 / 月
栄養改善加算（※月 2 回を限度）	200 単位 / 回	栄養改善加算（※月 2 回を限度）	200 単位 / 回

認知症グループホーム

栄養管理体制加算	30 単位 / 月	栄養管理体制加算	30 単位 / 月
----------	-----------	----------	-----------





















施設系サービス（介護療養型医療施設を除く）

科学的介護推進体制加算（Ⅰ）	40 単位 / 月	科学的介護推進体制加算（Ⅰ）	40 単位 / 月
科学的介護推進体制加算（Ⅱ）	60 単位 / 月	科学的介護推進体制加算（Ⅱ）	60 単位 / 月

通所系サービス、多機能系サービス、居住系サービス

科学的介護推進体制加算	40 単位 / 月	科学的介護推進体制加算	40 単位 / 月
-------------	-----------	-------------	-----------

口腔ケア製品一覧

品名	品番	規格	包装	1梱入数	JANコード
爽快 お口うるるジェル	3901180	はちみつレモン風味 80g	1本/箱	60箱	 4 958286 718095
爽快 お口うるるジェル	3901181	パインアップル風味 80g	1本/箱	60箱	 4 958286 718101
爽快 お口すっきりウエットシート	1156993	150mm×200mm ミント風味	50枚/個	40個	 4 958286 079967
爽快 お口すっきりドライシート	1156994	80mm×220mm 2折	150枚/箱	40箱	 4 958286 718194
爽快 お口キレイぐるっとブラシ	3118067	ブラシ径15mm ホワイト	30本/箱	16箱	 4 958286 720388
爽快スポンジ	1240973	レギュラー 紙軸	50本×6袋/箱	6箱	 4 958286 717920
爽快スポンジ	1240976	レギュラープラスチック軸	50本×6袋/箱	6箱	 4 958286 717937
爽快スポンジ	3118060	レギュラープラスチック軸 10本入	10本×20袋/箱	6箱	 4 958286 718637
爽快綿棒ハーフ	1240012	紙軸片軸	200本/箱	20箱	 4 958286 303154
爽快綿棒サンクスワブ	3300039	凹凸タイプ綿棒 紙軸	1本/袋×50本/箱	20箱	 4 958286 711843
爽快 ハクゾウマウスクリンA	1290092	No.12 レモン風味	1本×25袋/箱	40箱	 4 958286 053080
爽快 ハクゾウマウスクリンA	1290093	No.13 レモン風味	1本×25袋/箱	40箱	 4 958286 054001
爽快 ハクゾウマウスクリンA	1290095	No.12 ブルーベリー風味	1本×25袋/箱	40箱	 4 958286 058337
爽快 よりそうブラシ	3118054	超やわらかめ 2本入	12個/箱	12箱	 4 958286 720890
爽快 よりそうブラシ	3118055	やわらかめ 2本入	12個/箱	12箱	 4 958286 720906
ピカッと爽快 吸いと〜る スターターキット	1850830	—	—	60個 (6個/箱×10)	 4 958286 720012
ピカッと爽快 吸いと〜るスポンジ	3118065	50本入	—	300本 (50本/箱×6)	 4 958286 719917
ピカッと爽快 吸いと〜る歯ブラシ	3118066	50本入	—	300本 (50本/箱×6)	 4 958286 719924
爽快 吸いと〜るスポンジ	3118063	50本入	—	300本 (50本/箱×6)	 4 958286 719894
爽快 吸いと〜る歯ブラシ	3118064	50本入	—	300本 (50本/箱×6)	 4 958286 719900

お客様相談窓口
フリーダイヤル

0120-50-0451

ここ笑み専用サイト

<https://www.hakuzo.co.jp/cocoemi/>

ホームページ



Youtube



Instagram



X(旧Twitter)



2025.09