


感染対策製品のご案内

MEDICAL PRODUCT INFORMATION

-個人防護具(PPE)シリーズ-

防護用具を着用する場面

血液、体液、排泄物等の湿性生体物質に接触する可能性のあるときは防護用具を着用します。

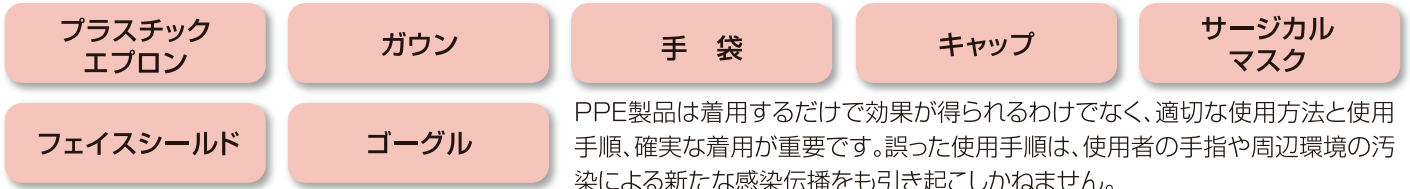


PPE製品は着用するだけで効果が得られるわけではなく、適切な使用方法と使用手順、確実な着用が重要です。誤った使用手順は、使用者の手指や周辺環境の汚染による新たな感染伝播をも引き起こしかねません。

PPE着用の 目的

- 医療従事者自身を感染から守る。
- 医療従事者の手から病原体を患者様に感染させない。
- 患者様から患者様へ感染を媒介させない。


着用手順

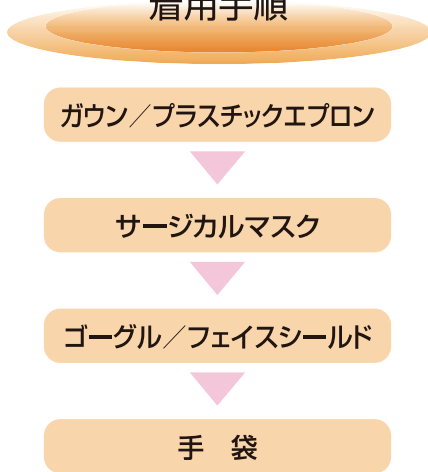

「どの器具に対して」
「どのタイミングで」
「どのような手順で」
使用したらいいの??

理解して実践していることは
意外に、少ないのが現状では
ないでしょうか。

外す手順

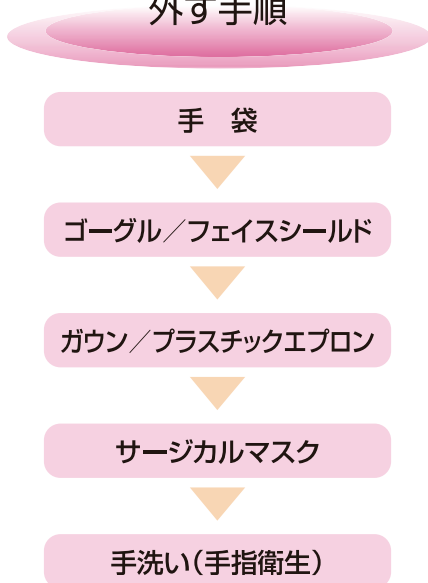

エプロン／ガウンの着用

医療従事者が血液、体液、排泄物などの汚染の恐れがある処置やケアを行う場合、及び医療従事者の汚染された制服から患者を保護する必要がある場合において、ガウンまたはエプロンを着用します。

ガウン・エプロンは、血液、体液が着衣へ浸透しないよう、撥水性或いは防水性のものを選択する必要があります。

エプロンとガウンの選択

汚染のリスクが
広範囲の場合



汚染のリスクが
体幹部の場合



袖のない
エプロンで
大丈夫？

医療従事者が汚染を受けやすい部位は体幹部です。

汚染範囲が広範囲でない通常の処置・ケアの場合は、袖がないエプロンで十分であり、エプロン使用后、手首までの手洗いを実施します。

ハクゾウプラスチックガウン

- 袖口は、親指フックタイプとゴムそでタイプの2種類あります
- 血液・体液等の水分・菌を通さないポリエチレン製
- 経済的且つ着脱が容易

ハクゾウプラスチックエプロン

- 血液・体液等の水分・菌を通さないポリエチレン製
- 経済的且つ着脱が容易
- サイズ:72cm×120cm～125cm
- 色:ホワイト、ピンク、ブルー

エプロンの着脱方法

ポイント Point!!! 外側が汚染しないように着用する。外側の汚染面に触れないように、汚染面を包み込むように脱ぐ。⇒最後に手洗い・手指消毒。

[着け方]

step.1

箱から1枚ずつ取り出します。

step.2

内側が相手側に向くように開きながら、そとをかぶります。
※逆に着用してしまわないように内側・外側をきちんと確認してから着用するようにしてください。

step.3

かぶった後、両端を持ちながらゆっくり下に広げていきます。(この時、エプロンは相手側に触れないように注意してください)

step.4

エプロンを最後まで広げ終わったら、腰ヒモを手に取ります。

step.5

最後に腰ヒモを後で結びます。

[外し方]

step.1

首にかけたヒモの部分を強く引いて切ります。

step.2

腰ヒモの高さまで上半身部をおろします。

step.3

左右の裾を腰ヒモの高さまで持ち上げて外側(汚染部分)を中に折り込んでいきます。

step.4

後ろの腰ヒモを強く引っ張って切ります。

step.5

外側(汚染部分)に触れないように両端を持ちながら三折にくるみ感染性廃棄物として捨ててください。

step.6

最後に、手指衛生を行います。

※着脱手順の下敷きをご用意しています。

血液・体液・排泄物などから保護するための Disposable エプロンです。

ハクゾウプラスチックエプロン SE-ECO

●72cm×120cm



ハクゾウプラスチックエプロン SE-プレミアム

●72cm×125cm



●エプロン取り出し時、はみ出し部分を持つと、簡単に2折の状態まで振り広げることができます。

ハクゾウプラスチックエプロン SE-ARIA


●72cm×120cm



血液・体液・排泄物などから保護するための Disposable ガウンです。

ハクゾウプラスチックガウンFE

- 30枚入タイプのガウンとなります。
- 内箱は弊社製品『ラック楽ホルダー』のガウン用ホルダーに入れることもできます。

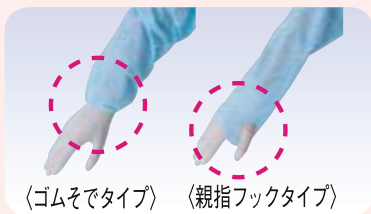

ゴムそでタイプ



親指フックタイプ

30枚入り

ハクゾウプラスチックガウンFE NEO

- 50枚入タイプのガウンとなります。
- 内箱は弊社製品『ラック楽ホルダー』のガウン用ホルダーに入れることもできます。

50枚入り



ハクゾウプラスチックガウンα

- 袖口は親指フックとゴムタイプ2種類あります。
- 内箱は弊社製品『ラック楽ホルダー』のグローブ・エプロン用ホルダーに入れることもできます。

15枚入り



手袋が必要な場面

湿性の血液・体液・分泌物・排泄物、患者の皮膚・粘膜等に接触する可能性がある時に着用します。また、医療従事者の手に創傷や手荒れがある場合も交差感染予防の点から着用します。手袋を外した時には手洗いをを行います。

手袋の交換

- 一人一人の患者のケア毎に
- 汚染された操作から清潔操作に移る時に

ハクゾウプラスチックグローブEX

縦置き・横置きどちらでも手首側から1枚ずつ取り出せるパッケージ。



ハクゾウプラスチックグローブEL PLUS

衛生的なパウダーフリー加工のプラスチックグローブです。



- パウダーフリー加工により、パウダー飛散による汚染リスクがなく衛生的です。
- 取り出し口が表・裏に配置されており、縦置き・横置きに応じて、使い分けが可能です(※包装方法について意匠登録済。)
- 場所ごとにミシン目の間隔が異なっており、開封しやすくなっています。また、すべての取り出し口が親指を引っ掛けて開封可能となっています。

ハクゾウプラスチックグローブMF

80枚入りのコンパクト包装の衛生的なパウダーフリー加工のプラスチックグローブです。



80枚入りのコンパクトサイズ

コンパクトな箱サイズ
従来比で入数が80%で、
体積が約半分!!

※弊社製品「プラスチックグローブEX」との比較です。

コンパクト包装なので、専用ホルダーに2サイズ設置してご使用できます。

花柄を合わせると正しい位置で取り出しできるようになります。



- コンパクト設計されているので、専用ホルダー(グローブ・エプロン用)に2つ入れることができます。

ハクゾウニトリルグローブES

耐薬剤性、伸縮性に優れ、手にフィットするニトリルグローブです。



- 食品衛生法適合品です。
- テープにくっつきにくく、指先に滑り止め加工を施していますので、作業性に優れています。
- 薬剤に対するバリア性に優れています。(右表参照)
- ラテックスフリー素材なので、ラテックスアレルギーの方にも安心してご使用頂けます。
- パウダーフリー加工により、パウダー飛散による汚染リスクがなく衛生的です。


化学療法剤透過試験

試験法	薬剤名	濃度	透過時間
ASTM D 6978-05	メトレキサート	25.0mg/ml (25,000ppm)	240分まで浸透せず
	シスプラチン	1.0mg/ml (1,000ppm)	
	シクロホスファミド	20.0mg/ml (20,000ppm)	
	ダカルバジン(DTIC)	10.0mg/ml (10,000ppm)	
	塩酸ドキシルピシン	2.0mg/ml (2,000ppm)	
	エトポシド	20.0mg/ml (20,000ppm)	
	5-フルオロウラシル	50.0mg/ml (50,000ppm)	
	バクリタキセル	6.0mg/ml (6,000ppm)	
	硫酸ピンクリスチン	1.0mg/ml (1,000ppm)	
マイトマイシンC	0.5mg/ml (500ppm)		

耐薬品性試験


試験法	薬剤名	濃度	透過時間
EN374-3:2003	水酸化ナトリウム	40%	480分まで浸透せず

着け方 ※着脱手順の下敷きをご用意しています。

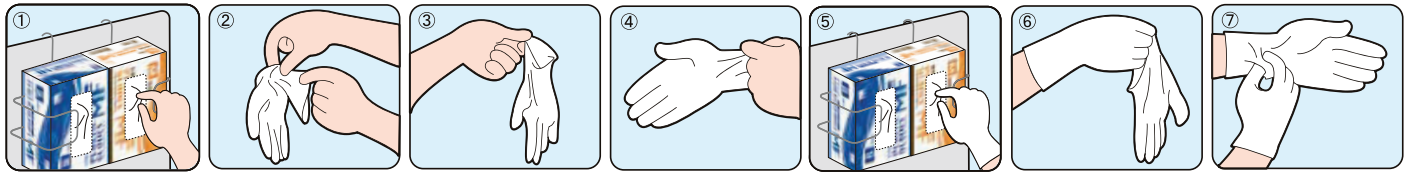

① 利き手で箱からつまんで取り出します。
 ② 手袋を利き手からもう一方の手に持ち替えます。
 ③ 持ち替えた後、親指の位置を確認します。
 ④ 手袋の外側はなるべく何処にも触れないように利き手に装着します。
 ⑤ 装着した手で、箱から手袋を取り出します。
 ⑥ もう一方の手に持ち替え、親指の位置を確認し、再び装着済の利き手に持ち替えます。
 ⑦ 手袋をした手が何処にも触れないように装着します。

外し方

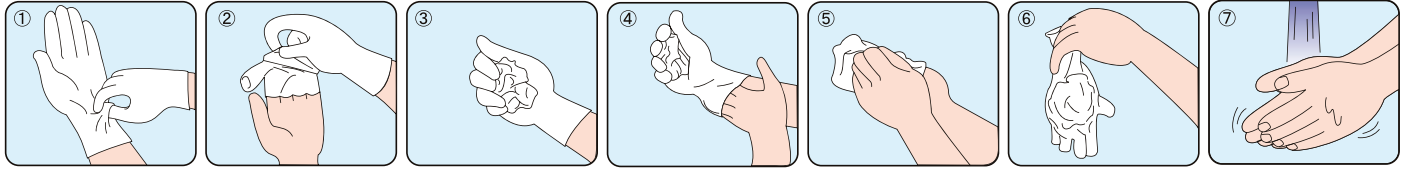

① 利き手で一方の手袋の袖口から3~5cm部分をつかみます。
 ② 手袋をひっくり返し(外側が内側になるように)抜いていきます。
 ③ 手袋を抜いた後、手袋を利き手の手袋の中で丸めて握ります。
 ④ 汚染した手袋の外側に触れないように手袋を外した手で利き手の袖口の中に入れ、同様にひっくり返します。
 ⑤ 利き手の手袋を上に向けて、外していきます。
 ⑥ 外した後は手袋を感染性廃棄物として捨てます。
 ⑦ 最後に手指衛生を行います。

手袋の着け方・外し方は感染予防の点からも非常に重要です。
 着用時は手袋の表面を汚染しないように、外す際は、汚染した手袋の表面に触れないようにする配慮が必要です。

キャップ・マスクの着用

キャップ

髪の毛が汚染される可能性のある場合や、髪の毛が落下しないよう、手術室などの清潔領域の環境汚染防止の為に着用します。



素材:ポリプロピレン

ハクゾウディポーザブルキャップN

- スティック状の蛇腹型で広げてかぶることができ、伸縮性が高く装着性に優れています。
- 蛇腹型なのでサイズ調整が容易です。
- 通気性があるので長時間着用が可能です。
- 専用ホルダーに入れることが可能です。
- ゴム部分はラテックスフリーです。



キャップが必要な場面は??

- ICU、オペ室、器具の洗浄時 ●マキシマルバリアアプリケーション時 ●調剤時 など

サージカルマスク

血液、体液、分泌物、排泄物の飛散・飛沫から呼吸器(口・鼻)を防護、環境中に排出された微生物から呼吸器への侵入を防止、咳・くしゃみによる呼吸器からの飛散を防止するために着用します。

ハクゾウオメガマスク プラス

マスクサイズ:17.5cm×9cm



ハクゾウサージカルマスクLF

マスクサイズ:17.5cm×9.5cm



※各マスクとも、樹脂製ノーズフィッターを使用しているため、非金属であり、MRI室等でご使用いただけます。

日本産業規格 JIS T 9001						
医療用マスク クラスIII 規格適合番号 M32111041						
適合番号発行元: JHPIA						
試験項目	PFE	BFE	VFE	可燃性	血液バリア	安全衛生
規格値	≥98%	≥98%	≥98%	(区分1)	21.3 kPa	・通気性
適合判定	○	○	○	○	○	○

PFE:微小粒子捕集効率 BFE:バクテリア飛まつ捕集効率 VFE:ウイルス飛まつ捕集効率

日本産業規格 JIS T 9001						
医療用マスク クラス II 規格適合番号 M22112011						
適合番号発行元: JHPIA						
試験項目	PFE	BFE	VFE	可燃性	血液バリア	安全衛生
規格値	≥98%	≥98%	≥98%	(区分1)	16.0 kPa	・通気性
適合判定	○	○	○	○	○	○

PFE:微小粒子捕集効率 BFE:バクテリア飛まつ捕集効率 VFE:ウイルス飛まつ捕集効率

サージカルマスク装着手順 ※装着手順の下敷きをご用意しています。



マスクの**前面**は、汚染している可能性があります。着用後は触れないでください。

また後で使おう

こんなことしていませんか。

使用済みのPPEは汚染されています！
使用済みのマスクをポケットに入れておき、再度使用することもダメです！

外し方のポイント

※マスクを取り外す時は、汚染表面を触らないようにゴムひもを持って取り外すようにしてください。

サージカルマスクが必要な場面は??

- 喀痰吸引
- 血液が飛沫する恐れがある処置
- 創部の洗浄
- 飛沫感染患者のケア
- マキシマルバリアアプリコーション時 など

● 喀痰吸引

● 創部の洗浄

シールド 血液、体液、排泄物などが飛散し、眼部に浴びる恐れがある処置やケアを行う場合、着用します。

シールド付フェイスマスクCE



日本産業規格 JIS T 9001
医療用マスククラス III 規格適合番号 M32407002
適合番号発行元: JHPiA

試験項目	PFE	BFE	VFE	可燃性	血液バリア	安全衛生
規格値	≥98%	≥98%	≥98% (区分1)	21.3 kPa	・通気性	
適合判定	○	○	○	○	○	○

PFE:微小粒子捕集効率 BFE:バクテリア飛まつ捕集効率 VFE:ウイルス飛まつ捕集効率

【製品データ】

- ・バクテリア飛沫捕集効率 BFE: 99%
- ・人工血液バリア性 21.3kPa(160mmHg)
- ・微粒子捕集効率 PFE: 99%
- ・圧力損失 ΔP(mmH2O/cm)<5.0
- ・ウイルス飛沫捕集効率 PFE: 99%
- ・可燃性 CLASS 1



- シールドには曇りにくい加工を施しています。
- 専用ホルダーに入れることが可能です。
(※ホルダーグローブ・エプロン用をご使用ください。)

シールドが必要な場面は??

- 創部の洗浄
- 口腔処置・ケア時
- 気管内吸引(開放式)
- 器具の洗浄時
- 気管内視鏡 など

シールド付フェイスマスクCS



※シールド性能を審査したものではありません

日本産業規格 JIS T 9001
医療用マスククラスII 規格適合番号 M22403006
適合番号発行元: JHPiA

試験項目	PFE	BFE	VFE	可燃性	血液バリア	安全衛生
規格値	≥98%	≥98%	≥98% (区分1)	16.0 kPa	・通気性	
適合判定	○	○	○	○	○	○

PFE:微小粒子捕集効率 BFE:バクテリア飛まつ捕集効率 VFE:ウイルス飛まつ捕集効率

ハクゾウファインガード フェイスシールド

取り付け動画はこちら

飛散物から顔全体を防護するシールド交換式のフェイスガード

- 上部・サイドからの飛沫も防護する日本製の当社オリジナルのシールド形状です。
- フレーム(ブルー)1枚とフレーム5枚セットもご用意。
- 眼鏡やN95マスクの上からでも装着可能です。



レギュラータイプ 50枚入

※アイシールドタイプにはセット品はございません。



フェイスシールドセット



ハクゾウファインガード アイシールド

取り付け動画はこちら

眼への血液・体液曝露による飛沫感染を防ぐシールド交換式のアイガード



レギュラータイプ 100枚入



フレーム(ブルー・イエロー・ピンク)
30枚入(各色10枚入)



PPEは適切な着用方法と共に、必要とする部署に常時製品が設置されている環境づくりが大切です。PPE専用ホルダーの導入により、製品を探すことなく必要とする時に即着用でき、作業効率のアップとともに、感染対策の実施が一目瞭然となります。

標準予防策で、感染予防として手袋やガウンの着用が推奨されていますが、実際の病院の現場は…

製品は購入しているが、病院での个人防护具の着用率はあまり高くないのが現状です。


医療関連感染対策のご提案として

- ★作業効率のアップ
- ★必要な箇所への**防護具ホルダー**の設置⇒必要性の認識向上
- ★病院機能評価・監査の院内感染対策への対応




ラック楽ホルダー®NET

- ねじ留めタイプとマグネットタイプを用意。
- 製品単体用ホルダーのみの設置も可能。
- 縦型、横型タイプどちらでも設置も可能。

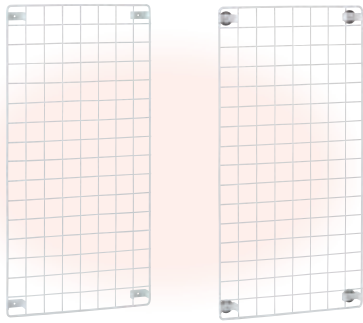

壁掛け用NET+ネジ式4P 壁掛け用NET+マグネット4ヶ

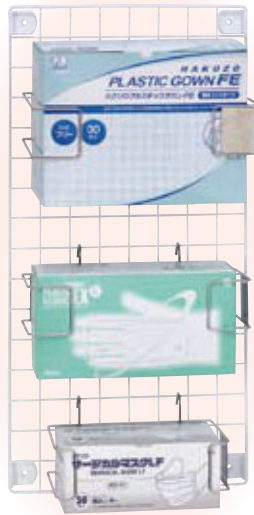


縦型



横型

ラック楽ホルダー®LIGHT

- ねじ留めタイプとマグネットタイプを用意。
- グローブ・エプロン用とマスク用ホルダーに加え、手指消毒剤用の専用ホルダーもフックで引っかけることができます。
(※縦型のみでの使用となります。)

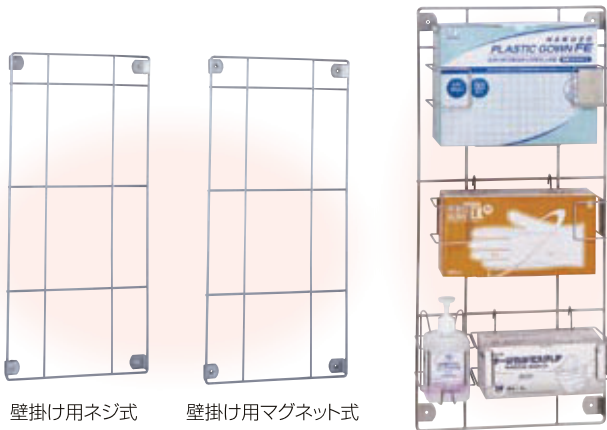

壁掛け用ネジ式 壁掛け用マグネット式

※写真には、一部旧デザインのものが含まれています。
ホルダーの取り付けイメージとしてご参考ください。

ラック楽ホルダー®NEXT(移動式)

- グローブ用やマスク用、擦式アルコール手指消毒用のホルダーを両側に引っ掛けることができます。
- キャスター付きのため、移動させることができます。



マグネットが装着可能。



リールフックが装着可能。




ロック機能で、固定が可能。

キャスター付きで
容易に移動できます

ご使用例 ホルダーを両面に設置可能



ロック機構付き
固定する時も動かない
ので安心です

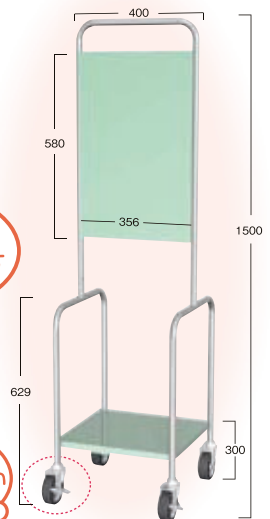

(単位:mm)

ラック楽ホルダー®SE (手すり用)

- ホルダー設置により、作業効率がアップし、業務の改善につながります。
- 壁等に設置できない場所でも、下側を手すりに差し込むことで、傷つけずに設置できます。
- 種類の異なるPPEをまとめて収納できます。



3連タイプ



マスクタイプ



グローブ・エプロンタイプ

ハクゾウリシールフック

- PPEホルダーやアルコール手指消毒剤・ハンドソープホルダー設置補助用として使えるフック付き粘着シートです。
- 平らな面に貼るだけなので、使い方が簡単。付け外しも簡単です。
- 2種類ございませので、使用環境に応じてお選び頂けます。

【取り付けられる素材】

ガラス、タイル、ステンレス、プラスチック製ボード、アクリル板など



7cm×7cm
カバー付き




7.5cm×22cm


ラック楽ホルダー® SE

- フックを使用しない場合は、自由に取り外すことができます。
- マグネットタイプで取り付けの場合、滑り止め及び壁の保護のため、滑り止めゴムが付いています。


グローブ・エプロン用

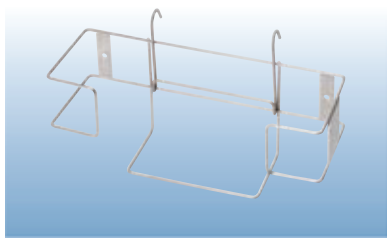




フック式

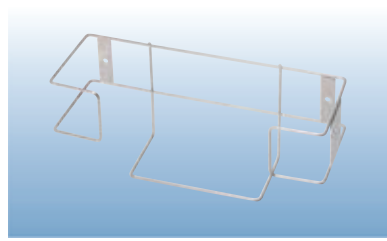


ネジ式

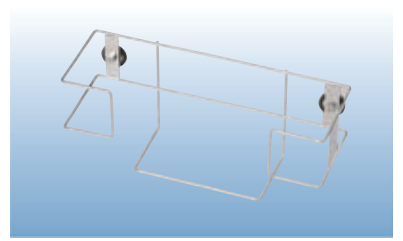


マグネット式

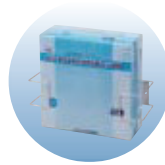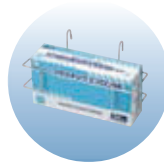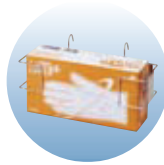


マスク用

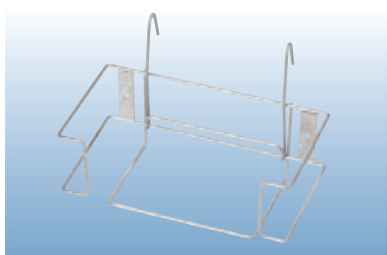

フック式

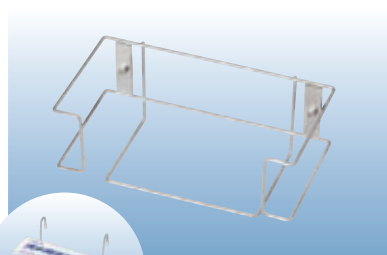


ネジ式

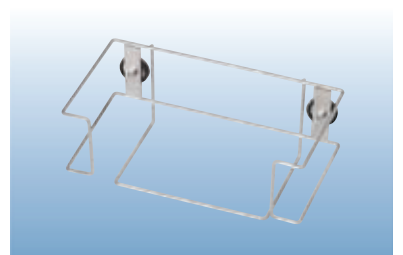

マグネット式



ガウン用(30枚入用)

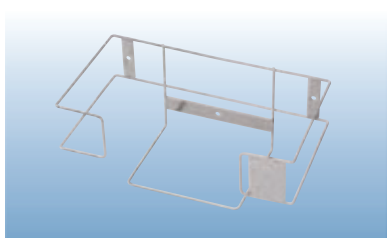

ネジ式



●落下防止バーもございますので、必要に応じてご使用頂けます。



呼吸器衛生 / 咳エチケット

MEDICAL PRODUCT INFORMATION

咳エチケットセット

感染力のある呼吸器感染症の患者様、同伴家族、友人をターゲットとしており、咳・充血・鼻水・呼吸器分泌物の増加等の症状のある方が医療施設に入る時に適用されます。

ハクゾウせきエチケットセット

マスク・消毒用アルコール綿・廃棄袋の3点入ったセットで、持ち運びにも便利です。

ハクゾウサージカルマスク (5枚入)



セット内容

- サージカルマスク……2枚
- 消毒用アルコール綿……2枚
- 廃棄用袋……1枚



STEP①



せき・くしゃみの際にはティッシュなどで口と鼻を押さえましょう。

STEP②



手指衛生は感染対策の基本です。口と鼻をおさえた手は、消毒用アルコール綿で手を消毒するかよく洗いましょう。

STEP③



使用後のマスク、消毒用アルコール綿を廃棄袋に入れ、ゴミ箱に捨てて、感染拡大防止に努めましょう。


新型ウイルス対策

MEDICAL PRODUCT INFORMATION

感染防護具セット

ウイルスは、飛沫、血液、その他の体液を介して伝播します。そのため防護服には、感染源となる飛沫、血液等の浸透を防ぐ機能が必要となり、特に感染患者と接触する医療従事者は、より高度なバリア性を備えた防護服を着用する必要があります。新型ウイルスは、いつ出現するか誰にも予測できません。その時の備えとして感染防護具セットを備蓄することが重要です。

- 品番:2610035 ハクゾウ感染防護具セット A
- 品番:2610036 ハクゾウ感染防護具セット B

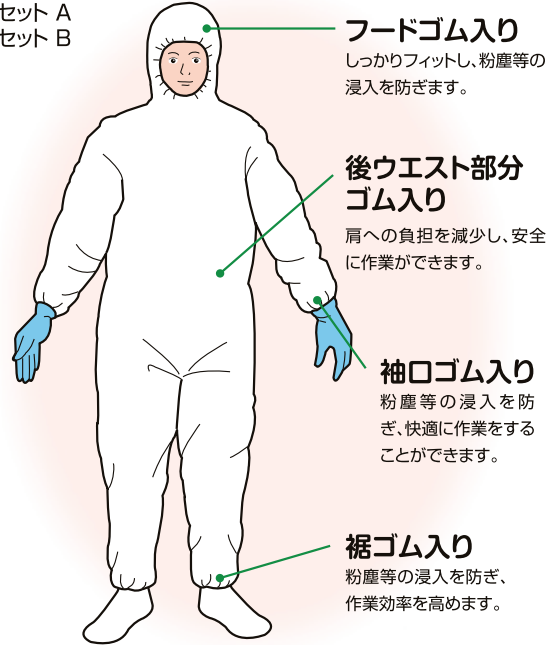

フードゴム入り
しっかりフィットし、粉塵等の浸入を防ぎます。

後ウエスト部分ゴム入り
肩への負担を減少し、安全に作業ができます。

袖口ゴム入り
粉塵等の浸入を防ぎ、快適に作業をすることができます。

裾ゴム入り
粉塵等の浸入を防ぎ、作業効率を高めます。

※その他、ご施設様のご要望に応じた内容もお選び頂けます。

感染防護具の着衣・脱衣手順

感染防護具の着衣手順

- 

1層目の手袋を装着します。
- 

カバーオールを足からはき、両腕を通してファスナーを首の下まで上げます。
- 

ブーツカバーを装着して、ヒモをしっかり結びます。
- 

N95マスクを装着し、髪の毛が出ないようにフードを被り、カバーオールのファスナーを完全に上げ、ゴーグル密着させて装着します。
- 

最後に、2層目の手袋を装着して完了です。
- 

最後はきちんと着用できているかをチェックしてください。

感染防護具の脱衣手順

- 

2層目の手袋でブーツカバーのひもを解く。その後、消毒用アルコールで2層目の手袋を消毒します。
- 

2層目の手袋は手首近くの縁を外側につまみながら、内部を表にしながら外して、感染性廃棄物として廃棄してください。
- 

消毒用アルコールで1層目の手袋を消毒して、ゴーグルの前面に触れないように丁寧に外して、感染性廃棄物として廃棄してください。
- 

カバーオールのファスナーを下まで下ろす。介助者が、カバーオールのフードから裏返しから脱がせて、ブーツカバーごと完全に脱がして、感染性廃棄物として廃棄してください。
- 

再度消毒用アルコールで1層目の手袋を消毒して、手首近くの縁を外側につまみながら、内部を表にしなが外して、感染性廃棄物として廃棄してください。
- 

最後に、N95マスクの表面に触れないように、ゴムヒモを持って外し、感染性廃棄物として廃棄してください。

-個人防護具(PPE)シリーズ- 製品規格一覧

2025.06

品名	品番	種類・規格	包装	1梱入数	JANコード
ハクゾウプラスチックエプロン SEプレミアム	3024121	ホワイト 72cm×125cm	50枚/箱	20箱	4958286709994
	3024122	ピンク 72cm×125cm	50枚/箱	20箱	4958286710006
	3024123	ブルー 72cm×125cm	50枚/箱	20箱	4958286710013
ハクゾウプラスチックエプロン SE-ECO	3024501	ホワイト 72cm×120cm	50枚/箱	20箱	4958286712345
	3024502	ピンク 72cm×120cm	50枚/箱	20箱	4958286712352
	3024503	ブルー 72cm×120cm	50枚/箱	20箱	4958286712369
ハクゾウプラスチックガウンFE	3087621	親指フックタイプ	30枚/箱	8箱	4958286720241
	3087622	ゴムそでタイプ	30枚/箱	8箱	4958286720258
ハクゾウプラスチックガウンFE NEO	3087623	親指フックタイプ	50枚/箱	8箱	4958286720470
	3087624	ゴムそでタイプ	50枚/箱	8箱	4958286720487
ハクゾウプラスチックガウンα	3087735	親指フックタイプ フリー	15枚/箱	18箱	4958286719726
	3087740	ゴムそでタイプ フリー	15枚/箱	18箱	4958286719733
ハクゾウプラスチックグローブEX	3024092	S	100枚/箱	20箱	4958286704920
	3024093	M	100枚/箱	20箱	4958286704937
	3024094	L	100枚/箱	20箱	4958286704944
ハクゾウプラスチックグローブEL PLUS	3024333	150枚/箱 S	150枚/箱	16箱	4958286719696
	3024334	150枚/箱 M	150枚/箱	16箱	4958286719702
	3024335	150枚/箱 L	150枚/箱	16箱	4958286719719
ハクゾウプラスチックグローブMF	3024111	S	80枚/箱	30箱	4958286709529
	3024112	M	80枚/箱	30箱	4958286709536
	3024113	L	80枚/箱	30箱	4958286709543
ハクゾウニトリルグローブES	3024071	XS	200枚/箱	12箱	4958286706337
	3024072	S	200枚/箱	12箱	4958286706344
	3024073	M	200枚/箱	12箱	4958286706351
	3024074	L	200枚/箱	12箱	4958286706368
ハクゾウポリグローブステラTP-1	3087711	S	200枚/箱	20箱	4958286717364
	3087712	M	200枚/箱	20箱	4958286717371
	3087713	L	200枚/箱	20箱	4958286717388
ハクゾウディスプレイザブルキャップN	3087601	ブルー フリー	100枚/箱	20箱	4958286706719
ハクゾウオメガマスクプラス	3901421	レギュラー ブルー	50枚/箱	40箱	4958286711386
	3901423	レギュラー ピンク	50枚/箱	40箱	4958286711393
	3901425	レギュラー ホワイト	50枚/箱	40箱	4958286711409
ハクゾウサージカルマスクLF	3087530	レギュラー ホワイト	50枚/箱	30箱	4958286900704
	3087531	レギュラー ブルー	50枚/箱	30箱	4958286900711
	3087532	レギュラー ピンク	50枚/箱	30箱	4958286900728
シールド付フェイスマスクCE	3087651	ゴムタイプ フリーサイズ	50枚/箱	8箱	4958286063744
シールド付フェイスマスクCS	3087660	ゴムタイプ フリーサイズ	50枚/箱	8箱	4958286718927
ハクゾウファインガード	3002801	フレームのみ(ブルー/イエロー/ピンク)	30本入(各色10本)	12箱	4958286717890
	3002802	フェイスシールドのみ(レギュラータイプ)	50枚/箱	15箱	4958286717906
	3002804	アイシールドのみ(レギュラータイプ)	100枚/箱	15箱	4958286718316
ラック楽ホルダー-NET	3904937	壁掛け用NET+ネジ式4P	1個/袋	20個	4958286704890
	3904938	壁掛け用NET+マグネット4ヶ	1個/袋	20個	4958286704906
ラック楽ホルダー-LIGHT	3904970	壁掛け用+ネジ式4P	1個/袋	—	4958286705484
	3904971	壁掛け用+マグネット4ヶ	1個/袋	—	4958286705491
ラック楽ホルダー-NEXT(移動式)	3905090	64-6142	1個	—	4958286712079
ラック楽ホルダー-SE	3904931	マスク用ホルダー(ネジ式)	1個/袋	—	4958286701127
	3904933	グローブ・エプロン用ホルダー(ネジ式)	1個/袋	—	4958286701134
	3904941	マスク用ホルダー(フック式)	1個/袋	—	4958286701141
	3904943	グローブ・エプロン用ホルダー(フック式)	1個/袋	—	4958286701158
	3904951	マスク用ホルダー(マグネット式)	1個/袋	—	4958286701165
	3904953	グローブ・エプロン用ホルダー(マグネット式)	1個/袋	—	4958286701301
	3905001	プラスチックガウン30枚入用(ネジ式)	1個/袋	—	4958286707044
	3905003	プラスチックガウン30枚入用(フック式)	1個/袋	—	4958286707068
ハクゾウリシールフック	3087698	7cm×7cm カバー付き	200枚/袋	6箱	4958286715445
	3087692	7.5cm×22cm	50枚/袋	6箱	4958286709871
ハクゾウサージカルマスク5枚入	1780560	ホワイト	5枚/袋	15袋×8箱	4958286900735